



ODYSSEY™

ENTERPRISE CINEMA

Käyttöopas

1.1



710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101
USA
1-314-678-6100

www.stereotaxis.com

© Stereotaxis 2009, 2022

Made In USA

Rx ONLY
CE2797

YHTEYSTIEDOT

Stereotaxis, Inc.
710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101
USA
www.stereotaxis.com
1-314-678-6100 (*Stereotaxis – US*)
0031.75.77.133.13 (*Stereotaxis – EU*)
1-314-678-6200 (*TeleRobotic Support Team – US*)



EDUSTAJA EY:SSÄ

MDSS
(Medical Device Safety Service GmbH)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Saksa



MAAHANTUOJA

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen
33 - Suite 123,
2595 AM The Hague
Netherlands



Patentit

Yhdysvaltain ja muita patenteja haettu.

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit

- Niobe® ja Cardiodrive® ovat Stereotaxis Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Odyssey Cinema™, Odyssey™ ja Navigant™ ovat Stereotaxis Inc:n tavaramerkkejä.

Tähän liittyvät asiakirjat

HDW-0193, Odyssey™ Käyttöopas; HDW-0207, Navigant™ Käyttöopas

Henkilöjen nimet, joihin tässä oppaassa viitataan

Henkilöjen, potilaiden, lääkärin ja muiden käyttäjien nimet, joita tässä asiakirjassa käytetään, ovat Homeroksen Odysseiasa esiintyvien kuvitteellisten nimien yhdistelmiä.

Kannen kuva

Kannen kuva ja vesileimat © 2010, 2022 Stereotaxis, Inc.

Sisältö

Yleiskatsaus	7
Käyttötarkoitus.....	7
Varoitukset/varotoimet	7
Johdanto	8
Odyssey Cinema	8
Odyssey Cinema Client.....	8
Tekniset tiedot	8
Tämä käyttöopas.....	9
Grafiikat ja symbolit	10
Sanasto.....	13
Aloittaminen	14
Login screen (Kirjautumisnäky)	15
Päävalikko	16
Viewerin ikkuna.....	17
Navigointivalikko.....	18
Viewerin valintapaneelit	19
Viewerin työkalurivi	20
Archiverin ikkuna.....	24
Archiverin valintapaneelit	25
Archiverin työkalurivi	28
Preferences (Omat asetukset) -ikkuna	32
Passportin ikkuna	34
Log Off (Uloskirjautuminen).....	35
Liite A: Asennus	36
Hakemisto	42

Kuvaluettelo

Kuva 1 – Odyssey Cineman pikakuvake.....	13
Kuva 2 – Sovelluksen alustaminen	13
Kuva 3 – Kirjautumisnäky	14
Kuva 4 – Kirjautumisikkuna	14
Kuva 5 – Päävalikko, jossa kursori on Viewer-painikkeen päällä.....	15
Kuva 6 – Viewerin ikkuna	16
Kuva 7 – Navigointivalikko.....	17
Kuva 8 – Näyttötilan vaihtopainike	17
Kuva 9 – Navigointipainike	17
Kuva 10 – Ikkunoitu näyttö ja kokoruutunäyttö on merkitty oranssilla katkoviivalla. Näyttötila vaihdetaan näyttötilan vaihtopainikkeella (merkitty punaisella nuolella).	17
Kuva 11 – Viewerin valintapaneelit	18

Kuva 12 – Painikkeita, jotka eivät ole käytettävissä	19
Kuva 13 – Painikkeita, jotka ovat käytettävissä	19
Kuva 14 – Oletusnäyttö	21
Kuva 15 – Yhden suhde yhteen (1:1) -näyttö	21
Kuva 16 – Kokoruutunäyttö	21
Kuva 17 – Yhden suhde yhteen -näyttö ja kokoruutunäyttö	21
Kuva 18 – Viewerin aikajana – suora videokuva	21
Kuva 19 – Viewerin aikajana – väliaikaisen videotallenteen katsominen	21
Kuva 20 – Esimerkkejä aikajanan pituuden ylittävistä tallenteista	22
Kuva 21 – Archiverin ikkuna	23
Kuva 22 – Archiverin valintapaneelit	24
Kuva 23 – Lajitteluperustepainikkeet	24
Kuva 24 – Toimenpidetiedot tulevat esiin, kun siirät kursorin luettelossa olevan toimenpiteen päälle.	25
Kuva 25 – Toimenpideluettelon ohjauspaneeli	25
Kuva 26 – Toimenpidetiedot ja Muokkaa toimenpidetietoja -painike	26
Kuva 27 – Toimenpidetietojen muokauspaneeli ja -painike	26
Kuva 28 – Archiverin työkalurivi yhteyttä luotaessa: kolme painiketta on käytettävissä	27
Kuva 29 – Archiverin työkalurivi, kun yhteys on luotu: suurin osa painikkeista on käytettävissä	27
Kuva 30 – Archiverin työkalurivin yläpuolella olevat ilmaisimet	27
Kuva 31 – Archiverin aikajana – vasen pää	29
Kuva 32 – Archiverin aikajana – oikea pää	29
Kuva 33 – Lisää kirjanmerkki -painike	30
Kuva 34 – Kirjanmerkin kuvaus	30
Kuva 35 – Uusi kirjanmerkki	30
Kuva 36 – Kursori kirjanmerkin päällä	30
Kuva 37 – Valittu kirjanmerkki (jota on napsautettu)	30
Kuva 38 – Muokkaa kirjanmerkkiä -painike ja kirjanmerkin kuvaus	30
Kuva 39 – Poista kirjanmerkki -painike	30
Kuva 40 – Omat asetukset -ikkuna ja sovelluksen asetukset	31
Kuva 41 – Siirry eteenpäin -painike	31
Kuva 42 – Siirry taaksepäin -painike	31
Kuva 43 – Passportin ikkuna	33
Kuva 44 – Navigointivalikko, jonka lopussa on Log Off (Uloskirjautuminen) -painike (oikealla) sekä päävalikko ja Log Off (Uloskirjautuminen) -painike	34
Kuva 45 – Asentaminen – ensimmäinen näkymä	35
Kuva 46 – Asentaminen – mukautetut asetukset	36
Kuva 47 – Asentaminen – edellytykset: Java Runtime Environment	36
Kuva 48 – Asentaminen – asentaa	37
Kuva 49 – Asentaminen – asennus on valmis	37
Kuva 50 – Asennusikkuna – ensimmäinen näkymä	38
Kuva 51 – Ensimmäinen kirjautumisikkuna	39
Kuva 52 – Tavallinen kirjautumisikkuna	39
Kuva 53 – Työpöydällä näkyvä pikakuvake	39
Kuva 54 – Aloitusvalikon pikakuvat	40
Kuva 55 – Kirjautuminen ikkunoituun näyttöön	40
Kuva 56 – Kirjautuminen kokoruutunäyttöön	40

Yleiskatsaus

Käyttötarkoitus

Odyssey Cinema™ on ohjelma, jonka avulla voidaan katsoa etänä Odyssey™ Workstationilla tehtyjä suoria ja tallennettuja toimenpiteitä.

Varoitukset/varotoimet

VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

VAROITUS: Odyssey Cinemaa saavat käyttää vain laitteen toimintaan asianmukaisesti perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset.

VAROITUS: Odyssey Cinema on tarkoitettu ainoastaan potilaan tilan seuraamiseen.

Navigant™-laitteen käyttöoppaassa ja Niobe®-magneettinavigointijärjestelmän käyttöoppaassa kerrotaan kaikki magneettinavigointiin liittyvät varoitukset ja varotoimet.

Johdanto

Odyssey Cinema

Odyssey Cinema™ on Odyssey™-tuotteen valinnainen lisäosa. Se sisältää seuraavat toiminnot:

- Suoran Odyssey-videon arkistointi – käyttäjä voi nauhoittaa suoran Odyssey-toimenpiteen ja tallentaa sen arkistopalvelimelle myöhemmin katsottavaksi.
- Suoran Odyssey-videon katsominen – käyttäjä voi seurata Odyssey-toimenpidettä etänä reaaliaikaisesti.
- Arkistoidun videon katsominen – käyttäjä voi katsoa aiemmin tallennettua (arkistoitua) Odyssey-videota.

Suoraa videota voi katsoa

- paikan päällä tai etänä
- tavallisella tietokoneella ja Odyssey Cinema Client -ohjelmalla, jonka käyttöohjeet kerrotaan tässä oppaassa.

Odyssey Cinema Client

Odyssey Cinema™ Clientin avulla lääkärit voivat tallentaa omia Odyssey-toimenpiteitään ja katsoa niitä myöhemmin, seurata toisten lääkäreiden tekemiä Odyssey-toimenpiteitä suorana ja katsoa suoria Odyssey-toimenpiteitä etänä omassa sairaalassaan.

Cinema Clientilla voit

- seurata laboratoriossa tehtävää toimenpidettä
- seurata yhteistyöverkoston kuuluvien lääkäreiden ja sairaaloiden toimenpiteitä
- katsoa aiemmin tehtyjä toimenpiteitä
- avustaa apulaislääkäreiden koulutuksessa antamalla heidän seurata useiden eri toimenpidehuoneitten tapauksia samalla, kun he ovat mukana yhdessä toimenpiteessä
- koostaa arkistoiduista tapauksista koulutusvideon.

Tekniset tiedot

Odyssey Cinema Clientin selaimen tulee olla Internet Explorer 7 tai uudempi. Muita selaimia ei tueta.











Tämä käyttöopas

Odyssey Cinema™ Clientin käyttöoppaassa kerrotaan, miten Odyssey Cinema Client -ohjelmaa (Cinema viewer) käytetään. Odyssey™ Workstationin käyttöoppaassa kerrotaan, miten Cineman tallennustoimintoa käytetään laboratoriossa.

Odyssey Cinema Clientin käyttöoppaassa *ei* kerrota, miten Odyssey Workstationia, Navigant™ Workstationia tai muita välineitä käytetään laboratoriossa.

Grafiikat ja symbolit

Symboli	Nimi	Kuvaus
---------	------	--------

Symboli	Nimi	Kuvaus
	Katso käyttöohjeet	Osoittaa, että käyttäjän on tarkistettava asia käyttöohjeista.
	Virta	Ilmaisee virran tilan.
	Vaihtovirta	Osoittaa arvokilvessä, että laite soveltuu käytettäväksi vain vaihtovirralla; osoittaa asiaankuuluvat liittimet.
	Tasavirta	Osoittaa arvokilvessä, että laite soveltuu käytettäväksi vain tasavirralla; osoittaa asiaankuuluvat liittimet.
	Valmistaja	Tuotteen valmistajan nimi ja osoite.
	Edustaja Euroopassa	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite Euroopan yhteisössä.
REF	Luettelonumero	Osoittaa valmistajan luettelonumeron, jonka perusteella lääkinnällinen laite voidaan yksilöidä.
	Maahantuoja	Osoittaa yrityksen, joka tuo lääkinnällisen laitteen maahan.
	Lääkinnällinen laite	Osoittaa, että kyseessä on lääkinnällinen laite.
	Var försiktig	Osoittaa, että käyttäjän on tarkistettava käyttöohjeista tärkeät varoittavat tiedot, kuten varoitukset ja varotoimet, joita ei voida eri syistä esittää itse lääkinnällisessä laitteessa.
	CE-merkki	Tuote on Euroopan unionin lääkintälaitedirektiivin 93/42/EEC mukainen ja täyttää asiaankuuluvat

Symboli	Nimi	Kuvaus
		terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Jos merkinnän yhteydessä on numero, vaatimustenmukaisuus on tarkistettu.
	Valmistuspäivämäärä	Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistuspäivämäärän.
	Vain lääkärin määräyksestä	Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain rajoitusten mukaan tätä laitetta saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
	Kierrätettävä: sähkölaite	Osoittaa, että kyseessä on sähkölaite, jonka kierrätykseen sovelletaan Euroopan unionin direktiiviä 2002/96/EC sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.
	Katso käyttöopas/ohjelehtinen	Osoittaa, että käyttöopas/ohjelehtinen on luettava.
	Sarjanumero	Osoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka perusteella tietty lääkinnällinen laite voidaan yksilöidä.
	Vastuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa	Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) asuva henkilö, joka toimii Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisen valmistajan puolesta Yhdistyneen kuningaskunnan säännösten mukaisesti valmistajan velvollisuuksiin liittyvissä asioissa.

Sanasto


Tässä asiakirjassa saatetaan käyttää seuraavia termejä:

Termi	Kuvaus
Navigant-navigointityöasema	Stereotaxisin Navigant-navigointityöasema on ohjelmistosovellusten tuotealusta, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan työntekoa. Se helpottaa katetrointi- ja elektrofysiologisten laboratorioden toimintojen yhdistämistä sekä parantaa lääkintälaitteiden magneettinavigoinnin automaatiota.
Niobe-magneettinavigointijärjestelmä	Stereotaxisin Niobe®-magneettinavigointijärjestelmän avulla lääkäri voi ohjata katetrin, ohjainlangan tai muun magneettisen lääkintälaitteen verisuonten sekä sydämen kammioiden kautta tarkasti hoidettavaan kohtaan.
Odyssey Cinema Client	Odyssey Cineman tavallisessa tietokoneessa toimiva selainohjelma, joka toimii Odyssey Cineman käyttäjien integroituna käyttöliittymänä.
Odyssey Network	Odyssey-järjestelmät yhdistävä yksityinen maailmanlaajuinen verkosto, joka mahdollistaa etäkatsomisen ja asiakastuen.
Odyssey Network Center	Kutsutaan myös ”puhelinpalvelukeskukseksi” (Call Center). Stereotaxisin toimitila, jossa asiakkaille asennettuja Odyssey-ohjelmia voidaan seurata ja hallita etänä. Odyssey Network Center tarjoaa asiakastukea, järjestää koulutusta sekä hallinnoi verkkoa.

Aloittaminen

Stereotaxisin edustaja tai joku työpaikkasi IT-osastolta on asentanut Odyssey Cinema Clientin koneeseesi ja luonut pikakuvakkeen työpöydälle. Jos näin ei ole, katso [Liite A: Asennus](#).


Käynnistä Cinema kaksoinapsauttamalla pikakuvaketta. Cinema avautuu Internet Exploreriin.

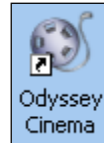

Kuva 1 – Odyssey Cineman pikakuvake

- ★ **Huomaa:** Odyssey Cinema Client on yhteensopiva vain Internet Explorer 7:n tai sitä uudemman version kanssa (muuta selaimia ei tueta).

Ohjelman latautuessa tietokoneen ruudulla näkyy pieni viestiruutu, jossa lukee "Painting application..." (Sovelluksen alustaminen)

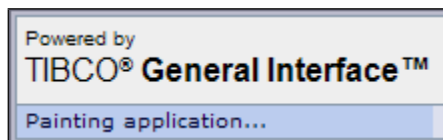

Kuva 2 – Sovelluksen alustaminen

Kirjautumisnäkyvät.


- ★ **Huomaa:** Selain kannattaa suurentaa, jotta kirjautumisikkuna näkyisi hyvin.

Login screen (Kirjautumisnäky)



Kuva 3 – Kirjautumisnäky

Kirjoita kirjautumisikkunan User Name -kenttään käyttäjätunnus ja Password-kenttään salasana, jotka sait ohjelman asentaneelta henkilöltä. Napsauta **Log in (Kirjautu)** -painiketta tai paina **Enter**.

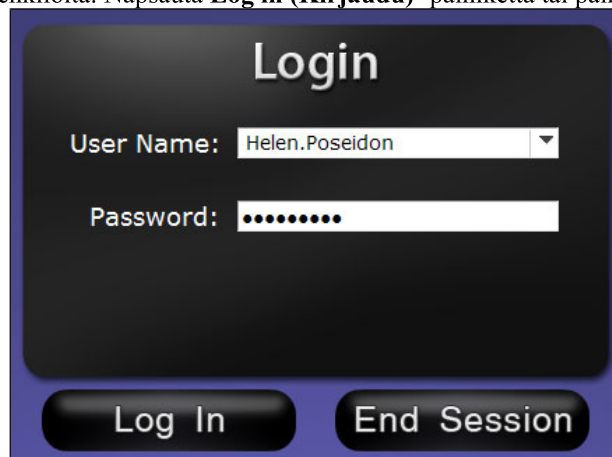

Kuva 4 – Kirjautumisikkuna

★ **Huomaa:** Jos kirjautumisikkunassa on Client Name -tekstikenttä, asennus ei ole valmis. Ota yhteyttä IT-tukeen saadaksesi Client Name -tunnuksen (katso [Liite A: Asennus](#)). Kun asennus on valmis, Client Name -kentän ei pitäisi myöhemmissä kirjautumisissa enää tulla näkyviin.

Päävalikko

Kirjaututtuasi ohjelmaan näkyviin tulee päävalikko, jossa on neljä vaihtoehtoa ja Log Off (Uloskirjautuminen) -painike.




Kuva 5 – Päävalikko, jossa kursori on Viewer-painikkeen päällä

Päävalikon neljä vaihtoehtoa:

- **Viewer (Katseluohjelma)** – tätä kautta pääsee katsomaan suoraa videota valitulta työasemalta.
- **Passport (Tiedotusohjelma)** – Odyssey Networkin käyttäjien uutissivusto.
- **Archiver (Arkisto-ohjelma)** – tätä kautta pääsee katsomaan valituilla työasemilla tallennettuja videoita.
- **Preferences (Omat asetukset)** – Viewerin ja Archiverin asetusten säätäminen.
- **Log Off (Uloskirjautuminen)** – Uloskirjautumisen jälkeen näkyviin tulee kirjautumisenäkymä.

Viewerin ikkuna

Kun valitset [päävalikosta](#) tai [navigointivalikosta](#) **Viewer**, näkyviin tulee Viewerin ikkuna, jossa on useita perusominaisuuksia.

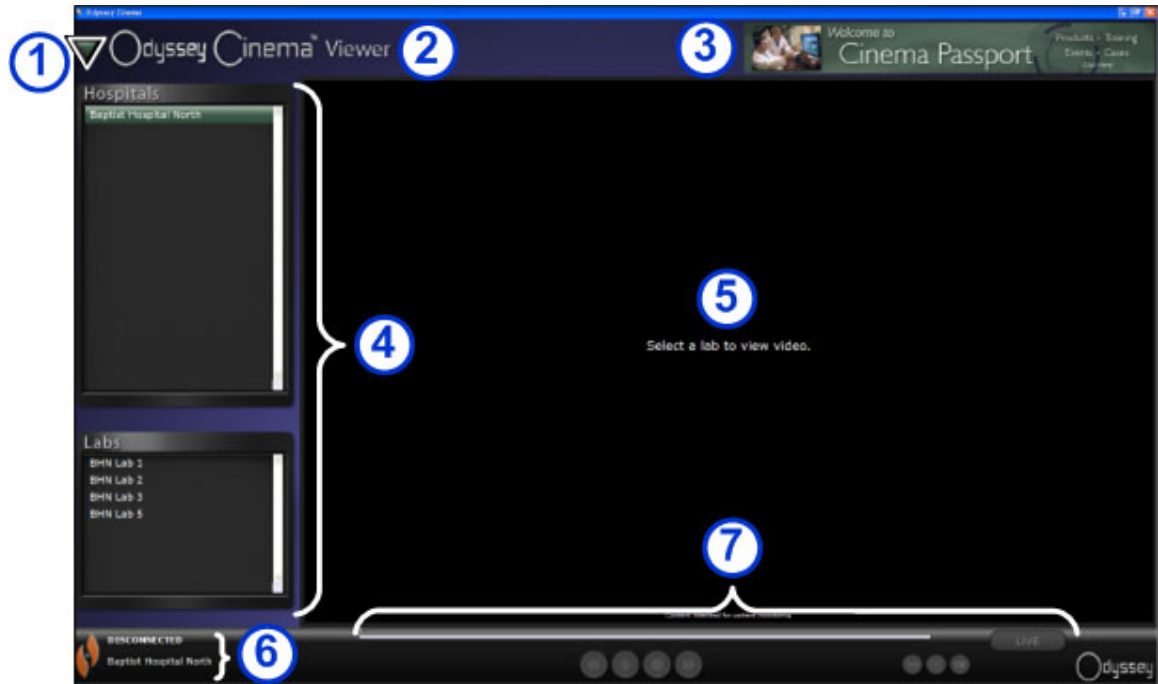

Kuva 6 – Viewerin ikkuna


Viewerin ikkunan opaste

- ① **Navigointipainike.** Kolmion muotoista vihreää painiketta napsauttamalla saat esiin [navigointitoiminnon pudotusvalikon](#) ja neljä pääikkunaa, päävalikon ja uloskirjautumisen. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ② **Ikkunan nimiö.** Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ③ **Cinema Passportin banneri.** Näyttää uutisia Odyssey Cineman käyttäjille. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ④ **Valintapaneelit:** Hospitals (Sairaalat) ja labs (laboratoriot). Valitse ensin sairaala ja sen jälkeen siellä sijaitseva laboratorio.
- ⑤ **Katselualue.** Valitsemasi laboratorion Odyssey-työasema näkyy tässä.
- ⑥ **Yhteyden tila sekä sairaalan ja laboratorion nimi.** Tässä paneelissa näkyvät valitun sairaalan nimi ja yhteyden tila, esimerkiksi Connected (Yhdistetty) tai Disconnected (Ei yhteyttä).
- ⑦ **Viewerin työkalurivi ja aikajana.** Tässä paneelissa ovat aikajana sekä työkalurivin painikkeet:
 - Siirry taaksepäin
 - Toisto/tauko (tilanvaihtopainike)
 - Pysäytys
 - Siirry eteenpäin
 - Yhden suhde yhteen -näyttö
 - Näyttötilan vaihto
 - Kuvakaappaus
 - Suora (tilapainike)

Navigointivalikko

Kun napsautat navigointipainiketta, näkyviin tulee navigointivalikko, jossa on kuusi vaihtoehtoa. Pääset haluamaasi toimintoon napsauttamalla sen nimeä.

- Viewer (Katseluohjelma) (ikkuna)
- Archiver (Arkisto-ohjelma) (ikkuna)
- Passport (Tiedotusohjelma) (ikkuna)
- Preferences (Omat asetukset) (ikkuna)
- Main menu (Päävalikko)
- Log off (Uloskirjautuminen)

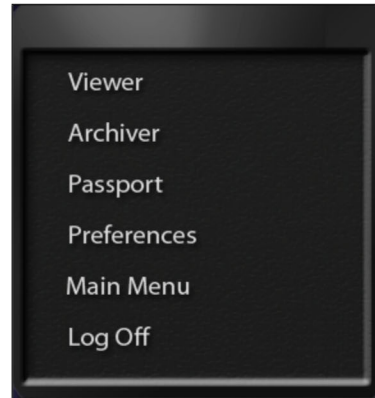

Kuva 7 – Navigointivalikko


★ **Huomaa:** Jos katsot videota kokoruutunäytössä, sinun on mentävä takaisin ikkunoituun näyttöön napsauttamalla Näyttötilan vaihtopainiketta Viewerin työkalurivissä, ennen kuin voit käyttää navigointipainiketta. Kuva 10 ja seuraava opaste esittelevät tarkemmin näitä näyttötiloja.



Kuva 8 – Näyttötilan vaihtopainike



Kuva 9 – Navigointipainike

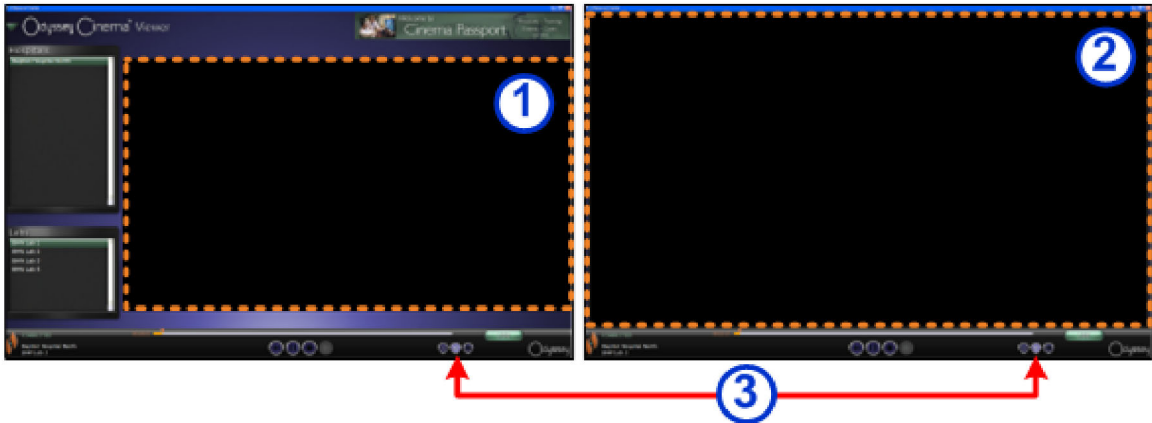


Kuva 10 – Ikkunoitu näyttö ja kokoruutunäyttö on merkitty oranssilla katkoviivalla. Näyttötila vaihdetaan näyttötilan vaihtopainikkeella (merkitty punaisella nuolella).

Viewerin näyttötilat

- ① **Ikkunoitu näyttö:** Ikkunoidussa näytössä katsomisalue on pienempi, koska banneri ja valintapaneelit ovat näkyvissä. Tämä on oletusnäkyvä.
- ② **Kokoruutunäyttö:** Katsomisalue on suurimmillaan.
- ③ **Näyttötilan vaihtopainike:** Työkalurivin toisen painikeryhmän keskimmäinen painike. Voit siirtyä yhdestä näyttötilasta toiseen tätä painiketta napsauttamalla.

Viewerin valintapaneelit

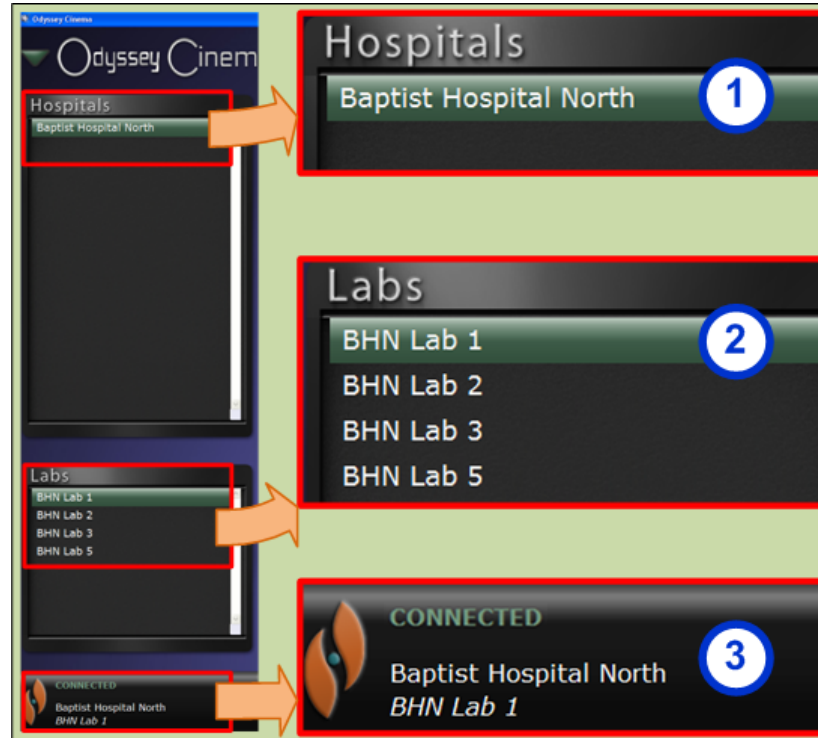

Kuva 11 – Viewerin valintapaneelit

Viewerin valintapaneelien opaste

- ① **Hospitals (Sairaalat).** Valitse sairaala (jos niitä on useampia kuin yksi. Oletussairaala on luettelossa ensimmäisenä.)
- ② **Labs (Laboratoriot).** Valitse sairaalan laboratorio.
- ③ **Yhteyden tila sekä sairaalan ja laboratorion nimi.**

Yhteyden tila: Tila on Disconnected (Ei yhteyttä), kunnes laboratorio on valittu. Kun olet valinnut laboratorion, seuraavat ilmoitukset tai jotkin niistä voivat tulla näkyviin peräkkäin.

- Disconnected (Ei yhteyttä) – laboratorioon ei ole yhteyttä.
- Authorizing (Valtuuttaa) – tämä tila näkyy vain käyttäjille, jotka tarvitsevat luvan saadakseen yhteyden laboratorioon. Odyssey-laboratoriossa oleva käyttäjä näkee, että pyydät valtuutusta.
- Connecting (Yhteyttä muodostetaan) – yhteyttä laboratorioon muodostetaan.
- Connected (Yhdistetty) – yhteys laboratorioon on muodostettu.
- Denied (Kielletty) – tämä tila näkyy vain käyttäjille, jotka tarvitsevat luvan saadakseen yhteyden laboratorioon. Odyssey-laboratoriossa oleva käyttäjä ei ole antanut lupaa muodostaa yhteyttä.
- Disconnecting (Yhteys katkaistaan) – yhteys laboratorioon katkaistaan. Yhteytesi Odyssey Cinema Clientiin tai Odyssey-laboratorioon voidaan katkaista. (Kun haluat itse katkaista yhteyden, napsauta pysäytyspainiketta.)

Sairaalan ja laboratorion nimi: Kun yhteys on muodostettu, sairaalan ja laboratorion nimi näkyvät tilaviestin alla.


Viewerin työkalurivi

Painikkeet näkyvät Viewerin työkalurivissä sen mukaan kuin niitä tarvitaan. Seuraavat painikkeet esimerkiksi eivät ole käytettävissä, ennen kuin olet valinnut laboratorion:



Kuva 12 – Painikkeita, jotka eivät ole käytettävissä



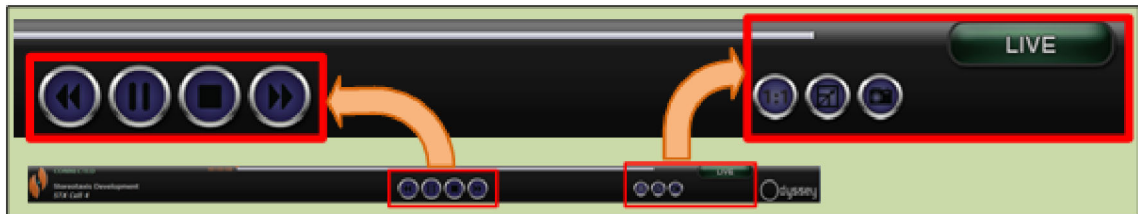

Kun yhteys on muodostettu, jotkin painikkeet tulevat näkyviin (Siirry eteenpäin -painike tulee näkyviin, kun napsautat Siirry taaksepäin -painiketta tai taukopainiketta):



Kuva 13 – Painikkeita, jotka ovat käytettävissä

Viewerin painikkeet

Painike		Kuvaus
	Siirry taaksepäin	Siirtää videota taaksepäin Preferences (Omat asetukset) - ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.
	Tauko/toisto	Tämän painikkeen avulla voi vaihdella tauon ja toiston välillä.
	Pysäytys ja yhteyden katkaisu	Pysäyttää videovirran. Ruudulle ilmestyy kehote, jossa lukee: "Video will no longer be available. (Video ei ole enää käytettävissä.) Continue?" (Jatketaanko?) Vastausvaihtoehdot ovat OK ja Cancel (Peruuta) . Jos napsautat OK , et voi enää katsoa suoraa videolähetystä. Yhteyden tilasta kertovaan kenttään tulee teksti Disconnected (Ei yhteyttä).
	Siirry eteenpäin	Siirtää videota eteenpäin Preferences (Omat asetukset) - ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.
	Live (Suora)	<ul style="list-style-type: none"> Kun painike on kirkkaan vihreä, katsot toimenpidettä suorana. Kun painike on tummanvihreä, yhteys on luotu, mutta et katso suoraa videota. Tummanvihreää painiketta napsauttamalla pääset katsomaan suoraa videokuvaa. Kun painike on musta, yhteyttä ei ole.


Painike		Kuvaus
	Yhden suhde yhteen -näyttö	Videokuvan pikseliresoluutio on 1:1 eli sama kuin Odyssey-laboratoriossa. (Katso Kuva 15.)
	Kokoruutunäyttö	Laajentaa videokuvan koko ruudun kokoiseksi, jolloin yläkehys ja navigointipainike eivät enää näy. Kun napsautat painiketta uudelleen, yläkehys ja navigointipainike tulevat näkyviin. (Katso Kuva 16.)
	Yhden suhde yhteen -näyttö ja kokoruutunäyttö	Yhdistää yhden suhde yhteen -näytön ja kokoruutunäytön. Tässä tilassa katselualue on suurimmillaan. (Katso Kuva 17.)
	Kuvakaappaus	Ottaa kuvan nykyisestä näkymästä. Ruudulle avautuu Windowsin "Save As" (Tallenna nimellä) -valintaikkuna, jotta voit valita hakemiston, jonne tallennat kaapatun kuvan.

Erilaiset näytöt


Viewer avautuu oletusasetuksena olevaan perusnäkympään. Erilaiset näytöt – Yhden suhde **yhteen -näyttö**, Kokoruutunäyttö sekä Yhden suhde yhteen -näyttö ja kokoruutunäyttö, esitellään vastaavan painikkeen yhteydessä kohdassa Viewerin painikkeet.



Kuva 14 – Oletusnäyttö

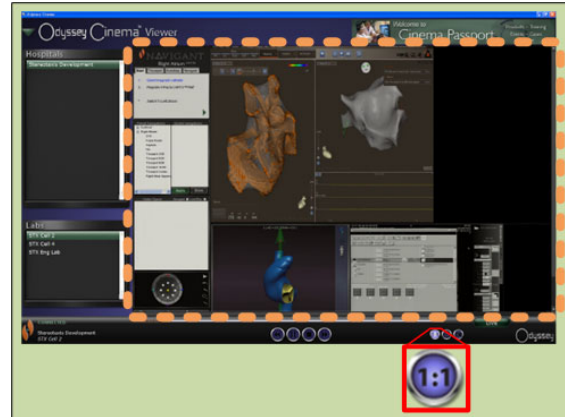

Kuva 15 – Yhden suhde yhteen (1:1) -näyttö

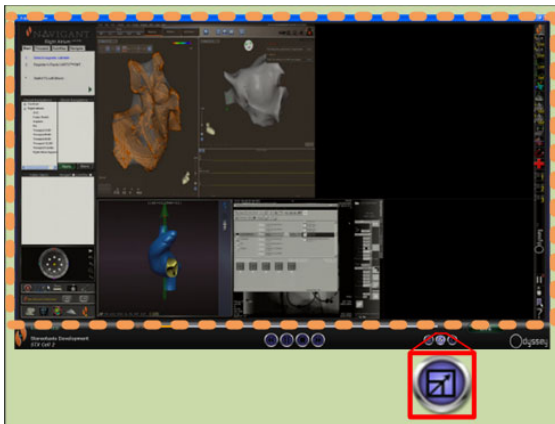

Kuva 16 – Kokoruutunäyttö



Kuva 17 – Yhden suhde yhteen -näyttö ja kokoruutunäyttö

Viewerin aikajana

Viewerin aikajana näyttää, kuinka kauan suoraa videota on näytetty. Kulunut aika näytetään tunteina, minuutteina ja sekunteina (TT:MM:SS). Oranssi osoitin näyttää, missä kohdassa suoraa videota katsoja on parhaillaan, oranssi palkki puolestaan näyttää nauhoituksen koko keston. Viewer tallentaa suorat toimenpiteet väliaikaiseen tallennuspaikkaan, joten voit katsella nauhoitettuja osuuksia samalla, kun jatkat tallentamista. Toiminto on hyvin samanlainen kuin television digitaalisissa tallentimissa (DVR, PVR).



Kuva 18 – Viewerin aikajana – suora videokuva



Kuva 19 – Viewerin aikajana – väliaikaisen videotallenteen katsominen

Välialikaista tallennetta pääset katsomaan vetämällä oranssin osoittimen vasemmalle siihen kohtaan janaa, josta haluat aloittaa katsomisen, tai napsauttamalla Siirry taaksepäin -painiketta. Kun vapautat osoittimen tai napsautat Siirry taaksepäin -painiketta, tallennettua videota aletaan näyttää heti valitusta ajankohdasta alkaen. Kun [Live \(Suora\)](#)- painike muuttuu tummanvihreäksi, katsot väliaikaisesti tallennettua videota. Pääset takaisin suoraan toimenpiteeseen Live-painiketta napsauttamalla. Painike muuttuu kirkkaan vihreäksi, kun katsot taas suoraa toimenpidettä.

Aika, jonka verran video siirtyy eteen- tai taaksepäin vastaavaa painiketta painettaessa, säädetään Preferences (Omat asetukset) -ikkunan kohdassa Application Settings (Sovelluksen asetukset). Jos video asetetaan siirtymään yhdellä painalluksella alle 60 sekuntia, oranssin osoittimen liikkuminen ei ehkä näy. Ajan kuluminen näkyy kuitenkin laskimesta (TT:MM:SS).

Aikajana kattaa pisimmillään tilapäistallenteen edeltävät neljä tuntia. Jos tallennus kestää yli neljä tuntia, aikajana alkaa poistaa pätkiä tallenteen alkupäästä järjestääkseen tilaa ylimääräiselle tallenteelle.



Kuva 20 – Esimerkkejä aikajanan pituuden ylittävistä tallenteista

Kuva 20 havainnollistaa asiaa:

- Ensimmäisessä aikajanasssa Viewer on tallentanut 4 tuntia videokuvaa. Käyttäjä voi katsoa kaikki neljä tuntia.
- Toisessa aikajanasssa Viewer on tallentanut 4 tuntia ja 45 minuuttia. Viewer on poistanut videon alkupäästä ensimmäiset 45 minuuttia. Käyttäjä voi katsella vain tallenteen 4 viimeistä tuntia.
- Kolmannessa aikajanasssa Viewer on tallentanut 6 tuntia, 23 minuuttia ja 18 sekuntia. Viewer on poistanut videon ensimmäiset 2 tuntia, 23 minuuttia ja 18 sekuntia. Käyttäjä voi katsella vain tallenteen 4 viimeistä tuntia.

Archiverin ikkuna

Kun valitset [Päävalikossa](#) tai [Navigointivalikossa](#) Archiverin, näkyviin tulee ikkuna, jossa on useita perusominaisuuksia:




Kuva 21 – Archiverin ikkuna

Archiverin ikkunan opaste

- ① **Navigointipainike.** Kolmion muotoista vihreää painiketta napsauttamalla saat esiin [navigointitoiminnon pudotusvalikon](#) ja neljä pääikkunaa, päävalikon ja uloskirjautumisen. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ② **Ikkunan nimiö.** Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ③ **Cinema Passportin banneri.** Näyttää uutisia Odyssey Cineman käyttäjille. Kun napsautat tätä, esiin tulee Cinema Passportin ikkuna. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ④ **Valintapaneelit:** Archivers (sairaala, jossa toimenpide on tallennettu) ja Procedures (toimenpiteet). Valitse sairaala ja tallennettu toimenpide.
- ⑤ **Katselualue.** Valitsemasi tallennettu toimenpide näkyy tässä.
- ⑥ **Tietoja toimenpiteestä.** Tässä paneelissa näkyy toimenpidettä koskevia tietoja, kuten sairaala, laboratorio, lääkäri ja potilas.
- ⑦ **Yhteyden tila, Archiverin työkalurivi ja aikajana.** Tässä paneelissa ovat yhteyden tila, työkalurivin painikkeet ja aikajana:
 - Yhteyden tila
 - Muokkaa toimenpidetietoja
 - Lisää kirjanmerkki
 - Muokkaa kirjanmerkkiä
 - Poista kirjanmerkki
 - Siirry taaksepäin
 - Toisto/tauko (tilanvaihto)
 - Pysäytys
 - Siirry eteenpäin
 - Yhden suhde yhteen -näyttö
 - Näyttötilan vaihto
 - Kuvakaappaus
 - Arkistointitilaviesti


Archiverin valintapaneelit

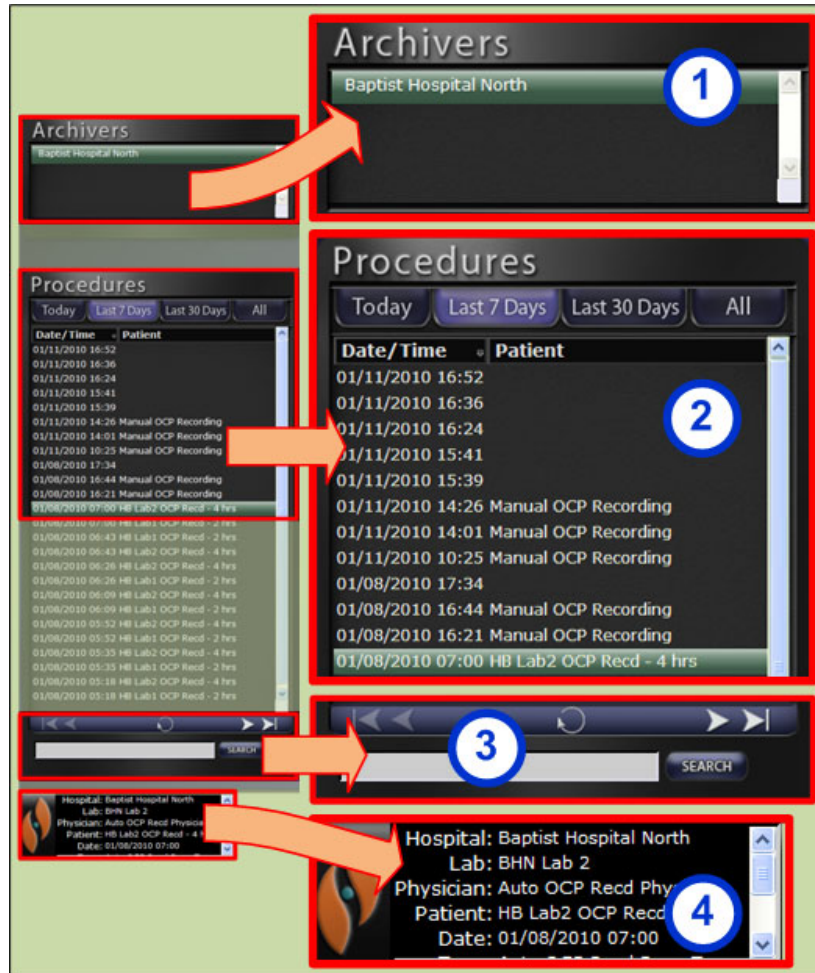

Kuva 22 – Archiverin valintapaneelit


Archiverin valintapaneelien opaste

- ① **Archivers (Sairaalat).** Valitse sairaala (jos niitä on useampia kuin yksi. Oletussairaala on luettelon ensimmäinen.)
- ② **Procedures (Toimenpiteet).** Toimenpiteiden lajitteluperusteita ovat Today (Tämä päivä), Last 7 Days (Edelliset 7 päivää), Last 30 Days (Edelliset 30 päivää) ja All (Kaikki). Oletusarvo Last 7 Days (Edelliset 7 päivää). Jonkin toisen lajitteluperusteen mukaisen luettelon saat esiin napsauttamalla lajitteluperustepainiketta. Mitä pitempi luettelo, sitä kauemmin sen lataaminen kestää.

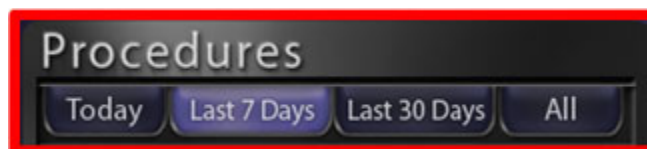

Kuva 23 – Lajitteluperustepainikkeet


Kun pidät kursoria toimenpiteen kohdalla, sitä koskevat tiedot näkyvät ponnahdusikkunassa.

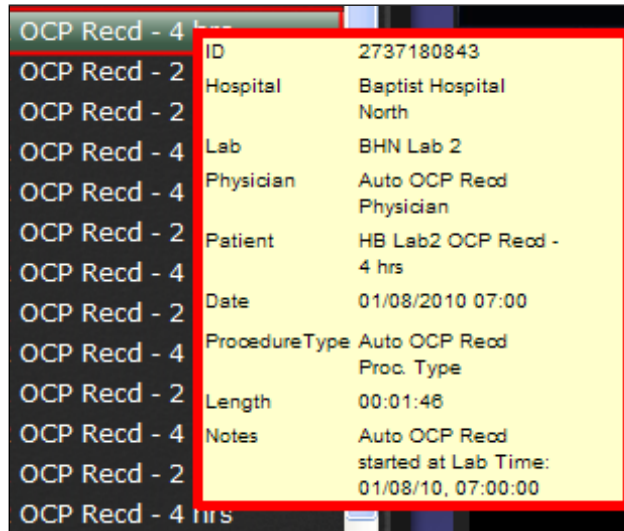

Kuva 24 – Toimenpidetiedot tulevat esiin, kun siirrät kursorin luettelossa olevan toimenpiteen päälle.

Kun olet valinnut toimenpiteen, tallenne näytetään oikealla olevassa katselualueessa.


- ③ **Toimenpideluettelon ohjauspaneeli.** Ohjauspaneelissa on neljä navigointipainiketta, päivityspainike ja hakukenttä.

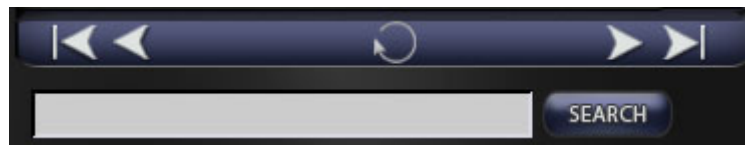

Kuva 25 – Toimenpideluettelon ohjauspaneeli


Ohjauspaneelin painikkeet

Painike	Nimi	Kuvaus
	Ensimmäinen sivu	Tätä painiketta napsauttamalla pääset valitun toimenpideluettelon alkuun.
	Edellinen sivu	Edellinen sivu -painiketta painamalla pääset luettelon edelliselle sivulle. Ensimmäinen sivu – ja Edellinen sivu -painikkeet eivät näy toimenpideluettelon ensimmäisellä sivulla.
	Seuraava sivu	Seuraava sivu -painiketta painamalla pääset luettelon seuraavalle sivulle.
	Viimeinen sivu	Viimeinen sivu -painiketta napsauttamalla pääset valitun toimenpideluettelon loppuun. Seuraava sivu – ja Viimeinen sivu -painikkeet eivät näy toimenpideluettelon viimeisellä sivulla.
	Päivitys	Päivityspainiketta napsauttamalla saat päivitettyä toimenpideluettelon, jolloin edellisen kirjautumisen jälkeen luodut

Painike	Nimi	Kuvaus
		toimenpiteet tulevat näkyviin.
	Search (Haku)	Kun haluat etsiä tiettyä toimenpidettä, kirjoita sen tunnistetiedot hakukenttään. Napsauta Search (Haku) . Hakukenttä tunnistaa isot ja pienet kirjaimet. Päivämäärää tai tallenteen kesto ei voi käyttää hakuuehtona. Hakutulokset saat poistettua napsauttamalla mitä tahansa paneelin yläosassa olevaa painiketta.

④ **Toimenpidetiedot.** Tietopaneelia voi vierittää. Paneelissa näytettävät tiedot:

- Hospital (Sairaalan nimi)
- Lab (Laboratorion tunnus)
- Physician (Lääkärin nimi)
- Patient (Potilaan nimi)
- Date (Toimenpiteen päivämäärä)
- Type (Toimenpide)
- Notes (Toimenpidettä koskevat merkinnät)

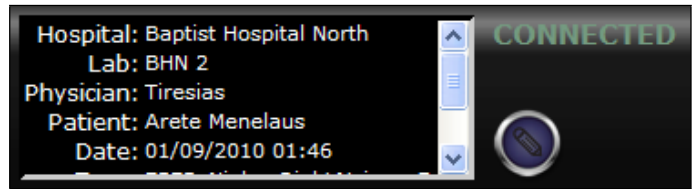


Kuva 26 – Toimenpidetiedot ja Muokkaa toimenpidetietoja -painike

Voit myös muokata toimenpidettä koskevia tietoja.

1. Napsauta Muokkaa toimenpidetietoja -painiketta (Kuva 27). Edit Procedure Info (Muokkaa toimenpidetietoja) -paneeli tulee näkyviin.
2. Muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
3. Napsauta **Save (Tallenna)**, kun haluat sulkea paneelin ja tallentaa muutokset. Napsauta **Cancel (Peruuta)**, kun haluat sulkea paneelin muutoksia tallentamatta.

Kuva 27 – Toimenpidetietojen muokauspaneeli ja-painike

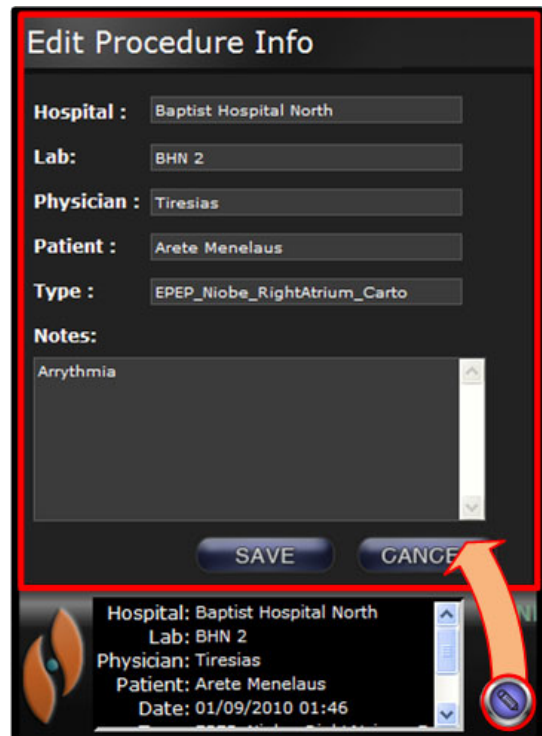

Archiverin työkalurivi

Painikkeet näkyvät Archiverin työkalurivissä sen mukaan kuin niitä tarvitaan. Kun esimerkiksi yhteyttä ollaan luomassa, vain kolme painiketta on käytettävissä: Muokkaa toimenpidetietoja, Seis ja Näyttötilan vaihto.



Kuva 28 – Archiverin työkalurivi yhteyttä luotaessa: kolme painiketta on käytettävissä


Kun napsautat Toista-painiketta, yhteys luodaan ja toisto aloitetaan. Yhteyden tilasta kertova teksti CONNECTED (YHDISTETTY) muuttuu vihreäksi, ja kaikki muut painikkeet paitsi Muokkaa kirjanmerkkiä ja Poista kirjanmerkki ovat käytössä. Kun valitset kirjanmerkin, kirjanmerkkipainikkeita voi käyttää.



Kuva 29 – Archiverin työkalurivi, kun yhteys on luotu: suurin osa painikkeista on käytettävissä

Archiverin ilmaisimet

Kun yhteys on luotu (toistettavaan) tallenteeseen, työkalurivin yläpuolella näkyy viisi erilaista ilmaisinta.

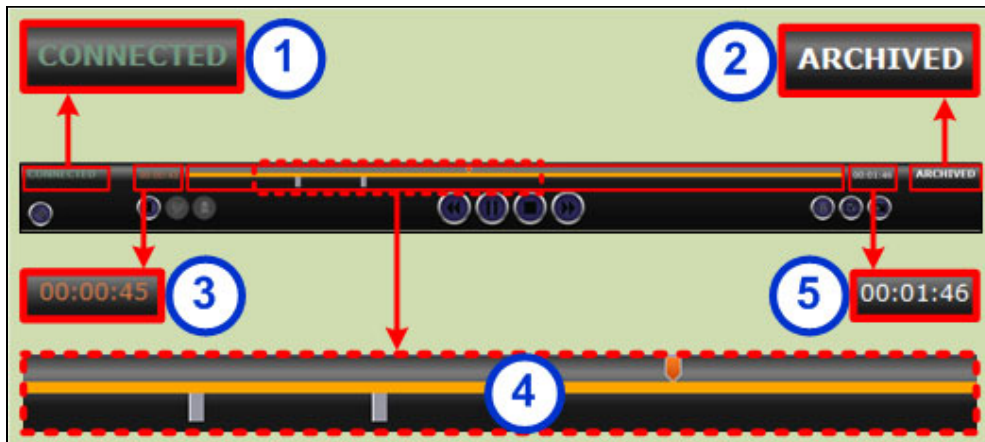




Kuva 30 – Archiverin työkalurivin yläpuolella olevat ilmaisimet

Archiverin ilmaisimien opaste

- ① **Yhteyden tila.** Yhteys voi olla: Disconnected (Ei yhteyttä), Connecting (Yhteyttä muodostetaan), Connected (Yhdistetty) tai Disconnecting (Yhteys katkaistaan).
- ② **Archived (Arkistoitu).** Toimenpide on tallennettu.
- ③ **Kulunut aika.** Aika, joka on kulunut siitä, kun videota alettiin toistaa (tunteina, minuutteina ja sekunteina).
- ④ **Aikajana.** Alue, jossa videon etenemisestä kertova oranssi osoitin liikkuu ja jossa voidaan luoda harmaita kirjanmerkkejä sekä päästä katsomaan niitä.
- ⑤ **Kokonaisaika.** Tallenteen kokonaisaika tunteina, minuutteina ja sekunteina.

Archiverin painikkeet

Painike	Nimi	Kuvaus
	Muokkaa toimenpidetietoja	Avaa tekstieditorin näytön vasempaan alakulmaan, toimenpidetietojen <i>yläpuolelle</i> . Kaikkia Edit Procedure Info (Muokkaa toimenpidetietoja) -ikkunan tekstikenttiä on mahdollista muokata.
	Lisää kirjanmerkki	Lisää kirjanmerkin katsomaasi videoon, joten voit myöhemmin palata samaan kohtaan uudelleen. Esiin tulee tekstikenttä, johon voit kirjoittaa kirjanmerkkiä koskevia merkintöjä. Kirjanmerkin ajankohta määräytyy silloin, kun napsautat Lisää kirjanmerkki -painiketta. Ajankohta tallennetaan yhtä aikaa kuin kirjanmerkin teksti.
	Muokkaa kirjanmerkkiä	Kun napsautat videon aikajanassa olevaa kirjanmerkkiä, Muokkaa kirjanmerkkiä – ja Poista kirjanmerkki -painikkeet aktivoituvat. Kun napsautat Muokkaa kirjanmerkkiä -painiketta, valitun kirjanmerkin kuvaus tulee näkyviin, ja voit muokata tekstiä.
	Poista kirjanmerkki	Kun napsautat videon aikajanassa olevaa kirjanmerkkiä, Muokkaa kirjanmerkkiä – ja Poista kirjanmerkki -painikkeet aktivoituvat. Kun napsautat Poista kirjanmerkki -painiketta, valittu kirjanmerkki poistetaan.
	Siirry taaksepäin	Siirtää videota taaksepäin Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.
	Tauko/toisto	Tämä painike on taukotilassa, kun videota toistetaan, ja toistotilassa, kun video on keskeytetty. Selitys: Kun katsot videota, voit keskeyttää videon tätä painiketta painamalla, ja kun video on keskeytetty, voit jatkaa katsomista samaa painiketta painamalla).
	Pysäytys	Pysäyttää videon.
	Siirry eteenpäin	Siirtää videota eteenpäin Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.
	Archived (Arkistoitu).	Ilmaisee, että katselet aiemmin tallennettua ja arkistoitua toimenpidettä.


Painike	Nimi	Kuvaus
	Yhden suhde yhteen -näyttö	Videokuvan pikseliresoluutio on 1:1 eli sama kuin Odyssey-laboratoriossa.
	Näyttötilan vaihto	Laajentaa videokuvan koko ruudun kokoiseksi, jolloin yläkehys (ja navigointipainike) eivät enää näy. Kun napsautat painiketta uudelleen, yläkehys ja navigointipainike tulevat näkyviin.
	Kuvakaappaus	Otaa kuvan nykyisestä näkymästä. Ruudulle avautuu Windowsin "Save As" (Tallenna nimellä) -valintaikkuna, jotta voit valita hakemiston, minne tallennat kaapatun kuvan.

Archiverin aikajana

Archiverin aikajana näyttää, kuinka kauan videota on tallennettu. Kulunut aika näytetään tunteina, minuutteina ja sekunteina (TT:MM:SS). Oranssi osoitin näyttää kuluneen ajan, oranssi palkki puolestaan näyttää tallenteen koko keston.



Kuva 31 – Archiverin aikajana – vasen pää

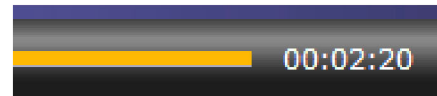

Kuva 32 – Archiverin aikajana – oikea pää

Kun haluat katsoa tallennetta, vedä oranssi osoitin siihen kohtaan janaa, josta haluat aloittaa katsomisen, tai napsauta Siirry taaksepäin -painiketta. Kun vapautat osoittimen tai napsautat Siirry taaksepäin -painiketta, tallennettua videota aletaan näyttää heti valitusta ajankohdasta alkaen.

Aika, jonka verran video siirtyy eteen- tai taaksepäin vastaavaa painiketta painettaessa, säädetään [Preferences \(Omat asetukset\) -ikkunassa](#). Jos video asetetaan siirtymään yhdellä painalluksella alle 60 sekuntia, oranssin osoittimen liikkuminen ei ehkä näy. Ajan kulumisen näkee kuitenkin laskimesta (TT:MM:SS).

★ Huomaa: Kun tallenne on toistettu loppuun asti, Archiver lopettaa toiston automaattisesti ja katkaisee yhteyden. Kun napsautat Toista-painiketta, yhteys luodaan ja toisto aloitetaan uudelleen.

Kirjanmerkit

Kirjanmerkit ovat oikoteitä tallenteen aiempiin kohtiin. Odyssey Workstationin käyttäjä voi lisätä kirjanmerkkejä toimenpidettä tallentaessaan, ja Odyssey Cinema Clientin käyttäjä voi lisätä niitä katsellessaan arkistoituja tallenteita. Odyssey Cinema Clientin käyttäjät eivät kuitenkaan voi lisätä kirjanmerkkejä suoraan toimenpidettä katsoessaan.

Kirjanmerkin lisääminen


Voit lisätä kirjanmerkin napsauttamalla Lisää kirjanmerkki -painiketta, kun videota toistetaan tai toisto on keskeytetty. Kirjanmerkin ajankohta määräytyy silloin, kun napsautat Lisää kirjanmerkki -painiketta, ei silloin, kun kirjoitat kirjanmerkin kuvauksen ja napsautat **Save (Tallenna)**. (Kirjanmerkki tulee kuitenkin näkyviin *vasta* silloin, kun napsautat **Save (Tallenna)**).



Kuva 33 – Lisää kirjanmerkki -painike




Kuva 34 – Kirjanmerkin kuvaus

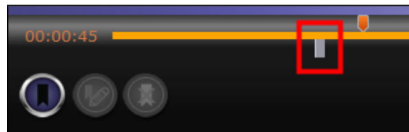

Kuva 35 – Uusi kirjanmerkki

Kirjanmerkin katsominen

Kun haluat tarkastella kirjanmerkkiä, pane kursori kirjanmerkin päälle. Kirjanmerkin kuvaus näkyy ponnahdusikkunassa. Kun napsautat kirjanmerkkiä, se muuttuu vihreäksi, oranssi osoitin siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja tallennetta aletaan toistaa kirjanmerkin kohdasta. Toisto voi alkaa useitakin sekunteja ennen sitä ajankohtaa, jota kirjanmerkki osoittaa aikajanassa.

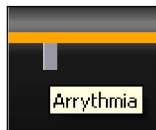

Kuva 36 – Kursori kirjanmerkin päällä



Kuva 37 – Valittu kirjanmerkki (jota on napsautettu)

Kirjanmerkin muokkaaminen

Kun haluat muokata kirjanmerkkiä, napsauta ensin kirjanmerkkiä ja sen jälkeen Muokkaa kirjanmerkkiä -painiketta. Bookmark Description (Kirjanmerkin kuvaus)-kenttä tulee näkyviin. Muokkaa tekstiä ja napsauta **Save (Tallenna)**.



Bookmark Description: Arrythmia 1

Kuva 38 – Muokkaa kirjanmerkkiä -painike ja kirjanmerkin kuvaus

Kirjanmerkin poistaminen


Kun haluat poistaa kirjanmerkin, napsauta ensin kirjanmerkkiä ja sen jälkeen Poista kirjanmerkki -painiketta. Kirjanmerkki poistetaan.



Kuva 39 – Poista kirjanmerkki -painike

Preferences (Omat asetukset) -ikkuna

Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa voit säätää Viewerin ja Archiverin ominaisuuksia. Valitsemasi asetukset pysyvät kaikissa tulevilla Viewer- ja Archiver-istunnoissa, kunnes muutat niitä.

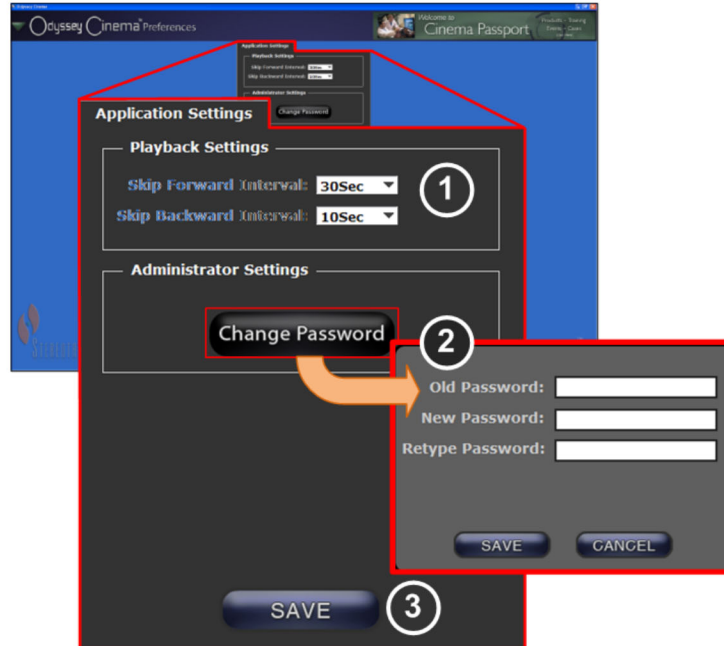

Kuva 40 – Omat asetukset -ikkuna ja sovelluksen asetukset

Preferences (Omat asetukset) ja Application Settings (Sovelluksen asetukset) -ikkunan opaste

① **Playback Settings (Toiston asetukset).** Voit säätää Odyssey Cinemalla tallennettavien videoiden asetuksia. Asetuksilla vaikutetaan Siirry eteenpäin – ja Siirry taaksepäin -painikkeiden toimintaan Viewerissa ja Archiverissa.

- **Skip Forward Intervals (Eteenpäin siirtymisväli).** Voit valita, minkä verran video siirtyy kerralla eteenpäin, kun Siirry eteenpäin -painiketta painetaan. Napsauta kentän oikealla puolella olevaa nuolta, niin pääset valikkoon, jossa voit valita ajan. Oletus on 30 sekuntia; voit valita ajanjakson 1 sekunnin ja 1 tunnin väliltä.
- **Skip Backward Interval (Taaksepäin siirtymisväli).** Voit valita, minkä verran video siirtyy kerralla taaksepäin, kun Siirry taaksepäin -painiketta painetaan. Napsauta kentän oikealla puolella olevaa nuolta, niin pääset valikkoon, jossa voit valita ajan. Oletus on 10 sekuntia; voit valita ajanjakson 1 sekunnin ja 1 tunnin väliltä.



Kuva 41 – Siirry eteenpäin -painike



Kuva 42 – Siirry taaksepäin -painike

② **Change Password (Vaihda salasana).** Kun napsautat tätä painiketta, salasanaikkuna tulee näkyviin:

- **Old Password (Vanha salasana):** Kirjoita salasana, jota käytit kirjautuessasi meneillään olevaan istuntoon.
- **New Password (Uusi salasana):** Kirjoita uusi salasana. Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä, joista ainakin yhden on oltava iso kirjain, yhden pieni kirjain ja yhden numeerinen merkki.
- **Retype Password (Kirjoita salasana uudelleen):** Varmenna uusi salasana kirjoittamalla se uudelleen.
- **Save / Cancel (Tallenna/Peruuta):** **Save (Tallenna)** -painiketta painamalla tallennat muutokset ja valintaikkuna sulkeutuu. **Cancel (Peruuta)** -painiketta painamalla suljet ikkunan muutoksia tallentamatta.

③ **Save (Tallenna):** Tallentaa kaikki sovelluksen asetuksiin tehdyt muutokset ja sulkee valintaikkunan.

Passportin ikkuna

Passportissa on mielenkiintoisia erityisalan tietoja Odyssey Cineman käyttäjille.



Kuva 43 – Passportin ikkuna

Passportin ikkunan opaste

- ① **Ikkunan nimiö.** Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ② **Banneri.** Uutisia Odyssey Cineman käyttäjille. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ③ **Selain.** Yksityiskohtaisia tietoja Odyssey Cineman käyttäjille.

★ **Huomaa:** Passport tarjoaa tietoja Odyssey Networkista, sen kautta ei pääse Internetiin.

Log Off (Uloskirjautuminen)

Ohjelmasta voi kirjautua ulos päävalikon tai jokaisella sivulla olevan navigointivalikon kautta.



Kuva 44 – Navigointivalikko, jonka lopussa on Log Off (Uloskirjautuminen) -painike (oikealla) sekä päävalikko ja Log Off (Uloskirjautuminen) -painike

Liite A: Asennus


Jos asennat Odyssey Cinema Clientin itse (sen sijaan, että Stereotaxisin edustaja tai työpaikkasi IT-osasto huolehtisi ohjelman asennuksesta), noudata seuraavia vaiheita.



Tärkeää: Ota yhteyttä Stereotaxisin edustajaan, ennen kuin asennat Odyssey Cinema Clientin pöytäkoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. Edustaja antaa valtuutuksen ohjelman käyttöön Cinemassa ja varmistaa, että


- tietokone ja verkon yhteys ovat Odyssey Cineman vaatimusten mukaiset,
- asennus ei ylitä asemien määrälle asetettua ylärajaa.

1. Kirjautu tietokoneeseen pääkäyttäjän valtuuksin.
2. Pane Odyssey Cinema™-ohjelman CD koneen CD-asemaan.
3. Avaa Client Installer -asennuskansio.
4. Käynnistä Odyssey Cinema Client Setup.exe -asennusohjelma. Asennuksen aloitusikkuna avautuu.
5. Napsauta **Next (Seuraava)**, niin asennus jatkuu.

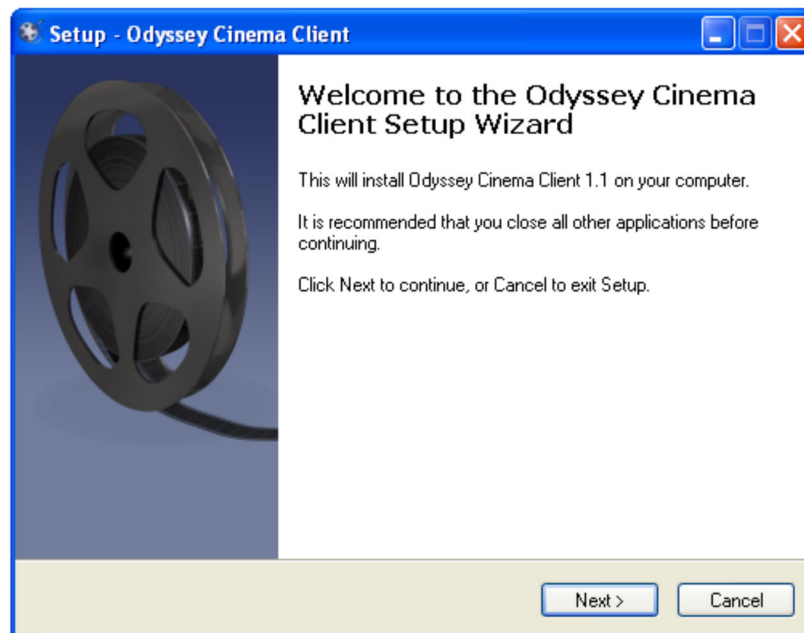


Kuva 45 – Asentaminen – ensimmäinen näkymä

6. Kirjoita Management Server IP Address -kenttään Odyssey Cinema Management -palvelimen IP-osoite ja Client Name -kenttään tietokoneelle annettu nimi. Ne saat Stereotaxisin edustajalta tai verkon ylläpitäjältä.
7. Napsauta **Next (Seuraava)**, niin asennus jatkuu.

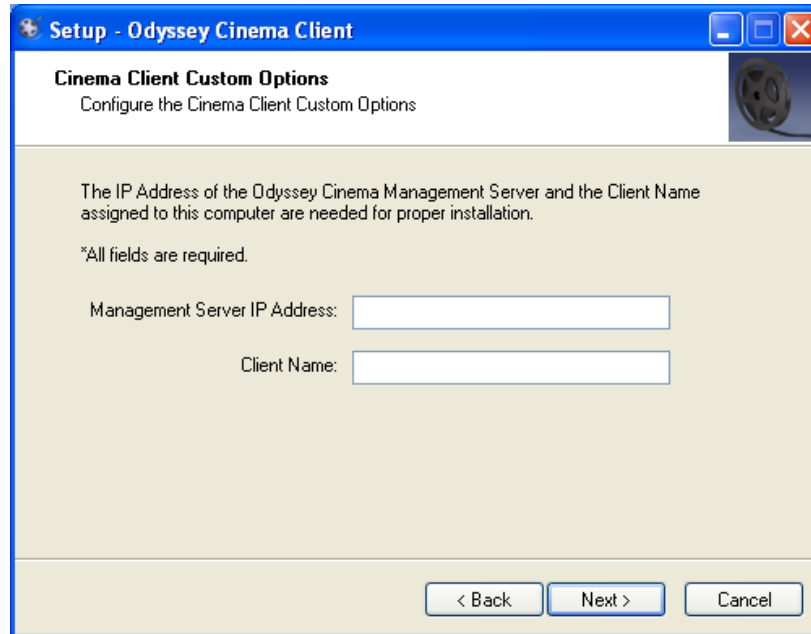


Kuva 46 – Asentaminen – mukautetut asetukset

8. Jos tietokoneeseesi ei ole asennettu Java Runtime Environmentia (JRE), näkyviin tulee ikkuna, jossa kerrotaan, että JRE asennetaan koneeseen. Jos JRE on jo asennettu, näkyviin tulee asennusikkuna.
9. Kun napsautat **Next (Seuraava)**, JRE:n asennus jatkuu.

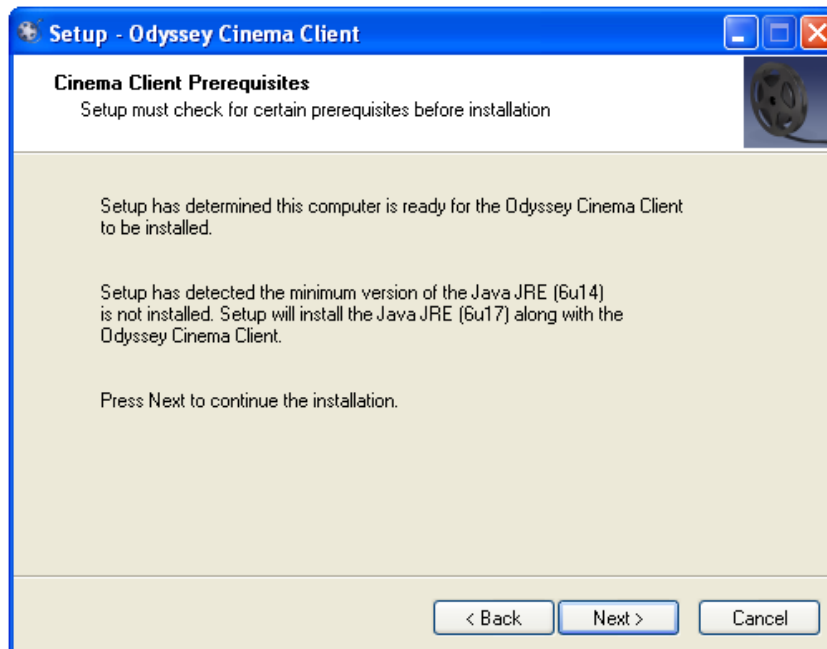


Kuva 47 – Asentaminen – edellytykset: Java Runtime Environment

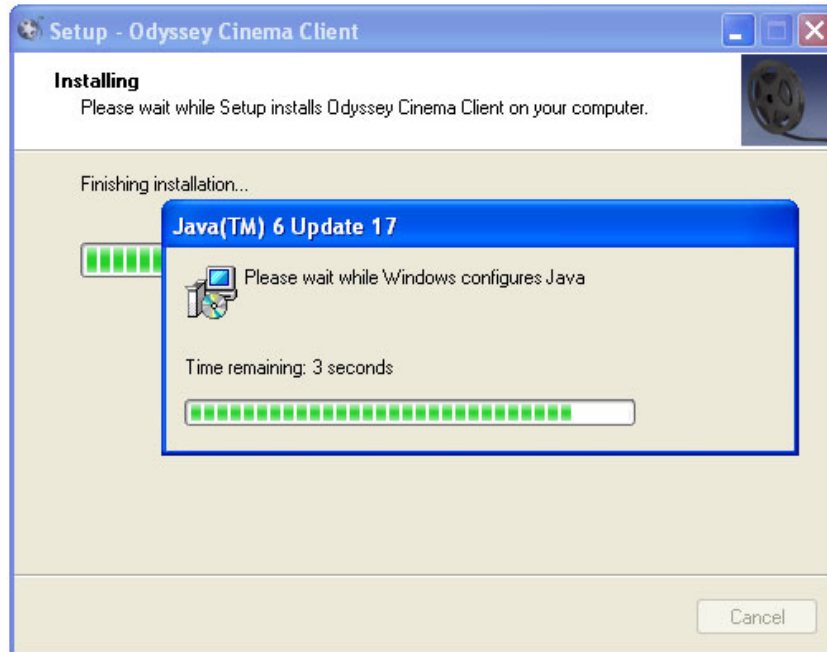

Kuva 48 – Asentaminen – asentaa

- Asennuksen valmistuttua näytölle tulee viesti "Completed the Odyssey Cinema Client Setup Wizard" (Odyssey Cinema Clientin ohjattu asennusohjelma on valmis). Napsauta **Finish (Lopeta)** niin asennusohjelma sulkeutuu ja Odyssey Cinema Client käynnistyy (Launch the Odyssey Cinema Client now (Käynnistä Odyssey Cinema Client nyt) -valintaruutu on valittu valmiiksi).

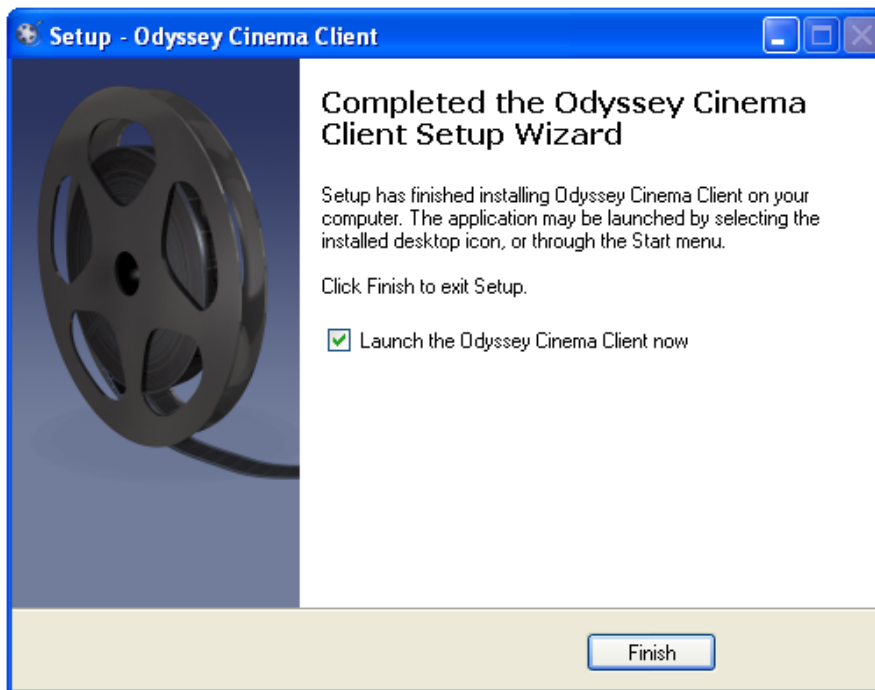

Kuva 49 – Asentaminen – asennus on valmis


- Odyssey Cinema Client on nyt asennettu. Käynnistä ohjelma.

12. Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, näyttöön saattaa avautua varoitusikkuna: "The application's digital signature cannot be verified." (Ohjelman digitaalista allekirjoitusta ei voida varmentaa.) Napsauta "Always trust content..." (Luota aina tämän julkaisijan sisältöön)-tekstin vasemmalla puolella olevaa valintaruutua, niin tätä varoitusta ei enää näytetä.



Kuva 50 – Asennusikkuna – ensimmäinen näkymä

13. Kun Client käynnistyy, kirjaudu ohjelmaan kirjoittamalla User Name -kenttään käyttäjätunnukseksi Password-kenttään salasanasasi ja Client Name -kenttään koneelle annettu nimi, niin varmistat, että asennus on onnistunut ja verkon yhteys toimii.
- ★ **Huomaa:** Ohjelmaan on kirjauduttava aina, kun se käynnistetään. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä on kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja tietokoneellesi annettu Client Name. Seuraavilla kerroilla tarvitsee kirjoittaa vain käyttäjätunnus ja salasana. Seuraavissa kuvissa ovat ensimmäinen kirjautumisikkuna ja tavallinen kirjautumisikkuna.

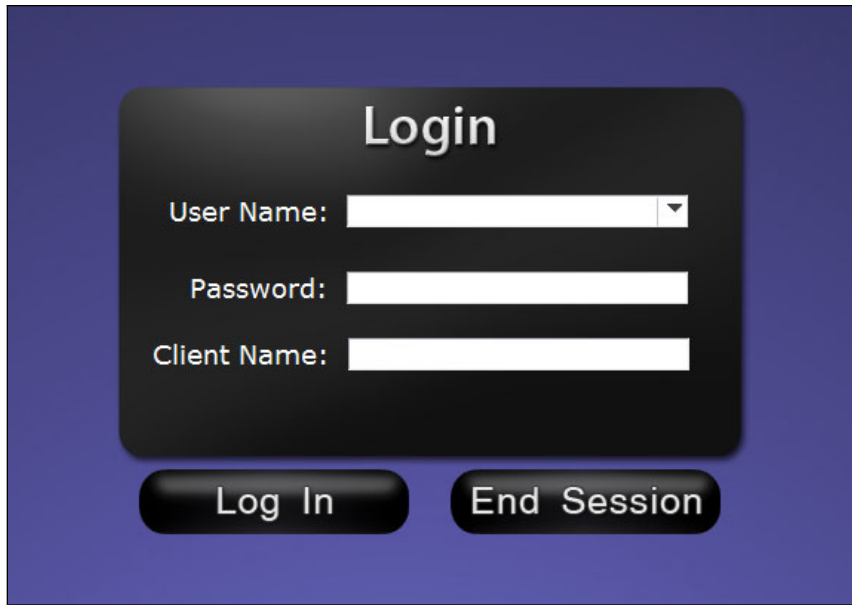

Kuva 51 – Ensimmäinen kirjautumisikkuna




Kuva 52 – Tavallinen kirjautumisikkuna

Asennuksen yhteydessä työpöydälle lisätään Odyssey Cineman pikakuvake. Pikakuvakkeen kautta Cinema käynnistyy oletuksena olevassa ikkunoidussa tilassa.



Kuva 53 – Työpöydällä näkyvä pikakuvake

Asennuksen jälkeen myös Windowsin aloitusvalikossa on kaksi pikakuvaketta. Niistä ensimmäisen kautta Odyssey Cinema avautuu ikkunoituna. Toisen kuvakkeen kautta ohjelma avautuu kokoruutunäyttöön.

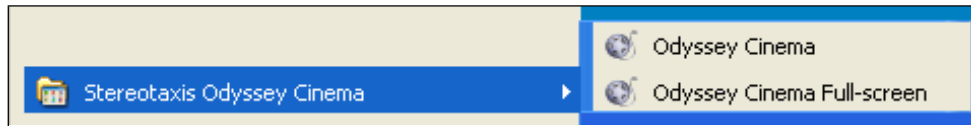

Kuva 54 – Aloitusvalikon pikakuvakkeet



Kuva 55 – Kirjautuminen ikkunoituun näyttöön



Kuva 56 – Kirjautuminen kokoruutunäyttöön

Hakemisto

Aloittaminen	8	Niobe-magneettinavigointijärjestelmä	
Aloitussvalikko	35	sanasto.....	7
Archiver		Odyssey Cinema	6
aikajana.....	24	Odyssey Cinema Client.....	6
ikkuna	18	sanasto.....	7
ikkunan opaste.....	18	Odyssey Network	
ilmaisimet	22	sanasto.....	7
ilmaisimien opaste.....	22	Odyssey Network Center	
painikkeet	23	sanasto.....	7
työkalurivi	22	Ohjauspaneelin painikkeet.....	20
valintapaneelien opaste	19	Ohjelman digitaalinen allekirjoitus	33
valintapaneelit	19	Omien asetusten opaste	26
Asennus.....	30	Päävalikko	10
Call Center.....	7	Passportin ikkuna	28
Change Password (Vaihda salasana).....	27	Passportin ikkunan opaste	28
Client Name.....	33, 34	pikakuvake	34
Edellytykset-näyttö	31	Playback Settings (Toiston asetukset).....	26
Erilaiset näytöt	16	Preferences (omat asetukset) -ikkuna	26
Eteenpäin siirtyminen	26	Salasana.....	33, 34
Ikkunoitu näyttö.....	35	Sanasto.....	7
Java Runtime Environment	31	Sisältö	iii
Johdanto.....	6	Sovelluksen asetusten opaste	26
JRE	31	Stereotaxisin yhteystiedot.....	ii
Käyttäjätunnus	34	Taaksepäin siirtyminen	26
Käyttötarkoitus.....	5	Tämä käyttöopas.....	7
Kirjanmerkit.....	24	Tekniset tiedot	6
Kirjanmerkki		Työpöydällä näkyvä pikakuvake.....	34
katsominen	25	Varoitukset/varotoimet	5
lisääminen.....	25	Viewer	
muokkaaminen	25	aikajana.....	16
poistaminen	25	ikkuna	11
Kirjautumisnäkyvä	9	ikkunan opaste.....	11
Kokoruutunäyttö.....	35	navigointivalikko.....	12
Kuvaluettelo	iii	näyttötilat	12
Liite A: Asennus.....	30	painikkeet	14
Log Off (Uloskirjautuminen).....	29	työkalurivi	14
Navigant-navigointityöasema		valintapaneelien opaste	13
sanasto.....	7	valintapaneelit	13
		Yleiskatsaus	5

Refer to the change control in the quality management system for the electronic signatures.

Date of Last Signature:27-Feb-2023 18:17 (GMT)