



ODYSSEY™

ENTERPRISE CINEMA

Kullanıcı Kılavuzu

1.1



710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101
USA
1-314-678-6100

© Stereotaxis 2010, 2022

Rx ONLY
CE2797

www.stereotaxis.com

Made In USA

Stereotaxis ile İletişim

Stereotaxis, Inc.
710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101
USA

314-678-6100
31.20.654.1957
www.stereotaxis.com

Avrupa Yetkili Temsilcisi

MDSS
(Medical Device Safety Service GmbH)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Almanya



İthalatçı

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen
33 - Suite 123,
2595 AM The Hague
Netherlands



Patentler

ABD ve beklemedeki diğer patentler.

Ticari Markalar ve Tescilli Ticari Markalar

- Niobe® ve Cardiodrive®, Stereotaxis, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- Odyssey™ Enterprise Cinema, Odyssey™ ve Navigant™, Stereotaxis, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

İlgili belgeler

HDW-0193, Odyssey™ Kullanıcı Kılavuzu; HDW-0207, Navigant™ Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuzda referans verilen bireylerin adları

Bu belgede referans verilen hasta, hekim ve diğer kullanıcıların adları, Homeros'un "Odyssey" (Odise) adlı destanından alınmış kurgusal adlardır.

Kapak resmi

Kapak resmi ve filigranlar © 2010, 2022 Stereotaxis, Inc.

İçindekiler

Genel Bakış	6
Kullanım Amacı.....	6
Uyarılar/Önlemler	6
Giriş	7
Odyssey™ Enterprise Cinema	7
Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci.....	7
Teknik Özellikler.....	7
Bu kullanıcı kılavuzu	8
Semboller ve grafikler	9
Sözlük	12
Başlarken	13
Login (Oturum açma) ekranı.....	14
Main menu (Ana menü)	15
Viewer (Görüntüleyici) penceresi	16
Navigasyon menüsü	17
Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri	18
Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğu.....	19
Archiver (Arşivleyici) penceresi.....	23
Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri.....	24
Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu	27
Preferences (Tercihler) penceresi.....	31
Passport (Pasaport) penceresi.....	33
Oturumu Kapatma.....	34
Ek A: Kurulum	35
Dizin	41

Şekiller Tablosu

Şekil 1 – Odyssey™ Enterprise Cinema kısayolu.....	13
Şekil 2 – Painting application (Uygulama görüntüsü oluşturuluyor)	13
Şekil 3 – Login (Oturum açma) ekranı	14
Şekil 4 – Login (Oturum açma) iletişim kutusu	14
Şekil 5 – İmlecin Viewer (Görüntüleyici) düğmesinin üzerinde olduğu Main menu (Ana menü).....	15
Şekil 6 – Viewer (Görüntüleyici) penceresi.....	16
Şekil 7 – Navigasyon menüsü.....	17
Şekil 8 – Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi	17
Şekil 9 – Navigasyon düğmesi.....	17
Şekil 10 – Turuncu noktalı kutular her bir ekran türündeki görüntüleme alanlarını belirtir. Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi (kırmızı oklarla belirtilir), görünümleri değiştirir.	17

Şekil 11 – Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri	18
Şekil 12 – Devre dışı bırakılmış düğme örnekleri.....	19
Şekil 13 – Etkinleştirilmiş (kullanılabilir) düğme örnekleri	19
Şekil 14 – Varsayılan standart görünüm	21
Şekil 15 – Bire bir (1:1) görünümü	21
Şekil 16 – Tam ekran görünümü	21
Şekil 17 – Bire bir ve tam ekran görünümü	21
Şekil 18 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – canlı video.....	21
Şekil 19 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – geçici video kaydını gözden geçirme.....	21
Şekil 20 – Viewer'da (Görüntüleyici) en uzun süreyi kapsayan zaman çizgileri örnekleri	22
Şekil 21 – Archiver (Arşivleyici) penceresi.....	23
Şekil 22 – Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri.....	24
Şekil 23 – Prosedür sıralama sekmeleri.....	24
Şekil 24 – Prosedür bilgilerini görüntülemek için, imleci bir prosedür listesinin üzerinde tutun.	25
Şekil 25 – Procedures (Prosedürler) kontrol paneli.....	25
Şekil 26 – Prosedür bilgileri paneli ve Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle) düğmesi.....	26
Şekil 27 – Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) paneli ve düğmesi.....	26
Şekil 28 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlanıyor: üç düğme görüntülenir	27
Şekil 29 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlantıyı değiştirme: düğmelerin çoğu görüntülenir	27
Şekil 30 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğunun yukarısındaki göstergeler	27
Şekil 31 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sol uç.....	29
Şekil 32 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sağ uç	29
Şekil 33 – Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesi.....	30
Şekil 34 – Bookmark description (Yer işareti açıklaması).....	30
Şekil 35 – New bookmark (Yeni yer işareti).....	30
Şekil 36 – Yer işaretinin üzerinde imleç.....	30
Şekil 37 – Seçilen (tıklatılan) yer işareti.....	30
Şekil 38 – Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesi ve bookmark description (yer işareti açıklaması).....	30
Şekil 39 – Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesi.....	30
Şekil 40 – Application Settings'i (Uygulama Ayarları) içeren Preferences (Tercihler) Penceresi.....	31
Şekil 41 – İleri Gitme Düğmesi	31
Şekil 42 – Geri Gitme Düğmesi	31
Şekil 43 – Passport (Pasaport) penceresi.....	33
Şekil 44 – Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Navigasyon Menüsü (sağda); Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Main Menu (Ana Menü)	34
Şekil 45 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran	35
Şekil 46 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Custom Options (Özel Seçenekler)	36

Şekil 47 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Prerequisites (Önkoşullar): Java Runtime Environment	36
Şekil 48 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Installing (Kuruluyor)	37
Şekil 49 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Completed (Tamamlandı)	37
Şekil 50 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran	38
Şekil 51 – İlk login (oturum açma) iletişim kutusu	39
Şekil 52 – Sonraki standart login (oturum açma) iletişim kutusu	39
Şekil 53 – Masaüstü kısayolu	39
Şekil 54 – Start (Başlat) menüsü kısayolları.....	40
Şekil 55 – Pencereci modda Login (Oturum açma) ekranı	40
Şekil 56 – Tam ekran modunda Login (Oturum açma) ekranı.....	40

Genel Bakış

Kullanım Amacı

Odyssey™ Enterprise Cinema, Odyssey™ İş İstasyonu ekranında canlı ve arşivlenmiş olguların uzaktan görüntülenmesini sağlayan bir ürün seçeneğidir.

Uyarılar/Önlemler

UYARI: Odyssey™ Enterprise Cinema yalnızca cihazın kullanımı konusunda kapsamlı eğitim almış, nitelikli tıbbi uzmanlar tarafından kullanılmalıdır.

UYARI: Odyssey™ Enterprise Cinema kullanılarak görüntülenen video içeriği yalnızca hastayı izleme amaçlıdır.

Manyetik navigasyon ile ilişkili uyarı ve önlemlerin tam listesi için, Navigant™ Kullanıcı Kılavuzu'na ve Manyetik Navigasyon Sistemi Niobe® Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Giriş

Odyssey™ Enterprise Cinema

Odyssey™ Enterprise Cinema, Odyssey™ ürünü için isteğe bağlı bir eklenti olarak sunulan bir üründür. Şu işlevleri sağlar:

- Canlı Odyssey™ videosunu arşivleme – Cinema kullanıcının canlı bir Odyssey™ prosedürünü kaydetmesine ve daha sonra görüntülemek için bir arşiv sunucusunda depolamasına olanak sağlar.
- Canlı Odyssey™ videosunu görüntüleme – Cinema kullanıcının bir Odyssey™ prosedürünü gerçek zamanlı olarak uzaktan görüntülemesine olanak sağlar.
- Arşivlenmiş videoyu görüntüleme – Cinema kullanıcının önceden kaydedilmiş (arşivlenmiş) Odyssey™ videosunu görüntülemesine olanak sağlar.

Canlı videoyu aşağıdaki şekillerde görüntüleyebilirsiniz:

- Yerel olarak aynı hastanede veya uzak bir yerden.
- Bu kullanıcı kılavuzunda açıklandığı gibi standart bir ofis PC'si ve Odyssey™ Enterprise Cinema İstemcisi yazılımını kullanarak.

Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci

Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci klinisyenlere, Odyssey™ prosedürlerini kaydedip geri oynatma, diğer klinisyenlerin canlı Odyssey™ prosedürlerini gözden geçirme ve hastaneleri içinde canlı Odyssey™ prosedürlerini uzaktan görüntüleme olanağı sağlar.

Cinema İstemci ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Laboratuarda canlı bir prosedürü görüntüleme.
- İş ilişkisi kurulmuş diğer klinisyenlerden ve kuruluşlardan olgular görüntüleme.
- Önceki prosedürleri gözden geçirme.
- Meslektaşların odalardan birini desteklerken birden çok prosedür odasındaki olguları gözden geçirmesine olanak sağlayarak onların eğitimine yardımcı olma.
- Personeli prosedür teknikleri konusunda eğitmek için bir kuruluşta arşivlenmiş olguların ana kümesini oluşturma.

Teknik Özellikler

Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci için Internet Explorer 7 veya sonraki bir sürüm gerekir. Diğer tarayıcılar desteklenmez.






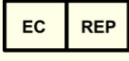



Bu kullanıcı kılavuzu







Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci Kullanıcı Kılavuzu Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci yazılımının (Cinema görüntüleyicisi) nasıl kullanılacağını açıklar. Odyssey™ İş İstasyonu Kullanıcı Kılavuzu girişimsel laboratuarda Cinema kayıt kontrolünün nasıl kullanılacağını açıklar.

Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci Kullanıcı Kılavuzu Odyssey™ İş İstasyonu, Navigant™ İş İstasyonu veya diğer cihazların girişimsel bir laboratuarda nasıl kullanılacağını *açıklamaz*.

Semboller ve grafikler

Symbol	Name	Description
--------	------	-------------

Symbol	Name	Description
	Kullanım talimatlarına bakın	Kullanıcının kullanım talimatlarına bakması gerektiğini belirtir.
	Enerji	Enerji durumunu gösterir.
	Alternatif akım	Anma değeri plakasında ekipmanın sadece alternatif akım için uygun olduğunu belirtmek için; ilgili terminalleri tanımlamak için.
	Doğru akım	Anma değeri plakasında ekipmanın sadece doğru akım için uygun olduğunu belirtmek için; ilgili terminalleri tanımlamak için.
	Üretici	90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB direktiflerinde tanımlanan şekilde tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	Avrupa Birliğindeki/Avrupa Topluluğundaki yetkili temsilci	Avrupa Birliğindeki/Avrupa Topluluğundaki yetkili temsilciyi belirtir.
REF	Katalog numarası	Tıbbi cihazın tanımlanabilmesini sağlayan, üreticinin katalog numarasını belirtir.
	İthalatçı	Tıbbi cihazı yerel olarak ithal eden tüzel kişiyi belirtir.
	Tıbbi cihaz	Öğenin tıbbi bir cihaz olduğunu belirtir.
	Dikkat	Kullanıcının, çeşitli nedenlerle tıbbi cihazın kendisinde sunulamayan uyarılar ve önlemler gibi önemli ve uyarıcı bilgiler için kullanım talimatlarına bakması gerektiğini belirtir.

Symbol	Name	Description
	CE İşareti	Ürün, Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC ile uyumludur ve yürürlükteki sağlık, güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamaktadır. İşarete bir sayı eşlik ediyorsa, uygunluk doğrulanmıştır.
	Üretim tarihi	Tıbbi cihazın üretildiği tarihi belirtir.
	Sadece Reçete	Dikkat: Federal (ABD) yasaya göre bu cihaz sadece bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satılabilir.
	Geri dönüşüm: Elektronik Ekipman	Ürünün elektronik ekipmanların geri dönüşümü için Avrupa Birliği'nin Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) 2002/96/EC/EU Direktifine tabi olduğunu belirtir.
	Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın	Kullanım kılavuzunun/kitapçığın okunması gerektiğini belirtir.
	Seri numarası	Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesini sağlayan, üreticinin seri numarasını belirtir.

Sözlük

Bu belgede aşağıdaki terimler bulunabilir:

Terim	Açıklama
Navigant Navigasyon İş İstasyonu	Stereotaxis Navigant Navigasyon İş İstasyonu klinik iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım uygulamaları platformudur. Kateterizasyon ve elektrofizyoloji laboratuvarlarının gelişmiş entegrasyonunu ve manyetik navigasyon sırasında tıbbi cihazların gelişmiş otomasyonunu sağlar.
Niobe Manyetik Navigasyon Sistemi	Stereotaxis Niobe® Manyetik Navigasyon Sistemi tedaviyi etkilemek için hekimlerin kateterleri, kılavuz telleri ve diğer manyetik girişimsel cihazları kan damarları ve kalp odacıkları yoluyla tedavi yerlerine daha etkili şekilde yönlendirmesine olanak sağlar.
Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci	Odyssey™ Enterprise Cinema'nın standart bir PC'de çalışan ve Odyssey™ Enterprise Cinema kullanıcıları için tek bir entegre kullanıcı arabirimi sağlayan tarayıcı yazılımı.
Odyssey™ Ağı	Uzaktan görüntüleme ve müşteri desteği için Odyssey™ sistemlerini bağlayan özel bir global ağ.
Odyssey™ Ağ Merkezi	Ayrıca “Çağrı Merkezi” olarak da adlandırılır. Müşteri desteği, eğitim ve ağ yönetimi amacıyla Odyssey™ kurulumlarını uzaktan görüntüleme ve kontrol etme yeteneğine sahip bir Stereotaxis tesisi.

Başlarken

Bir Stereotaxis temsilcisi veya Bilgi Teknolojisi departmanınızın üyesi Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci'yi kurmuş ve masaüstünüzde bir kısayolunu oluşturmuş olmalıdır. Aksi takdirde bkz. [Ek A: Kurulum](#). Cinema'yı başlatmak için, kurulan kısayolu çift tıklatın. Cinema Internet Explorer'da açılacaktır.



Şekil 1 – Odyssey™ Enterprise Cinema kısayolu

★ **Not:** Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci **yalnızca Internet Explorer 7 veya sonraki bir sürümle uyumludur** (diğer web tarayıcılarıyla uyumlu değildir).

Uygulama yüklendikçe, Painting application (Uygulama görüntüsü oluşturuluyor...) iletisini içeren küçük bir kutu görüntülenir.



Şekil 2 – Painting application (Uygulama görüntüsü oluşturuluyor)

Oturum açma ekranı görüntülenir.


★ **Not:** En iyi görüntüyü elde etmek için tarayıcımızla ekranı kaplayın.

Login (Oturum açma) ekranı



Şekil 3 – Login (Oturum açma) ekranı

Login (Oturum açma) iletişim kutusuna, uygulamayı kuran temsilcinin size sağladığı User Name (Kullanıcı Adı) ve Password (Parola) seçeneklerini yazın. **Log in** (Oturum açma) seçeneğini tıklattın veya **Enter** tuşuna basın.

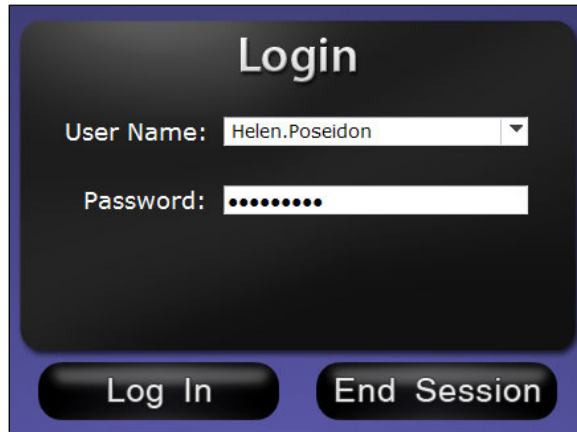

Şekil 4 – Login (Oturum açma) iletişim kutusu

- ★ **Not:** Login (Oturum açma) ekranınızda bir Client Name (İstemci Adı) alanı görürseniz kurulumunuz tamamlanmamıştır. Client Name (İstemci Adı) edinmek için kuruluşunuzun yardım kaynağıyla iletişim kurun (bkz [Ek A: Kurulum](#)). Kurulum tamamlandıktan sonraki oturum açma işlemlerinde Client Name (İstemci Adı) alanını görmemeniz gerekir.

Main menu (Ana menü)

Oturum açmanızın ardından, dört seçenek ve Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren main menu (ana menü) görüntülenir.




Şekil 5 – İmlecin Viewer (Görüntüleyici) düğmesinin üzerinde olduğu Main menu (Ana menü)

Dört pencere seçeneği şunlardır:

- **Viewer (Görüntüleyici)** – Seçilen bir iş istasyonundan canlı video görüntüler.
- **Passport (Pasaport)** – Odyssey™ Ağı kullanıcılarına ilişkin özel bilgileri görüntüler.
- **Archiver (Arşivleyici)** – Seçilen iş istasyonlarındaki kayıtlı videolara erişilmesini sağlar.
- **Preferences (Tercihler)** – Kullanıcının Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) ayarlarını yapmasına olanak sağlar.
- **Log Off (Oturumu Kapat)** – Kullanıcının oturumunu kapatır ve Login (Oturum açma) ekranını görüntüler.

Viewer (Görüntüleyici) penceresi

[Main menu](#) (Ana menü) içinden veya [Navigasyon menüsünden](#) **Viewer** (Görüntüleyici) seçeneğini belirlediğinizde, Viewer (Görüntüleyici) penceresi birçok temel özellikte birlikte görüntülenir.

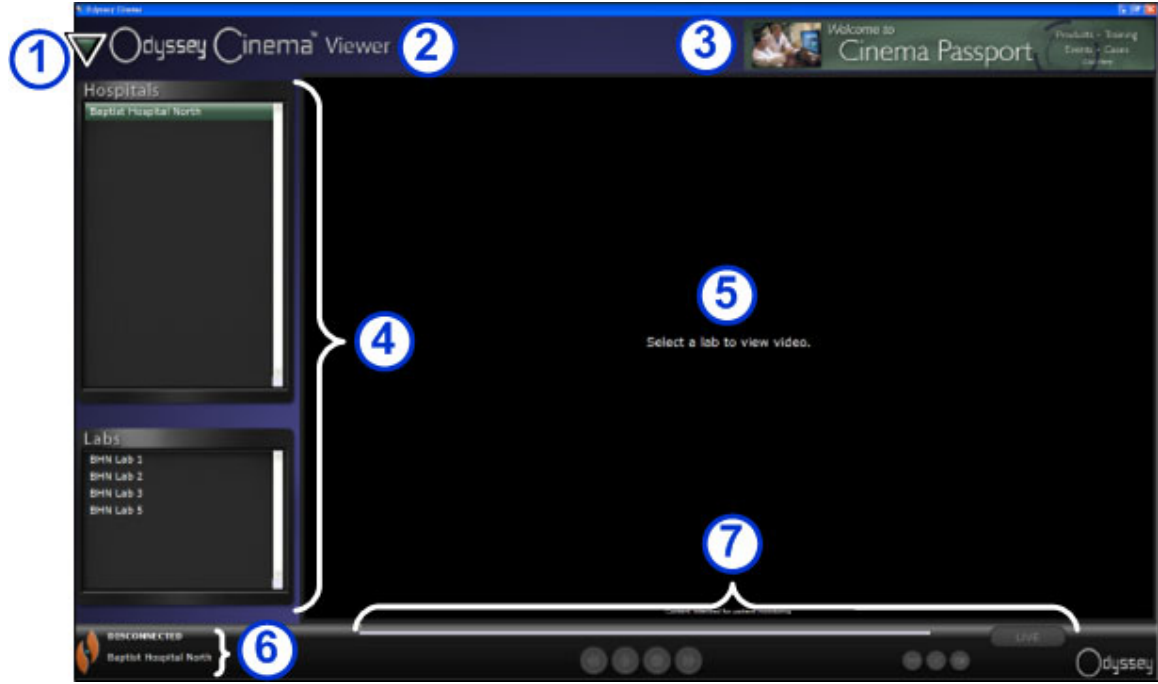

Şekil 6 – Viewer (Görüntüleyici) penceresi

Viewer (Görüntüleyici) penceresi kılavuzu


- ① **Navigasyon düğmesi.** Yeşil üçgen düğme dört ana pencereyi, Main Menu (Ana Menü) ve Log Off (Oturumu Kapat) seçeneğini içeren, açılan bir [Navigasyon menüsünü](#) görüntüler. Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ② **Pencere etiketi.** Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ③ **Cinema Passport (Cinema pasaportu) manşet grafiği.** Odyssey™ Enterprise Cinema kullanıcıları için haberler sağlar. Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ④ **Seçim panelleri:** Hospitals (Hastaneler) ve Labs (Laboratuvarlar). Bir hastane seçebilirsiniz; o hastane içinde bir laboratuvar seçebilirsiniz.
- ⑤ Görüntüleme alanı. Seçtiğiniz laboratuvar Odyssey™ iş istasyonunu burada görüntüler.
- ⑥ **Bağlantı durumu ve hastane ve laboratuvar adları.** Bu panel seçilen hastanenin adını ve Connected (Bağlandı) ve Disconnected (Bağlantı Kesildi) gibi bağlantı durumunu görüntüler.
- ⑦ **Viewer (Görüntüleyici) Araç Çubuğu ve Zaman Çizgisi.** Bu panel araç çubuğu düğmelerini ve zaman çizgisini görüntüler:
 - Geri git
 - Oynat / Duraklat (geçiş düğmesi)
 - Durdur
 - İleri git
 - Bire bir modu
 - Ekran geçişi yap
 - Ekran anlık görüntüsü
 - Canlı (durum düğmesi)

Navigasyon menüsü

Navigasyon düğmesini tıklattığınızda, altı seçenek içeren Navigasyon menüsü görüntülenir. Bir seçeneğe erişmek için onu tıklatın.

- Viewer (Görüntüleyici) (pencere)
- Archiver (Arşivleyici) (pencere)
- Passport (Pasaport) (pencere)
- Preferences (Tercihler) (pencere)
- Main menu (Ana menü)
- Log off (Oturumu kapat)

★ **Not:** Bir videoyu tam ekran modunda görüntülüyorsanız Navigasyon düğmesine erişebilmeniz için öncelikle Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğunda Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesini tıklatarak pencereci moda geri dönmeniz gerekir. Şekil 10 ve ilerleyen bölümdeki kılavuz bu modları açıklamaktadır.

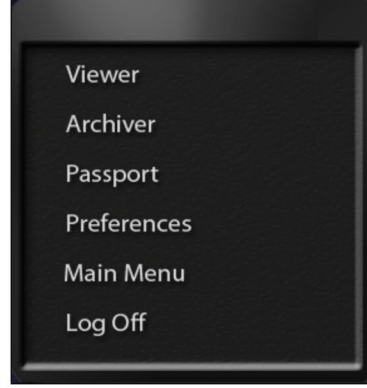


Şekil 7 - Navigasyon menüsü



Şekil 8 - Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi



Şekil 9 - Navigasyon düğmesi

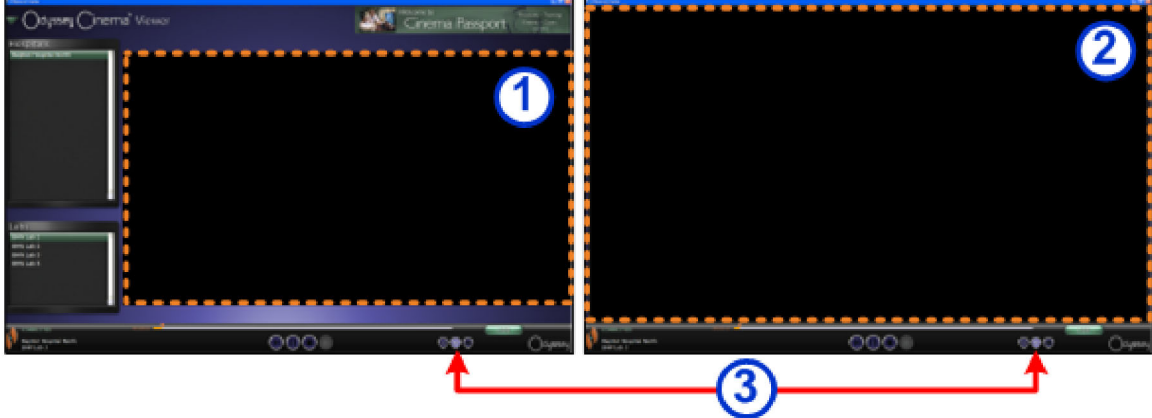


Şekil 10 - Turuncu noktalı kutular her bir ekran türündeki görüntüleme alanlarını belirtir. Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi (kırmızı oklarla belirtilir), görünümünü değiştirir.

Viewer (Görüntüleyici) modları

- ① **Pencereci mod:** Manşet ve seçim panelleri görüntülenmeye devam ettiğinden, görüntüleme alanı, pencereci modda daha küçüktür. Bu varsayılan görünümdür.
- ② **Tam ekran modu:** Görüntüleme alanı pencere içinde maksimum boyutuna genişler.

- ③ **Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi:** Araç çubuğunun ikinci düğme kümesinde ortada yer alan düğme. Bir moddayken, diğer moda geçiş yapmak için Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesini tıklatın.

Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri

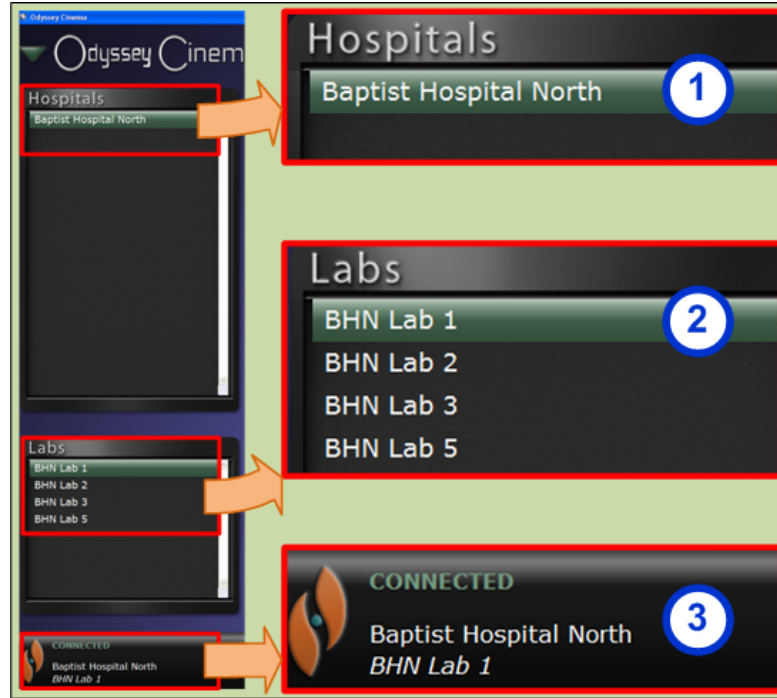

Şekil 11 – Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri

Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri kılavuzu

- ① **Hastane listesi.** Bir hastane seçin (birden çok varsa. Listedeki ilk hastane, varsayılandır.)
- ② **Laboratuvar listesi.** Seçilen hastanenin listesinden bir laboratuvar seçin.
- ③ **Bağlantı durumu ve hastane ve laboratuvar adları.**


Bağlantı durumu: Bir laboratuvar seçmeden önceki durum Disconnected (Bağlantı Kesildi)'dir. Bir laboratuvar seçtikten sonra durum aşağıdaki iletilerden bazıları veya tümü arasında geçiş yapabilir.

- Disconnected (Bağlantı Kesildi) – Laboratuvara bağlı değilsiniz.
- Authorizing (Yetki Veriliyor) – Bu durum yalnızca bir laboratuvara bağlanma izni olan kullanıcılar için görüntülenir. Odyssey™ laboratuvarındaki kullanıcı, yetki isteğinde bulunduğunuzu görür.
- Connecting (Bağlanılıyor) – Laboratuvara bağlanıyorsunuz.
- Connected (Bağlandı) – Laboratuvara bağlandınız.
- Denied (Reddedildi) – Bu durum yalnızca bir laboratuvara bağlanma izni olan kullanıcılar için görüntülenir. Odyssey™ laboratuvarındaki kullanıcı, bağlanma iznini reddetti.
- Disconnecting (Bağlantı Kesiliyor) – Laboratuardan bağlantınızı kesiliyor. Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci'den veya Odyssey™ laboratuvarından bağlantınızı kesilebilir. (Bağlantıyı kesmek için Stop (Durdur) düğmesini tıklatın.)

Hastane ve laboratuvar adları: Bağlandığınızda, bağlanan hastane ve laboratuvarın adı durum iletilisinin aşağısında görüntülenir.


Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğu

Düğmeler gerektiğinde Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğunda kullanılabilir bir durumda görüntülenir. Örneğin, bir hastane laboratuvarı seçmeden önce devre dışı bırakılmış bir dizi düğme görürsünüz:

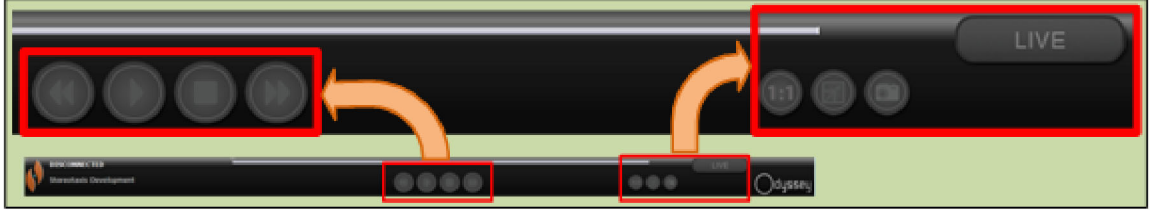

Şekil 12 – Devre dışı bırakılmış düğme örnekleri



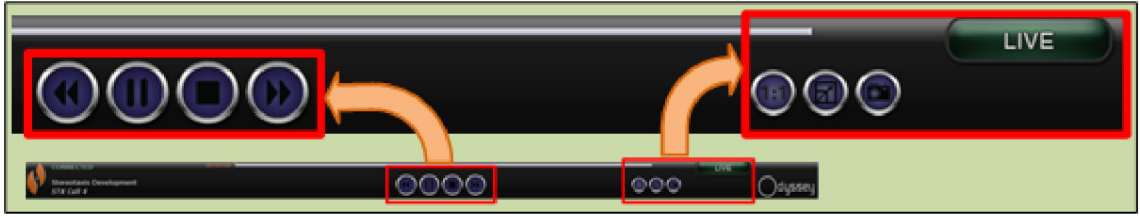


Bağlandığınızda hemen bazı düğmeler görüntülenir (geri git veya duraklat düğmesini tıkladığınızda, ileri git düğmesi görüntülenir):



Şekil 13 – Etkinleştirilmiş (kullanılabilir) düğme örnekleri


Viewer (Görüntüleyici) düğmeleri

Düğme		Açıklama
	Geri git	Video akışını Preferences (Tercihler) Penceresinde ayarlanan aşamalarla geriye taşır.
	Oynat / duraklat geçiş düğmesi	Bu düğme video geri oynatımının Duraklat ve Oynat durumu arasında geçiş yapmasını sağlar.
	Durdur ve bağlantıyı kes	Video akışını durdurur. Şu bilgi istemi görüntülenir: “Video will no longer be available. Continue?” (Video artık kullanılabilir durumda değil. Devam edilsin mi?) Yanıtlar, OK (Tamam) veya Cancel (İptal) şeklindedir. OK (Tamam) seçeneğini tıkladıktan sonra birikmiş canlı videoyu artık oynatamazsınız. Durum Disconnected (Bağlantı Kesildi) olarak değiştirilir.
	İleri git	Video akışını, Preferences (Tercihler) penceresinde ayarlanan aşamalarla ileriye taşır.


Düğme		Açıklama
	Live (Canlı)	<ul style="list-style-type: none"> Açık yeşil düğme prosedürü canlı görüntülediğinizi belirtir. Düğme koyu yeşil olduğunda, bağlanmış olursunuz ancak video oynatımı canlı değildir; canlı görüntülemeyi sürdürmek için koyu yeşil düğmeyi tıklatabilirsiniz. Düğme siyah olduğunda, bağlantınız kesilmiştir.
	Bire bir görünümü	Videoyu Odyssey™ laboratuvarının gördüğü aynı çözünürlükte - 1:1 piksel çözünürlükte görüntüler. (Bkz Şekil 15.)
	Tam ekran görünümü	Videoyu tam ekrana genişletir, böylece üst çerçeve artık görüntülenmez (Navigasyon düğmesi dahil). Üst çerçeveyi ve Navigasyon düğmesini görüntülemek için yeniden tıklatın. (Bkz Şekil 16.)
	Bire bir ve tam ekran görünümü	Bire bir ve tam ekran görünümünü birleştirir. Bu birleşim size en büyük görüntüleme alanını sunar. (Bkz Şekil 17.)
	Ekran anlık görüntüsü	Geçerli video ekranının ekran görüntüsünü yakalar. Bir Windows "Save As" (Farklı Kaydet) iletişim kutusunu görüntüler, böylece ekran görüntüsünü saklamak istediğiniz dizini seçebilirsiniz.

Ekran görüntüleri

Görüntüleyici penceresi varsayılan standart görünümde açılır. Üç farklı görünümün (Bire bir görünümü, Tam ekran görünümü ve Bire bir ve tam ekran görünümü) açıklamaları için, Viewer (Görüntüleyici) düğmelerindeki karşılık gelen düğme açıklamalarına bakın.

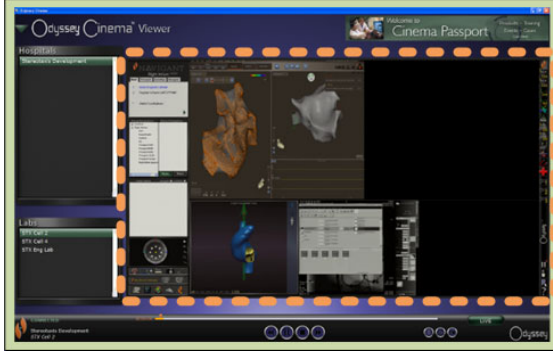


Şekil 14 – Varsayılan standart görünüm

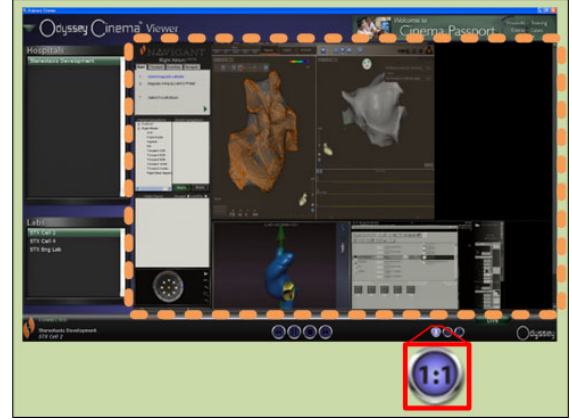

Şekil 15 – Bire bir (1:1) görünümü



Şekil 16 – Tam ekran görünümü

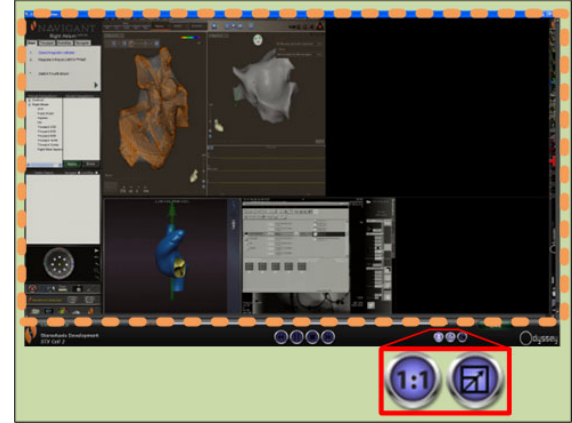

Şekil 17 – Bire bir ve tam ekran görünümü

Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi

Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi canlı video akışının zaman ilerlemesini görüntüler. Geçen süre saat, dakika ve saniye cinsinden (SS.DD.SS) görüntülenir. Turuncu gösterge canlı videonun geçerli saatini gösterir; turuncu çubuk toplam kayıt süresini gösterir. Viewer (Görüntüleyici) canlı prosedürün geçici bir kaydını yapar; böylece kaydetmeye devam ederken kaydedilen segmentleri gözden geçirebilirsiniz. Bu, evinizdeki televizyonun Dijital Video Kaydedici (DVR) veya Kişisel Video Kaydedici (PVR) özelliğine çok benzer.



Şekil 18 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – canlı video



Şekil 19 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – geçici video kaydını gözden geçirme

Geçici kaydı gözden geçirmek için, turuncu göstereyi istediğiniz geçen sürenin soluna sürükleyin veya Geri git düğmesini tıklatın. Göstereyi serbest bıraktığınızda veya Geri git düğmesini tıklattığınızda, kayıt hemen seçilen zamandan oynatılmaya başlar. [Live](#) (Canlı) düğmesi koyu yeşile dönüşerek geçici bir kaydı görüntülediğinizi belirtir. Canlı prosedürü yeniden görüntülemek için, Live (Canlı) düğmesini tıklatın. Canlı prosedürü yeniden görüntülediğinizde, Live (Canlı) düğmesi açık yeşile dönüşür.

Preferences (Tercihler) penceresi\Application Settings (Uygulama Ayarları) içinde ileri ve geri gitme için aşamaları ayarlayın. 60 saniyeden düşük aşamalar için turuncu gösterge hareketini göremeyebilirsiniz; ancak zaman sayacında değişikliği görebilirsiniz (SS.DD.SS).

Zaman çizelgesinin maksimum görüntüsü, geçici kaydın son dört saatidir. Son dört saati kaydettiyseniz zaman çizelgesi ek kayda yer açmak için en önceki kayıttan aşamaları silmeye başlar.



Şekil 20 – Viewer'da (Görüntüleyici) en uzun süreyi kapsayan zaman çizgileri örnekleri

Şekil 20 bu kavramı gösterir:

- Birinci zaman çizgisinde Viewer (Görüntüleyici) 4 saatlik video kaydetmiştir. Kullanıcı bu dört saatlik kaydı gözden geçirebilir.
- İkincisinde Viewer (Görüntüleyici) 4 saat 45 dakikalık video kaydetmiştir. Viewer (Görüntüleyici) ilk 45 dakikayı silmiştir. Kullanıcı yalnızca son 4 saatlik kaydı gözden geçirebilir.
- Üçüncüsünde Viewer (Görüntüleyici) 6 saat 23 dakika ve 18 saniyelik video kaydetmiştir. Viewer (Görüntüleyici) ilk 2 saat, 23 dakika 18 saniyelik kısmı silmiştir. Kullanıcı yalnızca son 4 saatlik kaydı gözden geçirebilir.

Archiver (Arşivleyici) penceresi

[Main menu](#) (Ana menü) içinden veya [Navigasyon menüsünden](#) Archiver (Arşivleyici) seçeneğini belirlediğinizde, Archiver (Arşivleyici) birçok temel özelliikle birlikte görüntülenir:




Şekil 21 – Archiver (Arşivleyici) penceresi

Archiver (Arşivleyici) penceresi kılavuzu

- ① **Navigasyon düğmesi.** Yeşil üçgen düğme dört ana pencereyi, Main Menu (Ana Menü) ve Log Off (Oturumu Kapat) seçeneğini içeren, açılan bir [Navigasyon menüsünü](#) görüntüler. Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ② **Pencere etiketi.** Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ③ **Cinema Passport (Cinema Pasaportu) Manşeti.** Odyssey™ Enterprise Cinema kullanıcıları için “manşet haberleri” sağlar. Cinema Passport (Cinema Pasaportu) penceresini görüntülemek için tıklattın. Bu manşet Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ④ **Seçim panelleri:** Archivers (Arşivleyiciler) ve Procedures (Prosedürler). Bir arşivleyici seçebilirsiniz; o arşivleyici tarafından kaydedilen bir prosedürü seçebilirsiniz.
- ⑤ **Görüntüleme alanı.** Seçtiğiniz kaydedilmiş prosedür burada görüntülenir.
- ⑥ **Prosedür bilgileri.** Bu panel hastane, laboratuvar, hekim ve hasta gibi prosedür bilgilerini görüntüler.
- ⑦ **Bağlantı durumu, Archiver (Arşivleyici) Araç Çubuğu ve Zaman Çizgisi.** Bu panel bağlantı durumunu, araç çubuğu düğmelerini ve zaman çizgisini görüntüler:
 - Connection status (Bağlantı durumu)
 - Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle)
 - Add bookmark (Yer işareti ekle)
 - Edit bookmark (Yer işaretini düzenle)
 - Delete bookmark (Yer işaretini sil)
 - Geri git
 - Oynat / Duraklat (geçiş düğmesi)
 - Durdur
 - İleri git
 - Bire bir modu
 - Ekran geçişi yap
 - Ekran anlık görüntüsü
 - Arşivlenme durumu iletisi


Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri

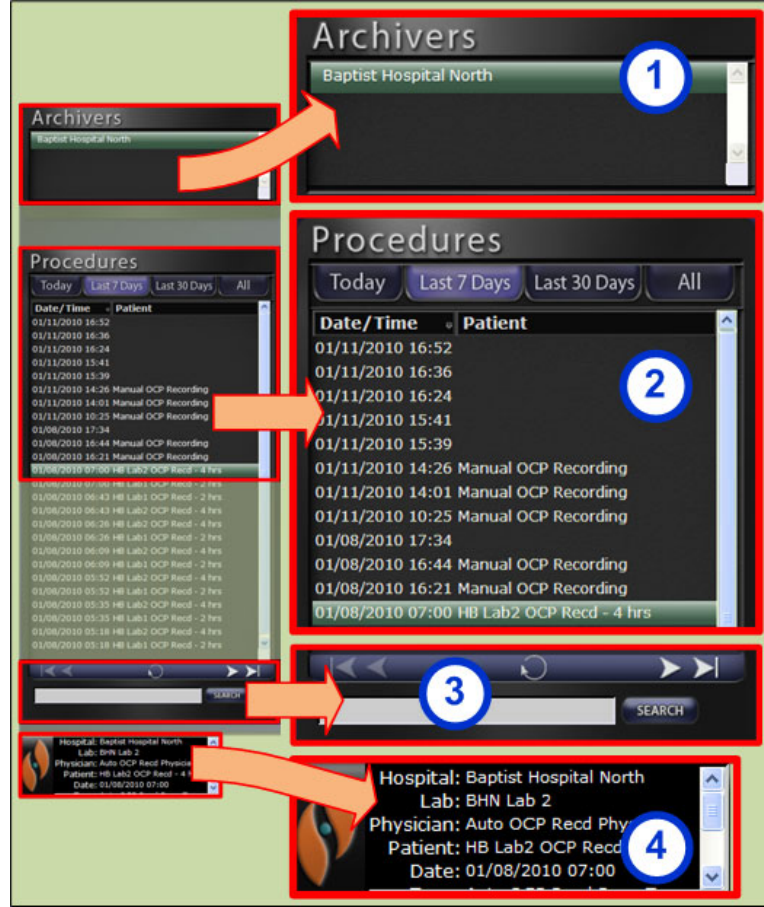

Şekil 22 – Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri


Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri kılavuzu

- 1** **Hastane listesi.** Bir hastane seçin (birden çok varsa. Listedeki ilk hastane, varsayılandır.)
- 2** **Procedures (Prosedürler).** Prosedürler geçerli tarihe (“Today”) (Bugün), Last 7 Days (Son 7 Gün), Last 30 Days (Son 30 Gün) ve All (Tümü) ölçütlerine göre sıralanır. Last 7 Days (Son 7 Gün) varsayılandır. Başka bir kümeyi görüntülemek için uygun sekmeyi tıklatın. Liste ne kadar uzun olursa seçilen prosedür listesinin yüklenmesi o kadar uzun sürer.

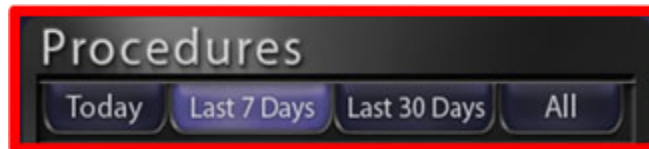

Şekil 23 – Prosedür sıralama sekmeleri


İmleci bir prosedürün üzerinde tuttuğunuzda, tüm prosedür bilgileri bir açılır kutuda görüntülenir.

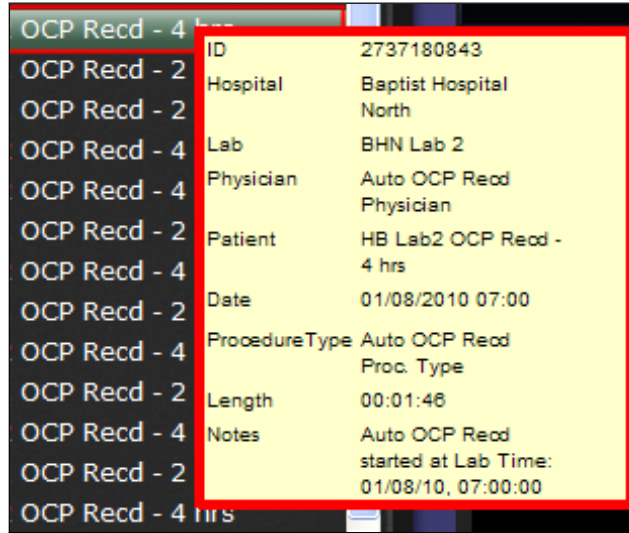

Şekil 24 – Prosedür bilgilerini görüntülemek için, imleci bir prosedür listesinin üzerinde tutun.

Bir prosedür seçtiğinizde, kayıt sağdaki görüntüleme alanında görüntülenir.


- ③ **Procedures (Prosedürler) kontrol paneli.** Bu panelde dört navigasyon düğmesi, bir yenileme düğmesi ve bir search (arama) alanı bulunur.

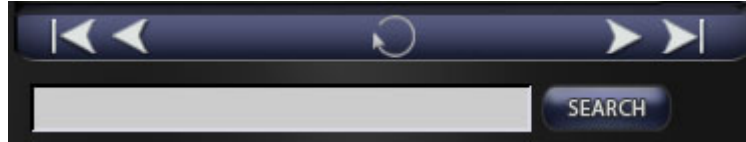

Şekil 25 – Procedures (Prosedürler) kontrol paneli

Procedures (Prosedürler) paneli düğmeleri

Düğme	Adı	Açıklama
	İlk sayfa	Seçilen prosedür listesinin başına geri dönmek için ilk sayfa düğmesini tıklatın.
	Önceki sayfa	Önceki veri sayfasına gitmek için önceki sayfa düğmesini tıklatın. İlk sayfa ve önceki sayfa navigasyon düğmeleri, prosedür listesinin ilk sayfasında görüntülenmez.
	Sonraki sayfa	Sonraki veri sayfasına gitmek için sonraki sayfa düğmesini tıklatın. Seçilen prosedür listesinin sonuna gitmek için son sayfa düğmesini tıklatın.
	Son sayfa	Sonraki sayfa, son sayfa ve navigasyon düğmeleri prosedür listesinin ilk sayfasında görüntülenmez.
	Yenile	Prosedür listesini oturum açıldıktan sonra oluşturulan prosedürlerle güncellemek için Yenile düğmesini tıklatın.

Düğme	Adı	Açıklama
	Search (Arama)	Bir prosedürü aramak için arama alanına prosedürün tanımlayıcı bilgilerini girin. Search (Arama) seçeneğini tıklatın. Search (Arama) alanı büyük küçük harfe duyarlıdır. Tarih veya uzunlukla ilgili arama yapamazsınız. Arama sonuçlarını temizlemek için, Procedures (Prosedürler) panelinin üstündeki herhangi bir sekme tıklatın.

④ **Prosedür bilgileri.** Prosedür bilgileri paneli kaydırılabilir. Panel şunları içerir:

- Hastane adı
- Laboratuvar tanıtıcısı
- Hekim adı
- Hasta adı
- Prosedür tarihi
- Prosedür türü
- Prosedürle ilgili notlar




Şekil 26 – Prosedür bilgileri paneli ve Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle) düğmesi

Prosedür bilgilerini de düzenleyebilirsiniz.

1. Prosedürü düzenle düğmesini (Şekil 27) tıklatın. Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) paneli görüntülenir.
2. Gerekli şekilde bilgileri düzenleyin.
3. Paneli kapatıp değişiklikleri kaydetmek için **Save (Kaydet)** seçeneğini, değişiklikleri kaydetmeden paneli kapatmak için **Cancel (İptal)** seçeneğini tıklatın.

Şekil 27 – Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) paneli ve düğmesi

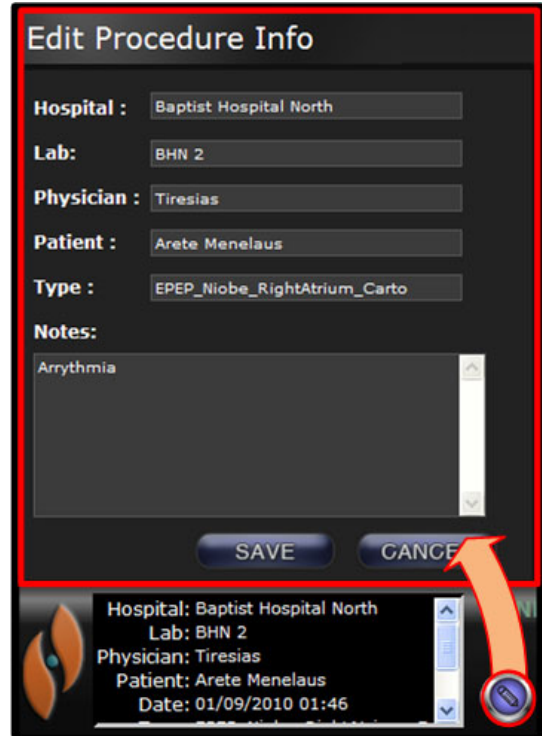

Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu

Düğmeler gerektiğinde Archiver (Arşivleyici) araç çubuğunda kullanılabilir bir durumda görüntülenir. Örneğin, bir prosedür bağlanırken yalnızca üç düğme görüntülenir: Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle), Durdur ve Ekran geçişi yap.



Şekil 28 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlanıyor: üç düğme görüntülenir


Bağlanmak ve oynatmayı başlatmak için Oynat düğmesini tıklatın. Durum yeşil CONNECTED (BAĞLANDI) olarak değişir ve Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) ve Delete bookmark (Yer işaretini sil) dışındaki tüm düğmeler kullanılabilir olur. Bu düğmeler bir yer işareti seçtiğinizde kullanılabilir olur.



Şekil 29 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlantıyı değiştirme: düğmelerin çoğu görüntülenir

Archiver (Arşivleyici) göstergeleri

Kaydedilmiş bir videoya bağlandığımızda (oynatırken), araç çubuğunun yukarısında beş gösterge görüntülenir.

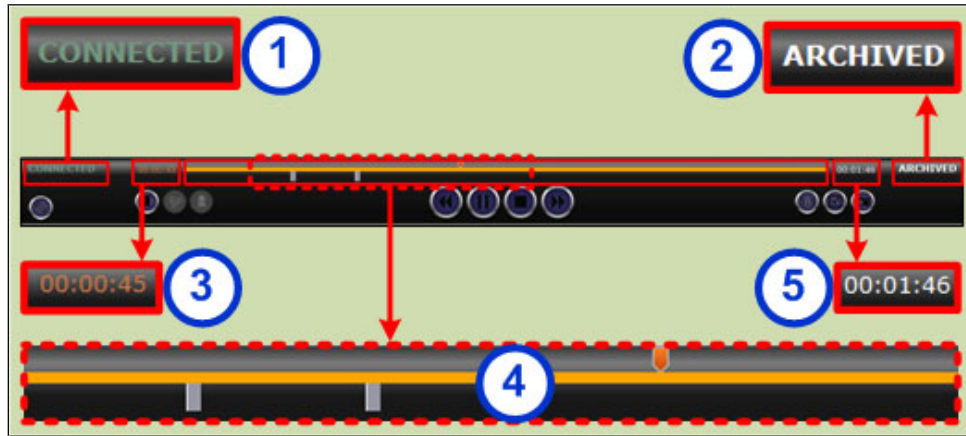




Şekil 30 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğunun yukarısındaki göstergeler

Archiver (Arşivleyici) göstergeleri kılavuzu

- ① **Connection status (Bağlantı durumu).** Seçenekler şunlardır: Disconnected (Bağlantı Kesildi), Connecting (Bağlanılıyor), Connected (Bağlandı) veya Disconnecting (Bağlantı Kesiliyor).
- ② **Archived (Arşivlendi).** Kaydedilmiş bir prosedürü belirtir.
- ③ **Geçen süre.** Geri oynatımı başlatmanızdan itibaren geçen, saat, dakika ve saniye cinsinden süre.
- ④ **Zaman çizgisi çubuğu.** Turuncu video konumu göstergesinin hareket ettiği ve gri yer işaretlerinin oluşturulup erişilebildiği alan.
- ⑤ **Toplam süre.** Kaydın saat, dakika ve saniye cinsinden toplam süresi.

Archiver (Arşivleyici) düğmeleri

Düğme	Adı	Açıklama
	Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle)	Ekranın sol alt köşesinde, prosedür bilgileri kutusunun <i>yukarısında</i> bir metin düzenleyici açar. Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) iletişim kutusundaki tüm alanlar düzenlenebilir.
	Add bookmark (Yer işareti ekle)	Görüntülemekte olduğunuz videoya bir yer işareti ekler, böylece o video karesine geri başvurabilirsiniz. Yer işaretiyle ilgili notlar ekleyebileceğiniz bir Bookmark description (Yer işareti açıklaması) kutusu görüntülenir. Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesini tıklattığınızda yer işaretinin zamanı tanımlanır. Bu zaman daha sonra yer işareti metniyle kaydedilir.
	Edit bookmark (Yer işaretini düzenle)	Videonun zaman çizelgesinde var olan bir yer işaretini tıklattığınızda, Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) ve Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmelerini etkinleştirirsiniz. Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesini tıklattığınızda, seçilen yer işaretinin Bookmark Description (Yer İşareti Açıklaması) kutusu düzenleme için görüntülenir.
	Delete bookmark (Yer işaretini sil)	Videonun zaman çizelgesinde var olan bir yer işaretini tıklattığınızda, Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) ve Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmelerini etkinleştirirsiniz. Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesini tıklattığınızda seçilen yer işareti silinir.
	Geri git	Video kaydını Preferences (Tercihler) penceresinde ayarlanan aşamalarla geriye taşır.
	Oynat / duraklat geçiş düğmesi	Bu geçiş düğmesi video kaydı oynatılırken Duraklat seçeneğini, video duraklatıldığında ise Oynat seçeneğini görüntüler. Açıklama: Video oynatılırken Duraklat'ı tıklatabilir ve duraklatıldığında da Oynat'ı tıklatabilirsiniz).
	Durdur	Video kaydını durdurur.
	İleri git	Video akışını, Preferences (Tercihler) penceresinde ayarlanan aşamalarla ileriye taşır.
	Archived (Arşivlendi)	Önceden kaydedilmiş, arşivlenmiş bir prosedürü görüntülediğinizi belirtir.


Düğme	Adı	Açıklama
	Bire bir modu	Videoyu Odyssey™ laboratuvarının gördüğü aynı çözünürlükte - orijinal 1:1 piksel çözünürlüğünde görüntüler.
	Ekran geçişi yap	Videoyu tam ekrana genişletir, böylece üst çerçeve artık görüntülenmez (Navigasyon düğmesi dahil). Üst çerçeveyi ve Navigasyon düğmesini görüntülemek için yeniden tıklatın.
	Ekran anlık görüntüsü	Geçerli video ekranının ekran görüntüsünü yakalar. Bir Windows "Save As" (Farklı Kaydet) iletişim kutusunu görüntüler, böylece ekran görüntülerini saklamak istediğiniz dizini seçebilirsiniz.

Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi

Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi video kaydının zaman ilerlemesini görüntüler. Geçen süre saat, dakika ve saniye cinsinden (SS.DD.SS) görüntülenir. Turuncu gösterge kaydın geçen süresini; turuncu çubuk toplam kayıt süresini gösterir.



Şekil 31 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sol uç

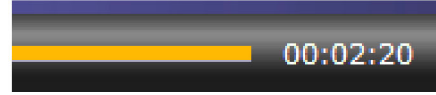

Şekil 32 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sağ uç

Kayıdı gözden geçirmek için, turuncu göstergiyi istediğiniz geçen sürenin soluna sürükleyin veya Geri git düğmesini tıklatın. Göstergiyi serbest bıraktığınızda veya Geri git düğmesini tıklattığınızda, kayıt hemen seçilen zamandan oynatılmaya başlar.

[Preferences \(Tercihler\) penceresinde](#) ileri ve geri gitme için aşamaları ayarlayın. 60 saniyeden düşük aşamalar için turuncu gösterge hareketini göremeyebilirsiniz; ancak zaman sayacında değişikliği görebilirsiniz (SS.DD.SS).

★ **Not:** Kayıttan oynatım sona ulaştığında, Archiver (Arşivleyici) oynatmayı otomatik olarak durdurur ve bağlantıyı keser. Yeniden bağlanmak ve oynatmayı sürdürmek için Oynat düğmesini tıklatın.

Yer İşaretleri

Yer işaretleri kayıta önceden görüntülenilen konuların kısayollarıdır. Odyssey™ İş İstasyonu kullanıcısı bir prosedür kaydedilirken yer işaretleri ekleyebilir ve Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci kullanıcısı arşivlenmiş bir kaydı görüntülerken bunları ekleyebilir. Ancak Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci kullanıcıları canlı bir prosedür izlerken yer işaretleri ekleyemez.

Yer işareti ekleme


Cinema İstemci'de bir yer işareti eklemek için, video oynatılırken veya duraklatıldığında Bookmark (Yer İşareti) düğmesini tıklatın. Bir yer işareti açıklaması yazıp **Save** (Kaydet) seçeneğini tıklattığınızda değil, Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesini tıklattığınızda yer işaretinin zamanı tanımlanır. (Ancak siz **Save** (Kaydet) seçeneğini *tıklatıncaya kadar* yeni yer işareti görüntülenmez).



Şekil 33 – Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesi



Şekil 34 – Bookmark description (Yer işareti açıklaması)

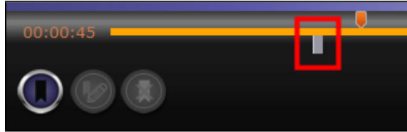

Şekil 35 – New bookmark (Yeni yer işareti)

Yer işaretini gözden geçirme

Bir yer işaretini gözden geçirmek için, imleci yer işaretinin üzerinde tutun, bir açılır pencerede açıklama görüntülenir. Bir yer işaretini tıklatın, böylece yer işareti yeşile dönüşür, oynatma göstergesi o yer işaretine gider ve kayıt o noktadan itibaren oynatılmaya başlar. Oynatma zaman çizelgesindeki yer işareti konumundan birkaç saniye önce başlayabilir.



Şekil 36 – Yer işaretinin üzerinde imleç



Şekil 37 – Seçilen (tıklatılan) yer işareti

Yer işaretini düzenleme

Bir yer işaretini düzenlemek için, yer işaretini ve sonra Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesini tıklatın. Bookmark description (Yer işareti açıklaması) alanı görüntülenir. Gerekli şekilde metni düzenleyin ve **Save** (Kaydet) seçeneğini tıklatın.



Bookmark Description: Arrythmia 1

Şekil 38 – Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesi ve bookmark description (yer işareti açıklaması)

Yer işaretini silme


Bir yer işaretini silmek için, yer işaretini ve sonra Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesini tıklatın. Yer işareti silinir.



Şekil 39 – Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesi

Preferences (Tercihler) penceresi

Preferences (Tercihler) penceresinde, Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) penceresindeki özellikler için tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlar siz onları değiştirmeye kadar gelecekteki tüm Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) oturumları için kalıcı olur.

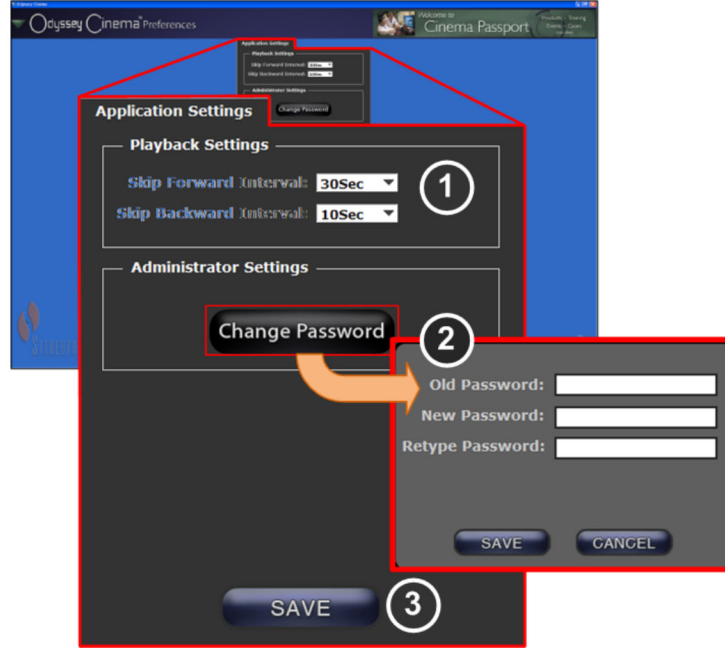

Şekil 40 – Application Settings'i (Uygulama Ayarları) içeren Preferences (Tercihler) Penceresi

Preferences (Tercihler) penceresi / Application Settings (Uygulama Ayarları) kılavuzu

① **Playback Settings (Oynatma Ayarları).** Odyssey™ Enterprise Cinema'da kaydedilen videolar için ayarları seçebilirsiniz. Bu ayarlar Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) pencerelerindeki İleri Git ve Geri Git düğmelerini etkiler.

- **Step Forward Intervals (İleri Gitme Aralıkları).** Menüye erişmek için açılan oku tıklatarak İleri Git düğmesinin aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 30 saniyedir; seçim aralığı 1 saniye - 1 saattir.
- **Step Backward Intervals (Geri Gitme Aralıkları).** Menüye erişmek için açılan oku tıklatarak Geri Git düğmesinin aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 10 saniyedir; seçim aralığı 1 saniye - 1 saattir.



Şekil 41 – İleri Gitme Düğmesi



Şekil 42 – Geri Gitme Düğmesi

- ② **Change Password (Parolayı Deęiřtir).** Change password (Parolayı deęiřtir) iletiřim kutusunu grntlemek iin bu dęmeyi tıkladın:
- **Old Password (Eski Parola):** Geerli oturumu bařlatmak iin kullanılan parolayı yazın.
 - **New Password (Yeni Parola):** Yeni bir parola yazın. Parola en az 1 byk harf, 1 kk harf ve 1 sayısal karakter ieren minimum 8 karakterden oluřmalıdır.
 - **Retype Password (Parolayı Yeniden Yaz):** Yeni parolayı doęrulamak iin yeniden yazın.
 - **Save (Kaydet) / Cancel (İptal):** **Save** (Kaydet) seeneęi deęiřiklikleri kaydeder ve iletiřim kutusunu kapatır. **Cancel** (İptal) seeneęi iletiřim kutusunu kapatır ve deęiřiklikleri kaydetmez.
- ③ **Save (Kaydet):** Application Settings (Uygulama Ayarları) zerinde yapılan tm deęiřiklikleri kaydeder ve iletiřim kutusunu kapatır.

Passport (Pasaport) penceresi

Passport (Pasaport) penceresi Odyssey™ Enterprise Cinema'yı kullanan profesyonellerin ilgisini çeken bilgileri sağlar.




Şekil 43 – Passport (Pasaport) penceresi

Passport (Pasaport) penceresi kılavuzu

- ① **Pencere etiketi.** Her bir pencerede görüntülenir, ancak Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modunda görüntülenmez.
 - ② **Manşet grafiği.** Odyssey™ Enterprise Cinema kullanıcıları için yeni haber manşetleri. Her bir pencerede görüntülenir, ancak Viewer (Görüntüleyici) veya Archiver (Arşivleyici) penceresinde tam ekran modunda görüntülenmez.
 - ③ **Tarayıcı.** Odyssey™ Enterprise Cinema kullanıcıları için ayrıntılı bilgiler.
- ★ **Not:** Passport (Pasaport) Odyssey™ Ağ'ından bilgiler sağlar, World Wide Web'e erişim sağlamaz.

Oturumu Kapatma

Main Menu (Ana Menü) içinden veya her bir sayfadaki Navigasyon menüsünden oturumu kapatabilirsiniz.

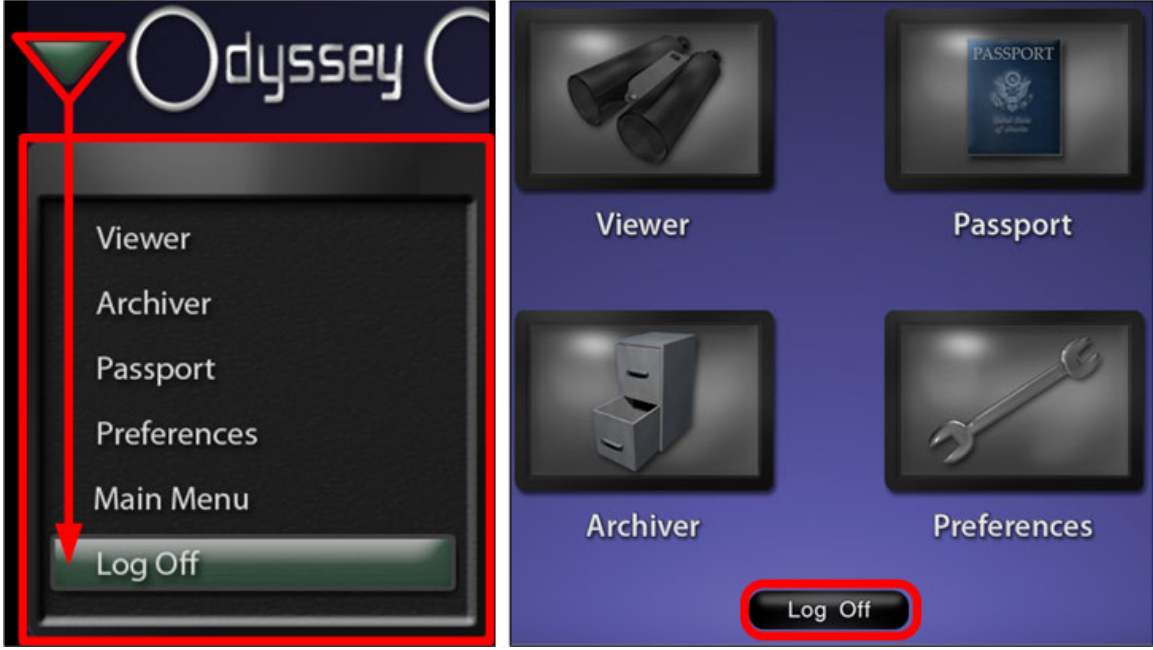

**Şekil 44 – Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Navigasyon Menüsü (sağda);
Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Main Menu (Ana Menü)**

Ek A: Kurulum


Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci'yi sizin (bir Stereotaxis temsilcisi veya Bilgi Teknolojisi departmanınızın üyesi yerine) kurmanız gerekiyorsa aşağıdaki adımları izleyin.



Önemli: Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci'yi bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayara kurmadan önce Stereotaxis temsilcisiyle iletişim kurmalısınız. Temsilci bilgisayarın veya dizüstü bilgisayarın Cinema ile kullanılması için yetki verecek ve şunları doğrulayacaktır:


- Bilgisayar/dizüstü bilgisayar ve ağ konumunun Odyssey™ Enterprise Cinema gereksinimlerini karşıladığını
- Kurulumun izin verilen maksimum konum sayısını aşmadığını

1. PC'de Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.
2. Odyssey™ Enterprise Cinema Yazılım CD'sini disk sürücüsüne takın.
3. Client Installer (İstemci Kurma Programı) klasörünü açın.
4. Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci Setup.exe kurma programını başlatın. Kurma programı başlatma ekranı görüntülenir.
5. Devam etmek için **Next** (İleri) seçeneğini tıklatın.

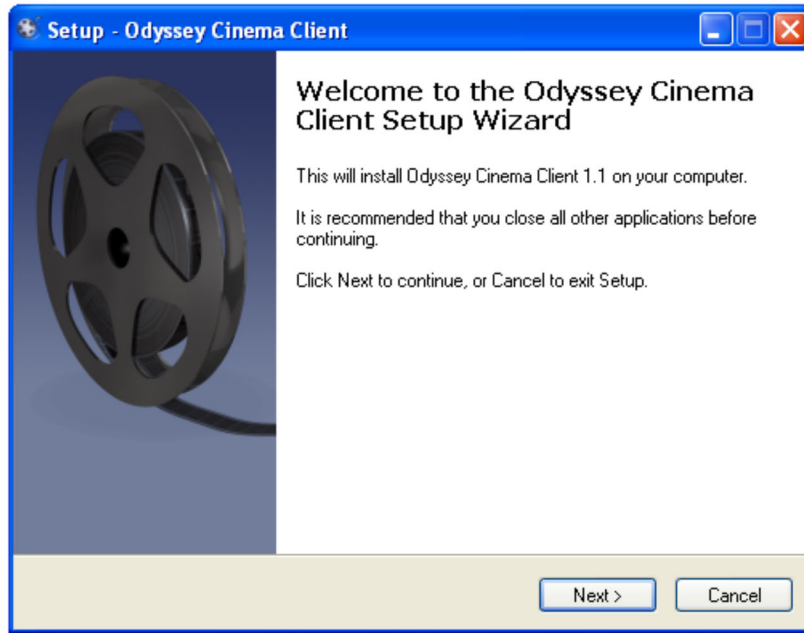


Şekil 45 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran

6. Odyssey™ Enterprise Cinema Yönetimi Sunucusu'nun IP Adresini ve bilgisayara atanan İstemci Adını girin. Bunlar Stereotaxis veya ağ yöneticiniz tarafından sağlanır.
7. Devam etmek için **Next** (İleri) seçeneğini tıklatın.

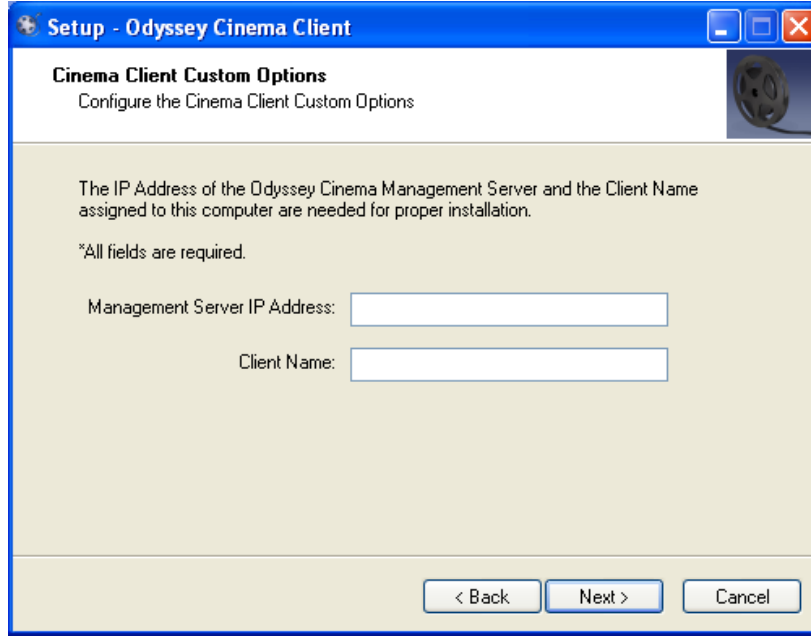


Şekil 46 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Custom Options (Özel Seçenekler)

8. Bilgisayarınızda minimum gerekli Java Runtime Environment (JRE) sürümü kurulu değilse Prerequisites (Önkoşullar) ekranı görüntülenecek JRE'nin kurulacağını belirtir. JRE önceden kurulmuşsa Installing (Kuruluyor) ekranı görüntülenir.
9. JRE kurulumuna devam etmek için **Next** (İleri) seçeneğini tıklayın.

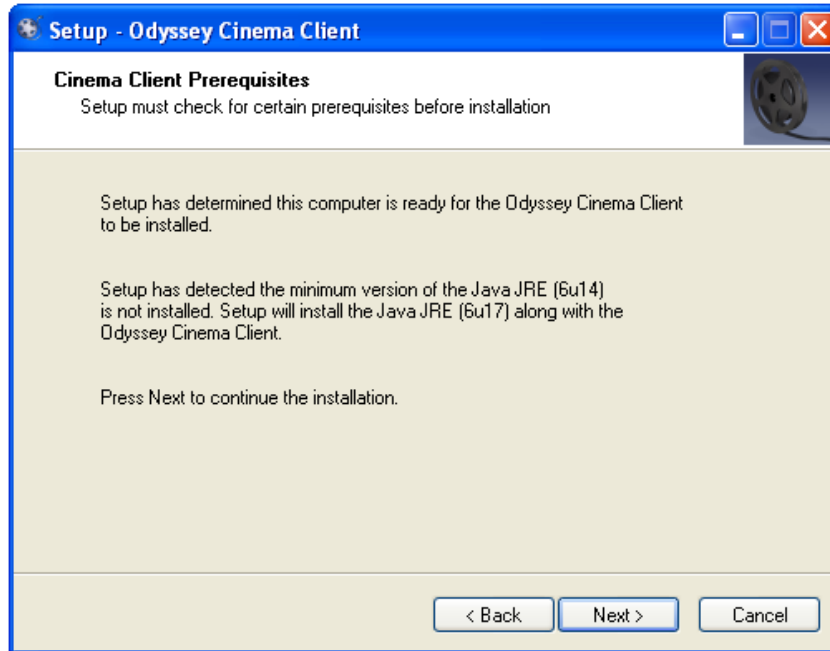

Şekil 47 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Prerequisites (Önkoşullar): Java Runtime Environment

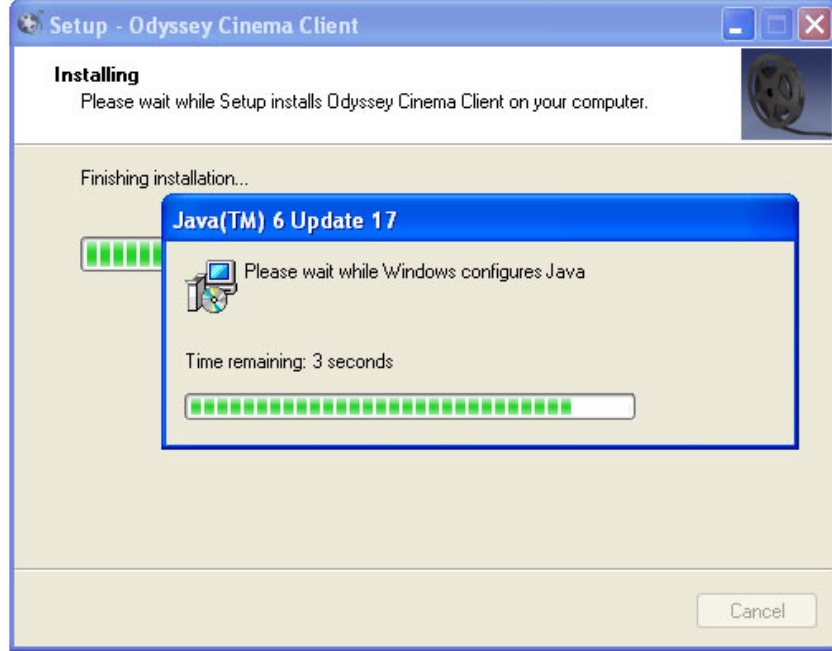

Şekil 48 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Installing (Kuruluyor)

10. Kurulumun sonunda Completed (Tamamlandı) ekranı görüntülenir. Kurma programını kapatmak için **Finish** (Son) seçeneğini tıklayın; Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci'yi başlatma seçeneğiniz vardır.



Şekil 49 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Completed (Tamamlandı)

11. Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci uygulaması şimdi kurulmuştur. Uygulamayı başlatın.

12. Uygulama bir bilgisayarda ilk kez başlatıldığında, “The application’s digital signature cannot be verified” (Uygulamanın dijital imzası doğrulanamıyor) uyarısını görebilirsiniz. Bu uyarının yeniden görüntülenmesini önlemek için “Always trust ...” (Her zaman güven...) onay kutusunu işaretleyin.



Şekil 50 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran

13. İstemci başlatıldığında, kurulumu ve ağ bağlantısını doğrulamak için size sağlanan User Name (Kullanıcı Adı), Password (Parola) ve Client Name (İstemci Adı) ile oturum açın.

★ **Not:** Uygulama her başlatıldığında oturum açılması gerekir. Uygulama ilk kez çalıştırıldığında, oturum açma için bilgisayara atanmış bir User Name (Kullanıcı Adı), Password (Parola) ve Client Name (İstemci Adı) gerekir. Sonraki oturum açmalarda yalnızca User Name (Kullanıcı Adı) ve Password (Parola) gerekir. Aşağıdaki grafiklerde, ilk oturum açma için ve sonraki standart oturum açmalar için login (oturum açma) ekranları gösterilmektedir.



Şekil 51 – İlk login (oturum açma) iletişim kutusu




Şekil 52 – Sonraki standart login (oturum açma) iletişim kutusu

Kurulum masaüstüne bir Odyssey™ Enterprise Cinema kısayolu ekler. Masaüstü simgesi Cinema'yı varsayılan “pencereli” moda çalıştırır.



Şekil 53 – Masaüstü kısayolu

Kurulum Windows Start (Başlat) Menüüne de iki kısayol ekler. Birincisi Odyssey™ Enterprise Cinema varsayılan mod olan “pencereli” mod içindir. İkincisi Odyssey™ Enterprise Cinema Tam ekranıdır.

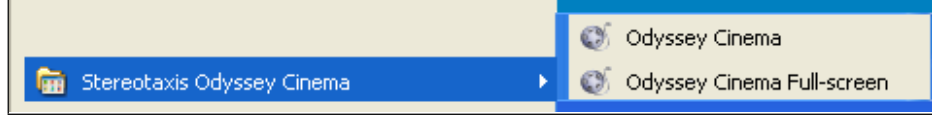

Şekil 54 – Start (Başlat) menüsü kısayolları



Şekil 55 – Pencereli modda Login (Oturum açma) ekranı



Şekil 56 – Tam ekran modunda Login (Oturum açma) ekranı

Dizin

Application Settings (Uygulama Ayarları) kılavuzu.....	26	Sözlük.....	7
Archiver (Arşivleyici)		Oturumu Kapatma.....	29
Araç Çubuğu.....	22	Passport (Pasaport) penceresi.....	28
Düğmeler.....	23	Passport (Pasaport) Penceresi kılavuzu... ..	28
Göstergeler.....	22	Password (Parola).....	33, 34
Göstergeler kılavuzu.....	22	Pencereli mod.....	35
Pencere.....	18	Playback Settings (Oynatma Ayarları)	26
Pencere kılavuzu.....	18	Preferences (Tercihler) penceresi.....	26
Seçim panelleri.....	19	Preferences (Tercihler) penceresi kılavuzu.....	26
Seçim panelleri kılavuzu.....	19	Prerequisites (Önkoşullar) ekranı.....	31
Zaman Çizgisi.....	24	Procedures (Prosedürler) paneli düğmeleri.....	20
Başlarken.....	8	Sözlük.....	7
Bu kullanıcı kılavuzu.....	7	Start (Başlat) Menüsü.....	35
Çağrı Merkezi.....	7	Step Backward Intervals (Geri Gitme Aralıkları).....	26
Change Password (Parolayı Değiştir).....	27	Step Forward Intervals (İleri Gitme Aralıkları).....	26
Client Name (İstemci Adı).....	33, 34	Stereotaxis ile İletişim.....	ii
Ek A: Kurulum.....	30	Table of Figures.....	iii
Ekran görünümleri.....	16	Tam ekran modu.....	35
Genel Bakış.....	5	Teknik Özellikler.....	6
Giriş.....	6	User Name (Kullanıcı Adı).....	33, 34
İçindekiler.....	iii	Uyarılar/Önlemler.....	5
Java Runtime Environment.....	31	Uygulamanın dijital imzası.....	33
JRE.....	31	Viewer (Görüntüleyici)	
kısayol.....	34	Araç Çubuğu.....	14
Kullanım Amacı.....	5	Düğmeler.....	14
Kurulum.....	30	Modlar.....	12
Login (Oturum açma) ekranı.....	9	Navigasyon menüsü.....	12
Main menu (Ana menü).....	10	Pencere kılavuzu.....	11
Masaüstü kısayolu.....	34	Seçim panelleri.....	13
Navigant Navigasyon İş İstasyonu		Seçim panelleri kılavuzu.....	13
Sözlük.....	7	Zaman Çizgisi.....	16
Niobe Manyetik Navigasyon Sistemi		Viewer (Görüntüleyici) Penceresi.....	11
Sözlük.....	7	Yer İşareti	
Odyssey™ Ağ Merkezi		Düzenleme.....	25
Sözlük.....	7	Ekleme.....	25
Odyssey™ Ağ		Gözden Geçirme.....	25
Sözlük.....	7	Silme.....	25
Odyssey™ Enterprise Cinema.....	6	Yer İşaretleri.....	24
Odyssey™ Enterprise Cinema İstemci.....	6		
Odyssey™ Enterprise Cinema İstemcisi			

Refer to the change control in the quality management system for the electronic signatures.

Date of Last Signature:27-Feb-2023 18:17 (GMT)