



ODYSSEY™

Cinema

Käyttöopas



710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101 USA
1-866-646-2346
1-314-678-6100
www.stereotaxis.com

© Stereotaxis 2009, 2023

Made In USA



Rev F

YHTEYSTIEDOT

Stereotaxis, Inc.
710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101
USA
www.stereotaxis.com
1-314-678-6100 (*Stereotaxis — US*)
0031.75.77.133.13 (*Stereotaxis — EU*)
1-314-678-6200 (*TeleRobotic Support Team — US*)



EDUSTAJA EY:SSÄ

MDSS
(Medical Device Safety Service GmbH)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Saksa



MAAHANTUOJA

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen
33 - Suite 123,
2595 AM The Hague
Netherlands



Patentit

Yhdysvaltain ja muita patenteja haettu.

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit

- Niobe® ja Cardiodrive® ovat Stereotaxis Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Odyssey Cinema™, Odyssey™ ja Navigant™ ovat Stereotaxis Inc:n tavaramerkkejä.

Tähän liittyvät asiakirjat

HDW-0193, Odyssey™ Käyttöopas; HDW-0207, Navigant™ Käyttöopas

Henkilöjen nimet, joihin tässä oppaassa viitataan

Henkilöjen, potilaiden, lääkärien ja muiden käyttäjien nimet, joita tässä asiakirjassa käytetään, ovat Homeroksen Odysseiasa esiintyvien kuvitteellisten nimien yhdistelmiä.

Kannen kuva

Kannen kuva ja vesileimat © 2010, 2023 Stereotaxis, Inc.

Sisältö

Yleiskatsaus	7
Käyttötarkoitus.....	7
Tarkoitettu Potilaspopulaatio.....	7
Tarkoitettut Käyttäjät.....	7
Varoitukset/varotoimet	7
Johdanto.....	8
<i>Odyssey Cinema</i>	8
<i>Odyssey Cinema</i>	8
Tekniset tiedot	8
Tämä käyttöopas.....	9
Grafiikat ja symbolit	9
Sanasto	12
Aloittaminen	13
Login screen (Kirjautumisnäkyvä)	14
Päävalikko	15
Viewerin ikkuna.....	16
Navigointivalikko.....	17
Viewerin valintapaneelit	18
Viewerin työkalurivi	19
Archiverin ikkuna	23
Archiverin valintapaneelit.....	24
Archiverin työkalurivi	27
Preferences (Omat asetukset) -ikkuna	31
Passportin ikkuna.....	33
Log Off (Uloskirjautuminen)	34
Liite A: Asennus	35
Hakemisto.....	41

Kuvaluettelo

Kuva 1 – <i>Odyssey Cineman</i> pikakuvake	13
Kuva 2 – Sovelluksen alustaminen	13
Kuva 3 – Kirjautumisnäkyvä	14
Kuva 4 – Kirjautumisikkuna	14
Kuva 5 – Päävalikko, jossa kursori on Viewer-painikkeen päällä	15
Kuva 6 – Viewerin ikkuna	16
Kuva 7 – Navigointivalikko	17
Kuva 8 – Näyttötilan vaihtopainike	17
Kuva 9 – Navigointipainike	17
Kuva 10 – Ikkunoi tu näyttö ja kokoruutu näyttö on merkitty oranssilla katkoviivalla. Näyttötila vaihdetaan näyttötilan vaihtopainikkeella (merkitty punaisella nuolella)	17
Kuva 11 – Viewerin valintapaneelit	18
Kuva 12 – Painikkeita, jotka eivät ole käytettävissä	19
Kuva 13 – Painikkeita, jotka ovat käytettävissä	19
Kuva 14 – Oletusnäyttö	21
Kuva 15 – Yhden suhde yhteen (1:1) -näyttö	21
Kuva 16 – Kokoruutu näyttö	21
Kuva 17 – Yhden suhde yhteen -näyttö ja kokoruutu näyttö	21
Kuva 18 – Viewerin aikajana – suora videokuva	21
Kuva 19 – Viewerin aikajana – väliaikaisen videotallenteen katsominen	21
Kuva 20 – Esimerkkejä aikajanan pituuden ylittävistä tallenteista	22
Kuva 21 – Archiverin ikkuna	23
Kuva 22 – Archiverin valintapaneelit	24
Kuva 23 – Lajitteluperustepainikkeet	24
Kuva 24 – Toimenpidetiedot tulevat esiin, kun siirrät kursorin luettelossa olevan toimenpiteen päälle.	25
Kuva 25 – Toimenpideluettelon ohjauspaneeli	25
Kuva 26 – Toimenpidetiedot ja Muokkaa toimenpidetietoja -painike	26
Kuva 27 – Toimenpidetietojen muokkauspaneeli ja -painike	26
Kuva 28 – Archiverin työkalurivi yhteyttä luotaessa: kolme painiketta on käytettävissä	27
Kuva 29 – Archiverin työkalurivi, kun yhteys on luotu: suurin osa painikkeista on käytettävissä	27
Kuva 30 – Archiverin työkalurivin yläpuolella olevat ilmaisimet	27
Kuva 31 – Archiverin aikajana – vasen pää	29
Kuva 32 – Archiverin aikajana – oikea pää	29
Kuva 33 – Lisää kirjanmerkki -painike	30
Kuva 34 – Kirjanmerkin kuvaus	30
Kuva 35 – Uusi kirjanmerkki	30
Kuva 36 – Kursori kirjanmerkin päällä	30
Kuva 37 – Valittu kirjanmerkki (jota on napsautettu)	30
Kuva 38 – Muokkaa kirjanmerkkiä -painike ja kirjanmerkin kuvaus	30
Kuva 39 – Poista kirjanmerkki -painike	30
Kuva 40 – Omat asetukset -ikkuna ja sovelluksen asetukset	31
Kuva 41 – Siirry eteenpäin -painike	31
Kuva 42 – Siirry taaksepäin -painike	31
Kuva 43 – Passportin ikkuna	33

Kuva 44 – Navigointivalikko, jonka lopussa on Log Off (Uloskirjautuminen) -painike (oikealla) sekä päävalikko ja Log Off (Uloskirjautuminen) -painike	34
Kuva 45 – Asentaminen – ensimmäinen näkymä.....	35
Kuva 46 – Asentaminen – mukautetut asetukset.....	36
Kuva 47 – Asentaminen – edellytykset: Java Runtime Environment	36
Kuva 48 – Asentaminen – asentaa.....	37
Kuva 49 – Asentaminen – asennus on valmis	37
Kuva 50 – Asennusikkuna – ensimmäinen näkymä	38
Kuva 51 – Ensimmäinen kirjautumisikkuna	39
Kuva 52 – Tavallinen kirjautumisikkuna	39
Kuva 53 – Työpöydällä näkyvä pikakuvake	39
Kuva 54 – Aloitusvalikon pikakuvakkeet	40
Kuva 55 – Kirjautuminen ikkunoituun näyttöön	40
Kuva 56 – Kirjautuminen kokoruutunäyttöön.....	40

Yleiskatsaus

Käyttötarkoitus

Odyssey Cinema™ on ohjelma, jonka avulla voidaan katsoa etänä Odyssey™ Workstationilla tehtyjä suoria ja tallennettuja toimenpiteitä.

Tarkoitettu Potilaspopulaatio

Odyssey Cinema -järjestelmän tarkoitettu potilaspopulaatio on potilaat, joille tehdään diagnostisia ja interventiotoinenpiteitä seuraavilla alueilla: sydämen oikea ja vasen puoli sekä sepelvaltimot, perifeerinen verisuonisto ja neurovaskulaariset rakenteet.

Tarkoitettut Käyttäjät

Odyssey Cinema -järjestelmää saavat käyttää vain pätevät terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat saaneet kattavan koulutuksen laitteen käyttöön.

Varoitukset/varotoimet

VAROITUS: Yhdysvaltojen liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

VAROITUS: *Odyssey Cinema* a saavat käyttää vain laitteen toimintaan asianmukaisesti perehtyneet terveydenhuollon ammattilaiset.

VAROITUS: *Odyssey Cinema* on tarkoitettu ainoastaan potilaan tilan seuraamiseen.

Navigant™-laitteen käyttöoppaassa ja Niobe®-magneettinavigointijärjestelmän käyttöoppaassa kerrotaan kaikki magneettinavigointiin liittyvät varoitukset ja varotoimet.

Johdanto

Odyssey Cinema

Odyssey Cinema on *Odyssey*-tuotteen valinnainen lisäosa. Se sisältää seuraavat toiminnot:

- Suoran *Odyssey*-videon arkistointi – käyttäjä voi nauhoittaa suoran *Odyssey*-toimenpiteen ja tallentaa sen arkistopalvelimelle myöhemmin katsottavaksi.
- Suoran *Odyssey*-videon katsominen – käyttäjä voi seurata *Odyssey*-toimenpidettä etänä reaaliaikaisesti.
- Arkistoidun videon katsominen – käyttäjä voi katsoa aiemmin tallennettua (arkistoitua) *Odyssey*-videota.

Suoraa videota voi katsoa

- paikan päällä tai etänä
- tavallisella tietokoneella ja *Odyssey Cinema*-ohjelmalla, jonka käyttöohjeet kerrotaan tässä oppaassa.

Odyssey Cinema

Odyssey Cinema avulla lääkärit voivat tallentaa omia *Odyssey*-toimenpiteitään ja katsoa niitä myöhemmin, seurata toisten lääkäreiden tekemiä *Odyssey*-toimenpiteitä suorana ja katsoa suoria *Odyssey*-toimenpiteitä etänä omassa sairaalassaan.

*Cinema Client*illä voit

- seurata laboratoriossa tehtävää toimenpidettä
- seurata yhteistyöverkostoon kuuluvien lääkäreiden ja sairaaloiden toimenpiteitä
- katsoa aiemmin tehtyjä toimenpiteitä
- avustaa apulaislääkäreiden koulutuksessa antamalla heidän seurata useiden eri toimenpidehuoneitten tapauksia samalla, kun he ovat mukana yhdessä toimenpiteessä
- koostaa arkistoiduista tapauksista koulutusvideon.

Tekniset tiedot

*Odyssey Cinema Client*in selaimen tulee olla Internet Explorer 7 tai uudempi. Muita selaimia ei tueta.


Tämä käyttöopas


Odyssey Cinema käyttöoppaassa kerrotaan, miten *Odyssey Cinema* -ohjelmaa (*Cinema viewer*) käytetään. *Odyssey Workstationin* käyttöoppaassa kerrotaan, miten *Cineman* tallennustoimintoa käytetään laboratoriossa.

Odyssey Cinema käyttöoppaassa ei kerrota, miten *Odyssey Workstationia*, *Navigant Workstationia* tai muita välineitä käytetään laboratoriossa.

Grafiikat ja symbolit

Symboli	Nimi	Kuvaus
---------	------	--------

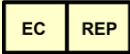Symboli	Nimi	Kuvaus
	Katso käyttöohjeet	Osoittaa, että käyttäjän on tarkistettava asia käyttöohjeista.
	Virta	Ilmaisee virran tilan.
	Vaihtovirta	Osoittaa arvokilvessä, että laite soveltuu käytettäväksi vain vaihtovirralla; osoittaa asiaankuuluvat liittimet.
	Tasavirta	Osoittaa arvokilvessä, että laite soveltuu käytettäväksi vain tasavirralla; osoittaa asiaankuuluvat liittimet.
	Valmistaja	Tuotteen valmistajan nimi ja osoite.
	Edustaja Euroopassa	Valtuutetun edustajan nimi ja osoite Euroopan yhteisössä.
	Luettelonumero	Osoittaa valmistajan luettelonumeron, jonka perusteella lääkinnällinen laite voidaan yksilöidä.
	Maahantuoja	Osoittaa yrityksen, joka tuo lääkinnällisen laitteen maahan.
	Lääkinnällinen laite	Osoittaa, että kyseessä on lääkinnällinen laite.
	Var försiktig	Osoittaa, että käyttäjän on tarkistettava käyttöohjeista tärkeät varoittavat tiedot, kuten varoitukset ja varotoimet, joita ei voida eri syistä esittää itse lääkinnällisessä laitteessa.
	CE-merkki	Tuote on Euroopan unionin lääkintälaitedirektiivin 93/42/EEC mukainen ja täyttää asiaankuuluvat

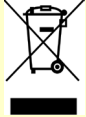Symboli	Nimi	Kuvaus
		terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Jos merkinnän yhteydessä on numero, vaatimustenmukaisuus on tarkistettu.
	Valmistuspäivämäärä	Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistuspäivämäärän.
	Vain lääkärin määräyksestä	Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain rajoitusten mukaan tätä laitetta saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.
	Kierrätettävä: sähkölaite	Osoittaa, että kyseessä on sähkölaite, jonka kierrätykseen sovelletaan Euroopan unionin direktiiviä 2002/96/EC sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.
	Katso käyttöopas/ohjelehtinen	Osoittaa, että käyttöopas/ohjelehtinen on luettava.
	Sarjanumero	Osoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka perusteella tietty lääkinnällinen laite voidaan yksilöidä.
	Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa	Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) asuva henkilö, joka toimii Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisen valmistajan puolesta Yhdistyneen kuningaskunnan säännösten mukaisesti valmistajan velvollisuuksiin liittyvissä asioissa.

Sanasto

Tässä asiakirjassa saatetaan käyttää seuraavia termejä:

Termi	Kuvaus
<i>Navigant</i>-navigointityöasema	Stereotaxisin <i>Navigant</i> -navigointityöasema on ohjelmistosovellusten tuotealusta, joka on suunniteltu yksinkertaistamaan työntekoa. Se helpottaa katetrointi- ja elektrofysiologisten laboratorioden toimintojen yhdistämistä sekä parantaa lääkintälaitteiden magneettinavigoinnin automaatiota.
<i>Niobe</i>-magneettinavigointijärjestelmä	Stereotaxisin <i>Niobe</i> -magneettinavigointijärjestelmän avulla lääkäri voi ohjata katetrin, ohjainlangan tai muun magneettisen lääkintälaitteen verisuonten sekä sydämen kammioden kautta tarkasti hoidettavaan kohtaan.
<i>Odyssey Cinema</i>	<i>Odyssey Cineman</i> tavallisessa tietokoneessa toimiva selainohjelma, joka toimii <i>Odyssey Cineman</i> käyttäjien integroituna käyttöliittymänä.
<i>Odyssey Network</i>	<i>Odyssey</i> -järjestelmät yhdistävä yksityinen maailmanlaajuinen verkosto, joka mahdollistaa etäkatsomisen ja asiakastuen.
<i>Odyssey Network Center</i>	Kutsutaan myös ”puhelinpalvelukeskukseksi” (Call Center). Stereotaxisin toimitila, jossa asiakkaille asennettuja <i>Odyssey</i> -ohjelmia voidaan seurata ja hallita etänä. <i>Odyssey Network Center</i> tarjoaa asiakastukea, järjestää koulutusta sekä hallinnoi verkkoa.

Aloittaminen

Stereotaxisin edustaja tai joku työpaikkasi IT-osastolta on asentanut *Odyssey Cinema* koneeseesi ja luonut pikakuvakkeen työpöydälle. Jos näin ei ole, katso [Liite A: Asennus](#).


Käynnistä *Cinema* kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta. *Cinema* avautuu Internet Exploreriin.



Kuva 1 – Odyssey Cineman pikakuvake

- ★ **Huomaa:** *Odyssey Cinema* on yhteensopiva vain Internet Explorer 7:n tai sitä uudemman version kanssa (muuta selaimia ei tueta).

Ohjelman latautuessa tietokoneen ruudulla näkyy pieni viestiruutu, jossa lukee "Painting application..." (Sovelluksen alustaminen)

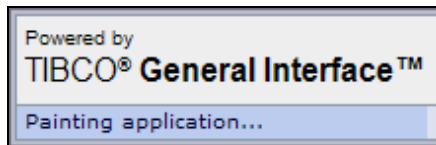

Kuva 2 – Sovelluksen alustaminen

Kirjautumisnäkymät.


- ★ **Huomaa:** Selain kannattaa suurentaa, jotta kirjautumisikkuna näkyisi hyvin.

Login screen (Kirjautumisnäkymä)



Kuva 3 – Kirjautumisnäkymä

Kirjoita kirjautumisikkunan User Name -kenttään käyttäjätunnus ja Password-kenttään salasana, jotka sait ohjelman asentaneelta henkilöltä. Napsauta **Log in (Kirjaudu)** -painiketta tai paina **Enter**.

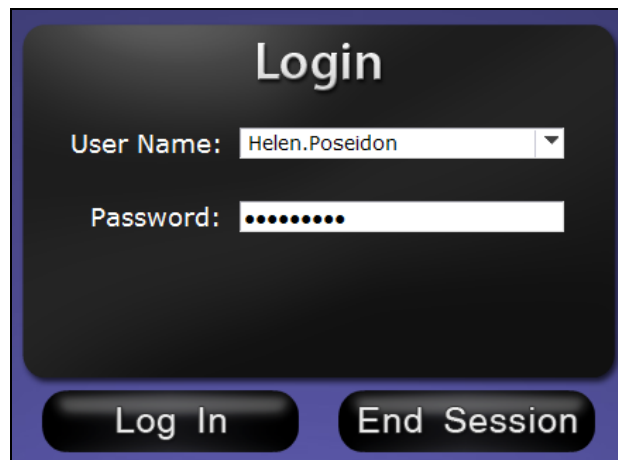

Kuva 4 – Kirjautumisikkuna

★ **Huomaa:** Jos kirjautumisikkunassa on Client Name -tekstikenttä, asennus ei ole valmis. Ota yhteyttä IT-tukeen saadaksesi Client Name -tunnuksen (katso [Liite A: Asennus](#)). Kun asennus on valmis, Client Name -kentän ei pitäisi myöhemmissä kirjautumisissa enää tulla näkyviin.

Päävalikko

Kirjaututtuasi ohjelmaan näkyviin tulee päävalikko, jossa on neljä vaihtoehtoa ja Log Off (Uloskirjautuminen) -painike.




Kuva 5 – Päävalikko, jossa kursori on Viewer-painikkeen päällä

Päävalikon neljä vaihtoehtoa:

- **Viewer (Katseluohjelma)** – tätä kautta pääsee katsomaan suoraa videota valitulta työasemalta.
- **Passport (Tiedotusohjelma)** – *Odyssey* Networkin käyttäjien uutissivusto.
- **Archiver (Arkisto-ohjelma)** – tätä kautta pääsee katsomaan valituilla työasemilla tallennettuja videoita.
- **Preferences (Omat asetukset)** – Viewerin ja Archiverin asetusten säätäminen.
- **Log Off (Uloskirjautuminen)** – Uloskirjautumisen jälkeen näkyviin tulee kirjautumismäkymä.

Viewerin ikkuna

Kun valitset [päävalikosta](#) tai [navigointivalikosta](#) **Viewer**, näkyviin tulee Viewerin ikkuna, jossa on useita perusominaisuuksia.

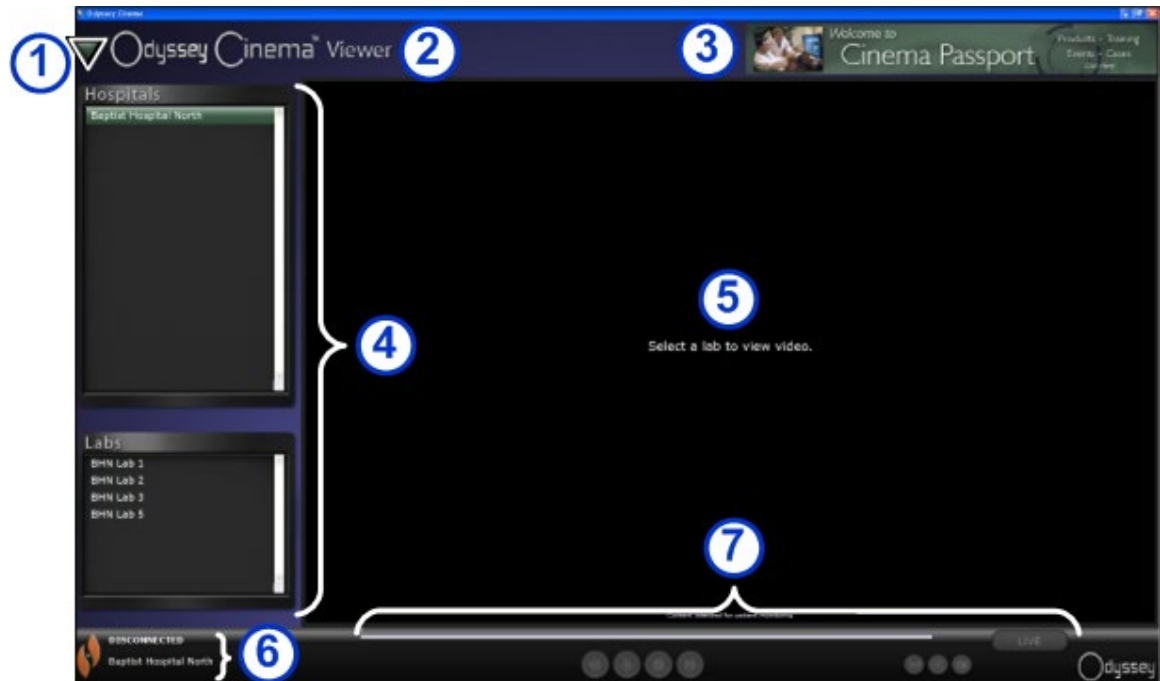

Kuva 6 – Viewerin ikkuna


Viewerin ikkunan opaste

- ① **[Navigointipainike](#).** Kolmion muotoista vihreää painiketta napsauttamalla saat esiin [navigointitoiminnon](#) [pudotusvalikon](#) ja neljä pääikkunaa, päävalikon ja uloskirjautumisen. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ② **Ikkunan nimiö.** Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ③ **Cinema Passportin banneri.** Näyttää uutisia *Odyssey Cineman* käyttäjille. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ④ **[Valintapaneelit](#):** Hospitals (Sairaalat) ja labs (laboratoriot). Valitse ensin sairaala ja sen jälkeen siellä sijaitseva laboratorio.
- ⑤ Katselualue. Valitsemasi laboratorion *Odyssey*-työasema näkyy tässä.
- ⑥ **[Yhteyden tila sekä sairaalan ja laboratorion nimi](#).** Tässä paneelissa näkyvät valitun sairaalan nimi ja yhteyden tila, esimerkiksi Connected (Yhdistetty) tai Disconnected (Ei yhteyttä).
- ⑦ **[Viewerin työkalurivi](#) ja [aikajana](#).** Tässä paneelissa ovat aikajana sekä työkalurivin painikkeet:
 - Siirry taaksepäin
 - Toisto/tauko (tilanvaihtopainike)
 - Pysäytys
 - Siirry eteenpäin
 - Yhden suhde yhteen -näyttö
 - Näyttötilan vaihto
 - Kuvakaappaus
 - Suora (tilapainike)

Navigointivalikko

Kun napsautat navigointipainiketta, näkyviin tulee navigointivalikko, jossa on kuusi vaihtoehtoa. Pääset haluamaasi toimintoon napsauttamalla sen nimeä.

- Viewer (Katseluohjelma) (ikkuna)
- Archiver (Arkisto-ohjelma) (ikkuna)
- Passport (Tiedotusohjelma) (ikkuna)
- Preferences (Omat asetukset) (ikkuna)
- Main menu (Päävalikko)
- Log off (Uloskirjautuminen)

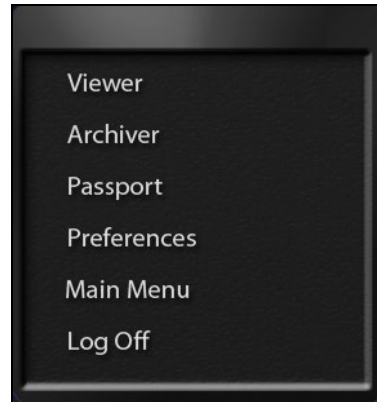

Kuva 7 – Navigointivalikko


★ **Huomaa:** Jos katsot videota kokoruutunäytössä, sinun on mentävä takaisin ikkunoituun näyttöön napsauttamalla Näyttötilan vaihtopainiketta Viewerin työkalurivissä, ennen kuin voit käyttää navigointipainiketta. Kuva 10 ja seuraava opaste esittelevät tarkemmin näitä näyttötiloja.



Kuva 8 – Näyttötilan vaihtopainike



Kuva 9 – Navigointipainike

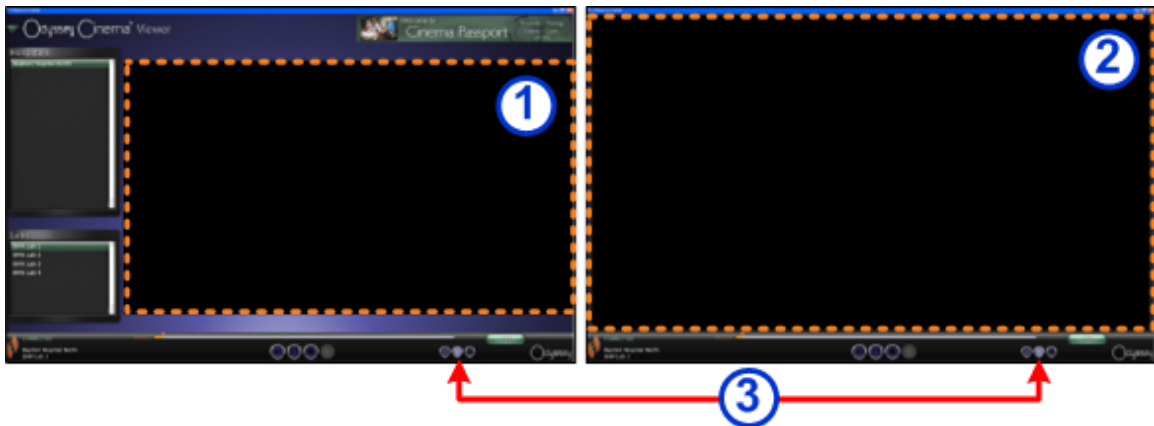


Kuva 10 – Ikkunoitu näyttö ja kokoruutunäyttö on merkitty oranssilla katkoviivalla. Näyttötila vaihdetaan näyttötilan vaihtopainikkeella (merkitty punaisella nuolella).

Viewerin näyttötilat

- ① **Ikkunoitu näyttö:** Ikkunoidussa näytössä katsomisalue on pienempi, koska banneri ja valintapaneelit ovat näkyvissä. Tämä on oletusnäkymä.
- ② **Kokoruutunäyttö:** Katsomisalue on suurimmillaan.
- ③ **Näyttötilan vaihtopainike:** Työkalurivin toisen painikeryhmän keskimmäinen painike. Voit siirtyä yhdestä näyttötilasta toiseen tätä painiketta napsauttamalla.

Viewerin valintapaneelit

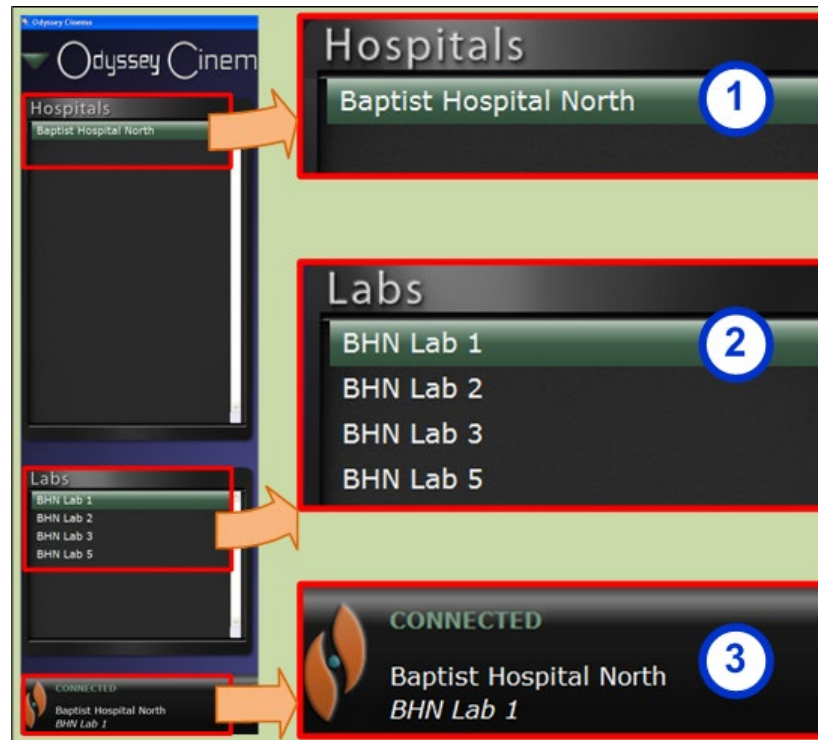

Kuva 11 – Viewerin valintapaneelit

Viewerin valintapaneelien opaste

- ① **Hospitals (Sairaalat).** Valitse sairaala (jos niitä on useampia kuin yksi. Oletussairaala on luettelossa ensimmäisenä.)
- ② **Labs (Laboratoriot).** Valitse sairaalan laboratorio.
- ③ **Yhteyden tila sekä sairaalan ja laboratorion nimi.**

Yhteyden tila: Tila on Disconnected (Ei yhteyttä), kunnes laboratorio on valittu. Kun olet valinnut laboratorion, seuraavat ilmoitukset tai jotkin niistä voivat tulla näkyviin peräkkäin.

- Disconnected (Ei yhteyttä) – laboratorioon ei ole yhteyttä.
- Authorizing (Valtuuttaa) – tämä tila näkyy vain käyttäjille, jotka tarvitsevat luvan saadakseen yhteyden laboratorioon. *Odyssey*-laboratoriossa oleva käyttäjä näkee, että pyydät valtuutusta.
- Connecting (Yhteyttä muodostetaan) – yhteyttä laboratorioon muodostetaan.
- Connected (Yhdistetty) – yhteys laboratorioon on muodostettu.
- Denied (Kielletty) – tämä tila näkyy vain käyttäjille, jotka tarvitsevat luvan saadakseen yhteyden laboratorioon. *Odyssey*-laboratoriossa oleva käyttäjä ei ole antanut lupaa muodostaa yhteyttä.
- Disconnecting (Yhteys katkaistaan) – yhteys laboratorioon katkaistaan. Yhteytesi *Odyssey Cinema* Clientiin tai *Odyssey*-laboratorioon voidaan katkaista. (Kun haluat itse katkaista yhteyden, napsauta pysäytyspainiketta.)

Sairaalan ja laboratorion nimi: Kun yhteys on muodostettu, sairaalan ja laboratorion nimi näkyvät tilaviestin alla.


Viewerin työkalurivi

Painikkeet näkyvät Viewerin työkalurivissä sen mukaan kuin niitä tarvitaan. Seuraavat painikkeet esimerkiksi eivät ole käytettävissä, ennen kuin olet valinnut laboratorion:



Kuva 12 – Painikkeita, jotka eivät ole käytettävissä

Kun yhteys on muodostettu, jotkin painikkeet tulevat näkyviin (Siirry eteenpäin -painike tulee näkyviin, kun napsautat Siirry taaksepäin -painiketta tai taukopainiketta):

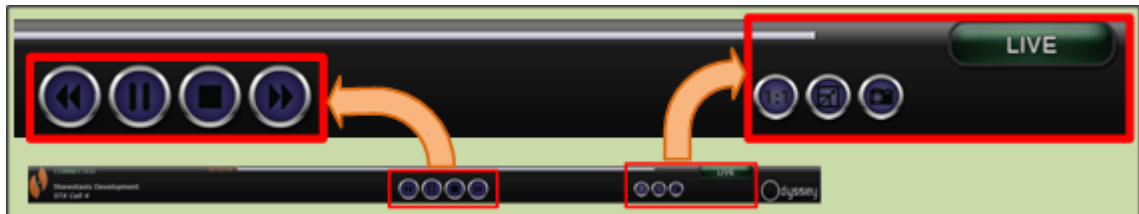

Kuva 13 – Painikkeita, jotka ovat käytettävissä


Viewerin painikkeet

Painike	Kuvaus	
	Siirry taaksepäin	Siirtää videota taaksepäin Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.
	Tauko/toisto	Tämän painikkeen avulla voi vaihdella tauon ja toiston välillä.
	Pysäytys ja yhteyden katkaisu	Pysäyttää videovirran. Ruudulle ilmestyy kehote, jossa lukee: "Video will no longer be available. (Video ei ole enää käytettävissä.) Continue?" (Jatketaanko?) Vastausvaihtoehdot ovat OK ja Cancel (Peruuta) . Jos napsautat OK , et voi enää katsoa suoraa videolähetystä. Yhteyden tilasta kertovaan kenttään tulee teksti Disconnected (Ei yhteyttä).
	Siirry eteenpäin	Siirtää videota eteenpäin Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.


Painike	Kuvaus	
	Live (Suora)	- Kun painike on kirkkaan vihreä, katsot toimenpidettä suorana. - Kun painike on tummanvihreä, yhteys on luotu, mutta et katso suoraa videota. Tummanvihreää painiketta napsauttamalla pääset katsomaan suoraa videokuvaa. - Kun painike on musta, yhteyttä ei ole.
	Yhden suhde yhteen -näyttö	Videokuvan pikseliresoluutio on 1:1 eli sama kuin <i>Odyssey</i> -laboratoriossa. (Katso Kuva 15.)
	Kokoruutunäyttö	Laajentaa videokuvan koko ruudun kokoiseksi, jolloin yläkehys ja navigointipainike eivät enää näy. Kun napsautat painiketta uudelleen, yläkehys ja navigointipainike tulevat näkyviin. (Katso Kuva 16.)
	Yhden suhde yhteen -näyttö ja kokoruutunäyttö	Yhdistää yhden suhde yhteen -näytön ja kokoruutunäytön. Tässä tilassa katselualue on suurimmillaan. (Katso Kuva 17.)
	Kuvakaappaus	Ottaa kuvan nykyisestä näkymästä. Ruudulle avautuu Windowsin "Save As" (Tallenna nimellä) -valintaikkuna, jotta voit valita hakemiston, jonne tallennat kaapatun kuvan.

Erilaiset näytöt


Viewer avautuu oletusasetuksena olevaan perusnäkymään. Erilaiset näytöt – Yhden suhde yhtein -näyttö , Kokoruutunäyttö sekä Yhden suhde yhtein -näyttö ja kokoruutunäyttö , esitellään vastaavan painikkeen yhteydessä kohdassa Viewerin painikkeet.

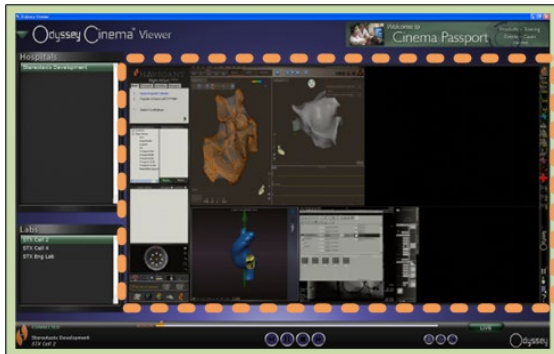


Kuva 14 – Oletusnäyttö

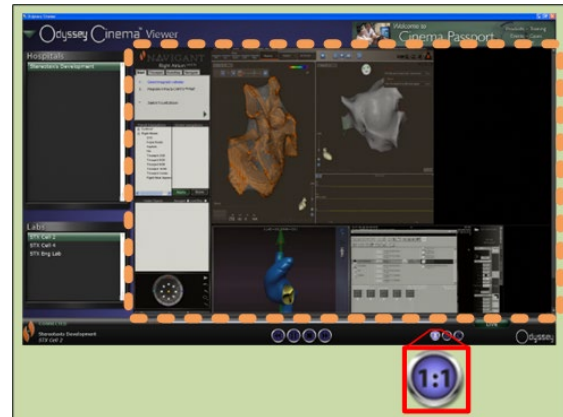

Kuva 15 – Yhden suhde yhtein (1:1) -näyttö

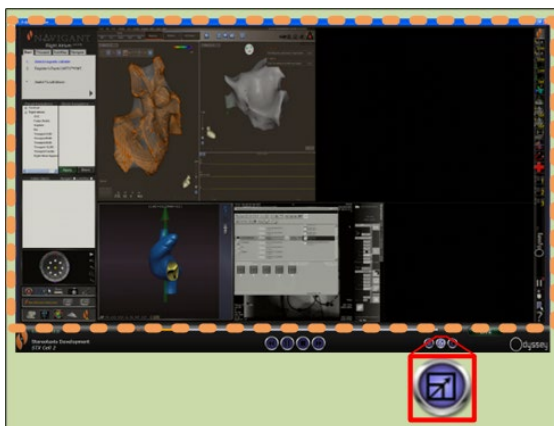

Kuva 16 – Kokoruutunäyttö

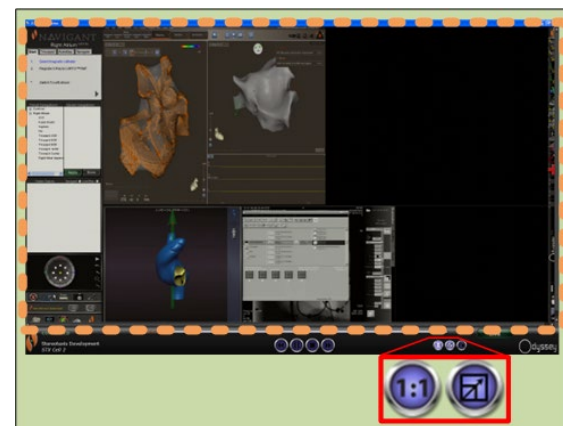

Kuva 17 – Yhden suhde yhtein -näyttö ja kokoruutunäyttö

Viewerin aikajana

Viewerin aikajana näyttää, kuinka kauan suoraa videota on näytetty. Kulunut aika näytetään tunteina, minuutteina ja sekunteina (TT:MM:SS). Oranssi osoitin näyttää, missä kohdassa suoraa videota katsoja on parhaillaan, oranssi palkki puolestaan näyttää nauhoituksen koko keston. Viewer tallentaa suorat toimenpiteet väliaikaiseen tallennuspaikkaan, joten voit katsella nauhoitettuja osuuksia samalla, kun jatkat tallentamista. Toiminto on hyvin samanlainen kuin television digitaalisissa tallentimissa (DVR, PVR).



Kuva 18 – Viewerin aikajana – suora videokuva



Kuva 19 – Viewerin aikajana – väliaikaisen videotallenteen katsominen

Väliaikaista tallennetta pääset katsomaan vetämällä oranssin osoittimen vasemmalle siihen kohtaan janaa, josta haluat aloittaa katsomisen, tai napsauttamalla Siirry taaksepäin -painiketta. Kun vapautat osoittimen tai napsautat Siirry taaksepäin -painiketta, tallennettua videota aletaan näyttää heti valitusta ajankohdasta alkaen. Kun [Live \(Suora\)](#)-painike muuttuu tummanvihreäksi, katsot väliaikaisesti tallennettua videota. Pääset takaisin suoraan toimenpiteeseen Live-painiketta napsauttamalla. Painike muuttuu kirkkaan vihreäksi, kun katsot taas suoraa toimenpidettä.

Aika, jonka verran video siirtyy eteen- tai taaksepäin vastaavaa painiketta painettaessa, säädetään Preferences (Omat asetukset) -ikkunan kohdassa Application Settings (Sovelluksen asetukset). Jos video asetetaan siirtymään yhdellä painalluksella alle 60 sekuntia, oranssin osoittimen liikkuminen ei ehkä näy. Ajan kuluminen näkyy kuitenkin laskimesta (TT:MM:SS).

Aikajana kattaa pisimmillään tilapäistallenteen edeltävät neljä tuntia. Jos tallennus kestää yli neljä tuntia, aikajana alkaa poistaa pätkiä tallenteen alkupäästä järjestääkseen tilaa ylimääräiselle tallenteelle.



Kuva 20 – Esimerkkejä aikajanauksen pituuden ylittävistä tallenteista

Kuva 20 havainnollistaa asiaa:

- Ensimmäisessä aikajanassa Viewer on tallentanut 4 tuntia videokuvaa. Käyttäjä voi katsoa kaikki neljä tuntia.
- Toisessa aikajanassa Viewer on tallentanut 4 tuntia ja 45 minuuttia. Viewer on poistanut videon alkupäästä ensimmäiset 45 minuuttia. Käyttäjä voi katsella vain tallenteen 4 viimeistä tuntia.
- Kolmannessa aikajanassa Viewer on tallentanut 6 tuntia, 23 minuuttia ja 18 sekuntia. Viewer on poistanut videon ensimmäiset 2 tuntia, 23 minuuttia ja 18 sekuntia. Käyttäjä voi katsella vain tallenteen 4 viimeistä tuntia.

Archiverin ikkuna

Kun valitset [Päävalikossa](#) tai [Navigointivalikossa](#) Archiverin, näkyviin tulee ikkuna, jossa on useita perusominaisuuksia:




Kuva 21 – Archiverin ikkuna

Archiverin ikkunan opaste

- ① **Navigointipainike.** Kolmion muotoista vihreää painiketta napsauttamalla saat esiin [navigointitoiminnon](#) [pudotusvalikon](#) ja neljä pääikkunaa, päävalikon ja uloskirjautumisen. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ② **Ikkunan nimiö.** Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ③ **Cinema Passportin banneri.** Näyttää uutisia *Odyssey Cinema*n käyttäjille. Kun napsautat tätä, esiin tulee *Cinema Passportin* ikkuna. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
- ④ **Valintapaneelit:** Archivers (sairaala, jossa toimenpide on tallennettu) ja Procedures (toimenpiteet). Valitse sairaala ja tallennettu toimenpide.
- ⑤ **Katselualue.** Valitsemasi tallennettu toimenpide näkyy tässä.
- ⑥ **Tietoja toimenpiteestä.** Tässä paneelissa näkyy toimenpidettä koskevia tietoja, kuten sairaala, laboratorio, lääkäri ja potilas.
- ⑦ **Yhteyden tila, Archiverin työkalurivi ja aikajana.** Tässä paneelissa ovat yhteyden tila, työkalurivin painikkeet ja aikajana:
 - Yhteyden tila
 - Muokkaa toimenpidetietoja
 - Lisää kirjanmerkki
 - Muokkaa kirjanmerkkiä
 - Poista kirjanmerkki
 - Siirry taaksepäin
 - Toisto/tauko (tilanvaihto)
 - Pysäytys
 - Siirry eteenpäin
 - Yhden suhde yhteen -näyttö
 - Näyttötilan vaihto
 - Kuvakaappaus
 - Arkistointitilaviesti


Archiverin valintapaneelit

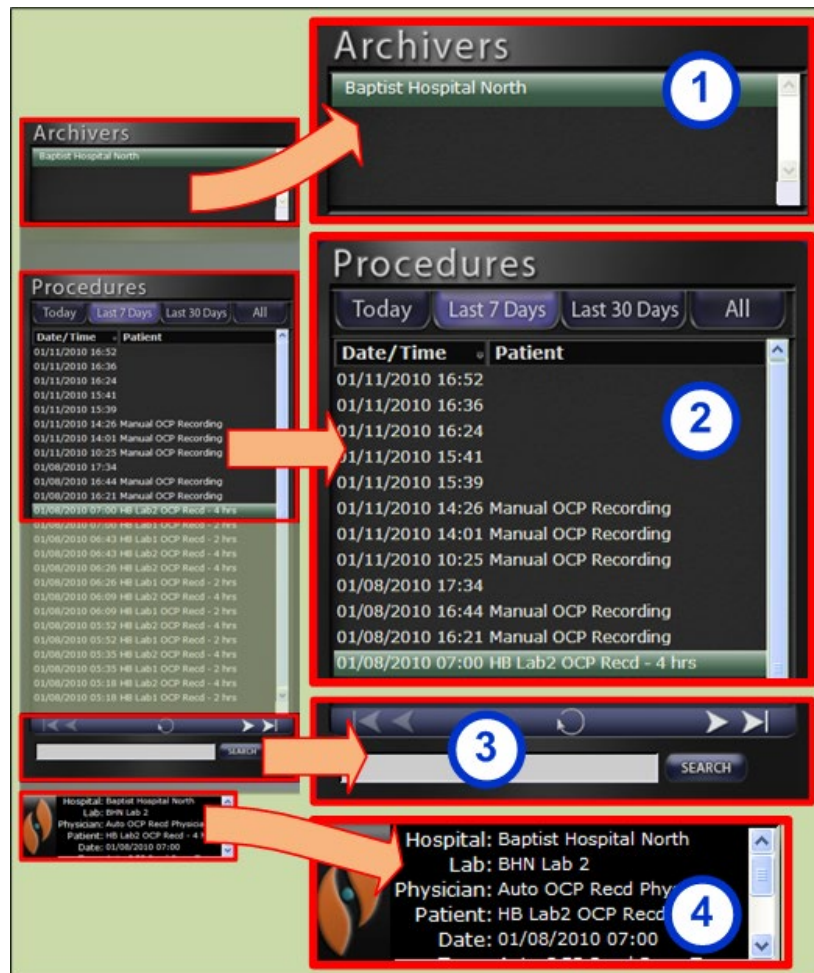

Kuva 22 – Archiverin valintapaneelit


Archiverin valintapaneelien opaste

- ① **Archivers (Sairaalat).** Valitse sairaala (jos niitä on useampia kuin yksi. Oletussairaala on luettelon ensimmäinen.)
- ② **Procedures (Toimenpiteet).** Toimenpiteiden lajitteluperusteita ovat Today (Tämä päivä), Last 7 Days (Edelliset 7 päivää), Last 30 Days (Edelliset 30 päivää) ja All (Kaikki). Oletusarvo Last 7 Days (Edelliset 7 päivää). Jonkin toisen lajitteluperusteen mukaisen luettelon saat esiin napsauttamalla lajitteluperustepainiketta. Mitä pitempi luettelo, sitä kauemmin sen lataaminen kestää.

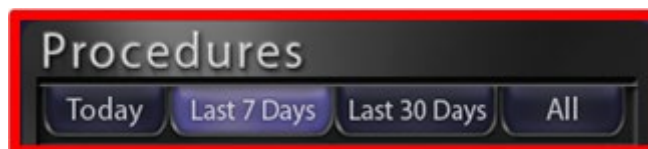

Kuva 23 – Lajitteluperustepainikkeet


Kun pidät kursoria toimenpiteen kohdalla, sitä koskevat tiedot näkyvät ponnahdusikkunassa.

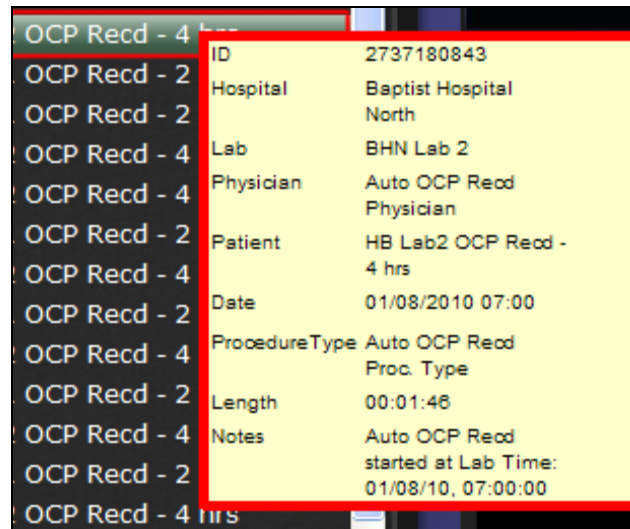

Kuva 24 – Toimenpidetiedot tulevat esiin, kun siirrät kursorin luettelossa olevan toimenpiteen päälle.

Kun olet valinnut toimenpiteen, tallenne näytetään oikealla olevassa katselualueessa.


- ③ **Toimenpideluettelon ohjauspaneeli.** Ohjauspaneelissa on neljä navigointipainiketta, päivityspainike ja hakukenttä.

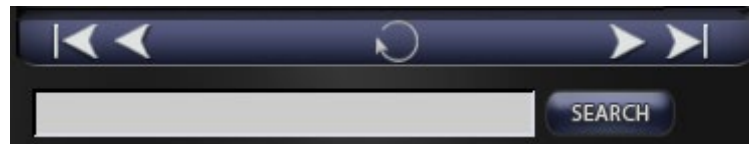

Kuva 25 – Toimenpideluettelon ohjauspaneeli


Ohjauspaneelin painikkeet

Painike	Nimi	Kuvaus
	Ensimmäinen sivu	Tätä painiketta napsauttamalla pääset valitun toimenpideluettelon alkuun.
	Edellinen sivu	Edellinen sivu -painiketta painamalla pääset luettelon edelliselle sivulle. Ensimmäinen sivu – ja Edellinen sivu -painikkeet eivät näy toimenpideluettelon ensimmäisellä sivulla.
	Seuraava sivu	Seuraava sivu -painiketta painamalla pääset luettelon seuraavalle sivulle.
	Viimeinen sivu	Viimeinen sivu -painiketta napsauttamalla pääset valitun toimenpideluettelon loppuun. Seuraava sivu – ja Viimeinen sivu -painikkeet eivät näy toimenpideluettelon viimeisellä sivulla.

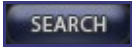Painike	Nimi	Kuvaus
	Päivitys	Päivityspainiketta napsauttamalla saat päivitettyä toimenpideluettelon, jolloin edellisen kirjautumisen jälkeen luodut toimenpiteet tulevat näkyviin.
	Search (Haku)	Kun haluat etsiä tiettyä toimenpidettä, kirjoita sen tunnistetiedot hakukenttään. Napsauta Search (Haku) . Hakukenttä tunnistaa isot ja pienet kirjaimet. Päivämäärää tai tallenteen kesto ei voi käyttää hakuehtona. Hakutulokset saat poistettua napsauttamalla mitä tahansa paneelin yläosassa olevaa painiketta.

④ **Toimenpidetiedot.** Tietopaneelia voi vierittää. Paneelissa näytettävät tiedot:


- Hospital (Sairaalan nimi)
- Lab (Laboratorion tunnus)
- Physician (Lääkärin nimi)
- Patient (Potilaan nimi)
- Date (Toimenpiteen päivämäärä)
- Type (Toimenpide)
- Notes (Toimenpidettä koskevat merkinnät)

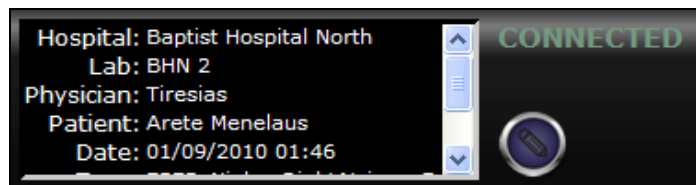

Kuva 26 – Toimenpidetiedot ja Muokkaa toimenpidetietoja -painike

Voit myös muokata toimenpidettä koskevia tietoja.

1. Napsauta Muokkaa toimenpidetietoja -painiketta (Kuva 27). Edit Procedure Info (Muokkaa toimenpidetietoja) -paneeli tulee näkyviin.
2. Muokkaa tietoja haluamallasi tavalla.
3. Napsauta **Save (Tallenna)**, kun haluat sulkea paneelin ja tallentaa muutokset. Napsauta **Cancel (Peruuta)**, kun haluat sulkea paneelin muutoksia tallentamatta.

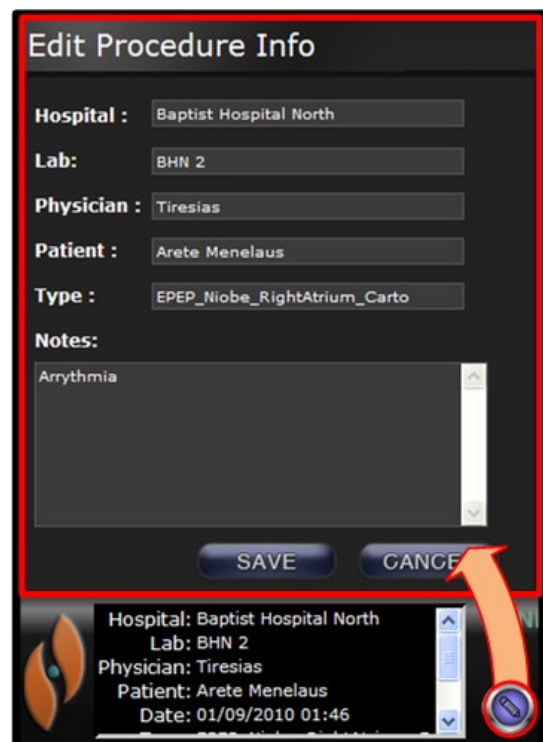

Kuva 27 – Toimenpidetietojen muokkauspaneeli ja-painike

Archiverin työkalurivi

Painikkeet näkyvät Archiverin työkalurivissä sen mukaan kuin niitä tarvitaan. Kun esimerkiksi yhteyttä ollaan luomassa, vain kolme painiketta on käytettävissä: Muokkaa toimenpidetietoja, Seis ja Näyttötilan vaihto.



Kuva 28 – Archiverin työkalurivi yhteyttä luotaessa: kolme painiketta on käytettävissä


Kun napsautat Toista-painiketta, yhteys luodaan ja toisto aloitetaan. Yhteyden tilasta kertova teksti CONNECTED (YHDISTETTY) muuttuu vihreäksi, ja kaikki muut painikkeet paitsi Muokkaa kirjanmerkkiä ja Poista kirjanmerkki ovat käytössä. Kun valitset kirjanmerkin, kirjanmerkkipainikkeita voi käyttää.



Kuva 29 – Archiverin työkalurivi, kun yhteys on luotu: suurin osa painikkeista on käytettävissä

Archiverin ilmaisimet

Kun yhteys on luotu (toistettavaan) tallenteeseen, työkalurivin yläpuolella näkyy viisi erilaista ilmaisinta.

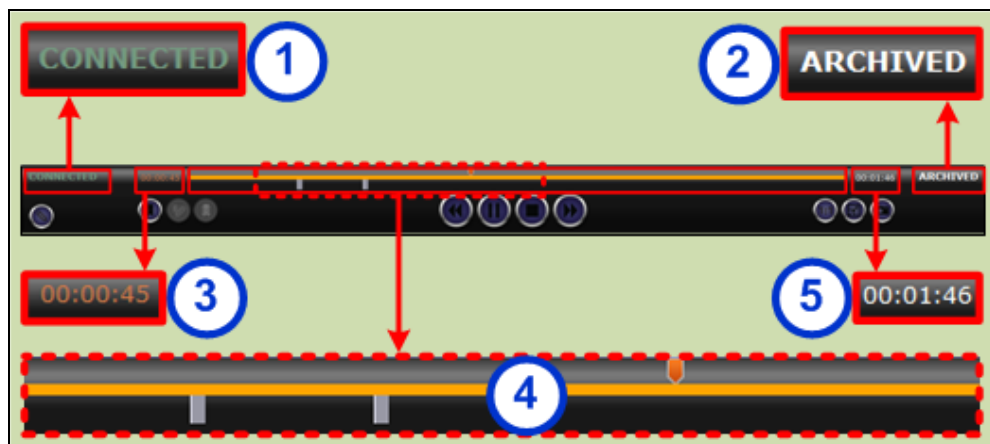

Kuva 30 – Archiverin työkalurivin yläpuolella olevat ilmaisimet

Archiverin ilmaisimien opaste

- ① **Yhteyden tila.** Yhteys voi olla: Disconnected (Ei yhteyttä), Connecting (Yhteyttä muodostetaan), Connected (Yhdistetty) tai Disconnecting (Yhteys katkaistaan).
- ② **Archived (Arkistoitu).** Toimenpide on tallennettu.
- ③ **Kulunut aika.** Aika, joka on kulunut siitä, kun videota alettiin toistaa (tunteina, minuutteina ja sekunteina).
- ④ **Aikajana.** Alue, jossa videon etenemisestä kertova oranssi osoitin liikkuu ja jossa voidaan luoda harmaita kirjanmerkkejä sekä päästä katsomaan niitä.
- ⑤ **Kokonaisaika.** Tallenteen kokonaisaika tunteina, minuutteina ja sekunteina.

Archiverin painikkeet

Painike	Nimi	Kuvaus
	Muokkaa toimenpidetietoja	Avaa tekstieditorin näytön vasempaan alakulmaan, toimenpidetietojen <i>yläpuolelle</i> . Kaikkia Edit Procedure Info (Muokkaa toimenpidetietoja) -ikkunan tekstikenttiä on mahdollista muokata.
	Lisää kirjanmerkki	Lisää kirjanmerkin katsomaasi videoon, joten voit myöhemmin palata samaan kohtaan uudelleen. Esiin tulee tekstikenttä, johon voit kirjoittaa kirjanmerkkiä koskevia merkintöjä. Kirjanmerkin ajankohta määräytyy silloin, kun napsautat Lisää kirjanmerkki -painiketta. Ajankohta tallennetaan yhtä aikaa kuin kirjanmerkin teksti.
	Muokkaa kirjanmerkkiä	Kun napsautat videon aikajanassa olevaa kirjanmerkkiä, Muokkaa kirjanmerkkiä – ja Poista kirjanmerkki -painikkeet aktivoituvat. Kun napsautat Muokkaa kirjanmerkkiä -painiketta, valitun kirjanmerkin kuvaus tulee näkyviin, ja voit muokata tekstiä.
	Poista kirjanmerkki	Kun napsautat videon aikajanassa olevaa kirjanmerkkiä, Muokkaa kirjanmerkkiä – ja Poista kirjanmerkki -painikkeet aktivoituvat. Kun napsautat Poista kirjanmerkki -painiketta, valittu kirjanmerkki poistetaan.
	Siirry taaksepäin	Siirtää videota taaksepäin Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.
	Tauko/toisto	Tämä painike on taukotilassa, kun videota toistetaan, ja toistotilassa, kun video on keskeytetty. Selitys: Kun katsot videota, voit keskeyttää videon tätä painiketta painamalla, ja kun video on keskeytetty, voit jatkaa katsomista samaa painiketta painamalla).
	Pysäytys	Pysäyttää videon.
	Siirry eteenpäin	Siirtää videota eteenpäin Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa säädettyjen asetusten mukaisesti.
	Archived (Arkistoitu).	Ilmaisee, että katselet aiemmin tallennettua ja arkistoitua toimenpidettä.

Painike	Nimi	Kuvaus
	Yhden suhde yhteen -näyttö	Videokuvan pikseliresoluutio on 1:1 eli sama kuin <i>Odyssey</i> -laboratoriossa.
	Näyttötilan vaihto	Laajentaa videokuvan koko ruudun kokoiseksi, jolloin yläkehys (ja navigointipainike) eivät enää näy. Kun napsautat painiketta uudelleen, yläkehys ja navigointipainike tulevat näkyviin.
	Kuvakaappaus	Otaa kuvan nykyisestä näkymästä. Ruudulle avautuu Windowsin "Save As" (Tallenna nimellä) -valintaikkuna, jotta voit valita hakemiston, minne tallennat kaapatun kuvan.

Archiverin aikajana

Archiverin aikajana näyttää, kuinka kauan videota on tallennettu. Kulunut aika näytetään tunteina, minuutteina ja sekunteina (TT:MM:SS). Oranssi osoitin näyttää kuluneen ajan, oranssi palkki puolestaan näyttää tallenteen koko keston.



Kuva 31 – Archiverin aikajana – vasen pää



Kuva 32 – Archiverin aikajana – oikea pää

Kun haluat katsoa tallennetta, vedä oranssi osoitin siihen kohtaan janaa, josta haluat aloittaa katsomisen, tai napsauta Siirry taaksepäin -painiketta. Kun vapautat osoittimen tai napsautat Siirry taaksepäin -painiketta, tallennettua videota aletaan näyttää heti valitusta ajankohdasta alkaen.

Aika, jonka verran video siirtyy eteen- tai taaksepäin vastaavaa painiketta painettaessa, säädetään [Preferences \(Omat asetukset\) -ikkunassa](#). Jos video asetetaan siirtymään yhdellä painalluksella alle 60 sekuntia, oranssin osoittimen liikkuminen ei ehkä näy. Ajan kulumisen näkee kuitenkin laskimesta (TT:MM:SS).

★ **Huomaa:** Kun tallenne on toistettu loppuun asti, Archiver lopettaa toiston automaattisesti ja katkaisee yhteyden. Kun napsautat Toista-painiketta, yhteys luodaan ja toisto aloitetaan uudelleen.

Kirjanmerkit

Kirjanmerkit ovat oikoteitä tallenteen aiempiin kohtiin. *Odyssey Workstationin* käyttäjä voi lisätä kirjanmerkkejä toimenpidettä tallentaessaan, ja *Odyssey Cinema* käyttäjä voi lisätä niitä katsellessaan arkistoituja tallenteita. *Odyssey Cinema* käyttäjät eivät kuitenkaan voi lisätä kirjanmerkkejä suoraan toimenpidettä katsoessaan.

Kirjanmerkin lisääminen


Voit lisätä kirjanmerkin napsauttamalla Lisää kirjanmerkki -painiketta, kun videota toistetaan tai toisto on keskeytetty. Kirjanmerkin ajankohta määräytyy silloin, kun napsautat Lisää kirjanmerkki -painiketta, ei silloin, kun kirjoitat kirjanmerkin kuvauksen ja napsautat **Save (Tallenna)**. (Kirjanmerkki tulee kuitenkin näkyviin *vasta* silloin, kun napsautat **Save (Tallenna)**).



Kuva 33 – Lisää kirjanmerkki -painike




Kuva 34 – Kirjanmerkin kuvaus

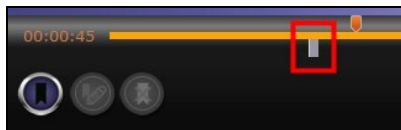

Kuva 35 – Uusi kirjanmerkki

Kirjanmerkin katsominen

Kun haluat tarkastella kirjanmerkkiä, pane kursori kirjanmerkin päälle. Kirjanmerkin kuvaus näkyy ponnahdusikkunassa. Kun napsautat kirjanmerkkiä, se muuttuu vihreäksi, oranssi osoitin siirtyy kirjanmerkin kohdalle ja tallennetta aletaan toistaa kirjanmerkin kohdasta. Toisto voi alkaa useitakin sekunteja ennen sitä ajankohtaa, jota kirjanmerkki osoittaa aikajanassa.

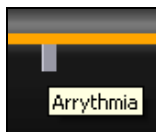


Kuva 36 – Kursori kirjanmerkin päällä



Kuva 37 – Valittu kirjanmerkki (jota on napsautettu)

Kirjanmerkin muokkaaminen

Kun haluat muokata kirjanmerkkiä, napsauta ensin kirjanmerkkiä ja sen jälkeen Muokkaa kirjanmerkkiä -painiketta. Bookmark Description (Kirjanmerkin kuvaus)-kenttä tulee näkyviin. Muokkaa tekstiä ja napsauta **Save (Tallenna)**.

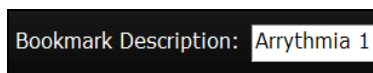

Kuva 38 – Muokkaa kirjanmerkkiä -painike ja kirjanmerkin kuvaus

Kirjanmerkin poistaminen


Kun haluat poistaa kirjanmerkin, napsauta ensin kirjanmerkkiä ja sen jälkeen Poista kirjanmerkki -painiketta. Kirjanmerkki poistetaan.



Kuva 39 – Poista kirjanmerkki -painike

Preferences (Omat asetukset) -ikkuna

Preferences (Omat asetukset) -ikkunassa voit säätää Viewerin ja Archiverin ominaisuuksia. Valitsemasi asetukset pysyvät kaikissa tulevissa Viewer- ja Archiver-istunnoissa, kunnes muutat niitä.

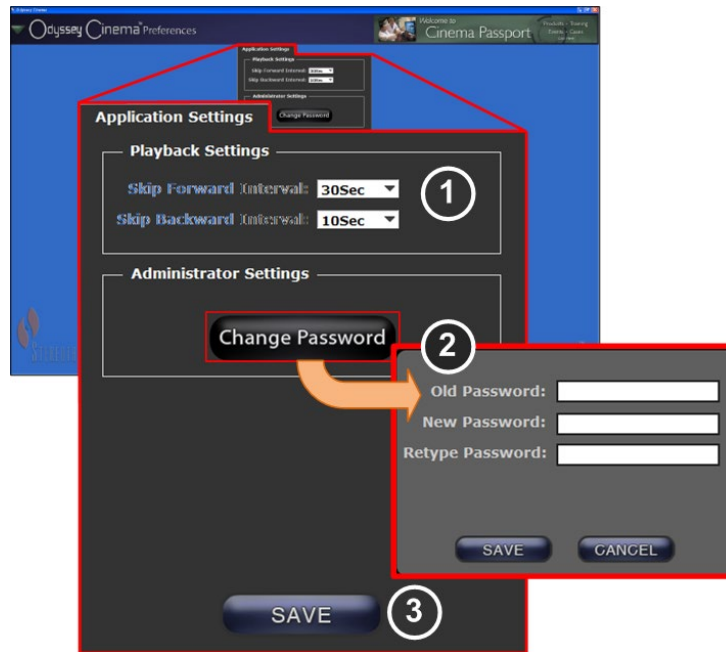

Kuva 40 – Omat asetukset -ikkuna ja sovelluksen asetukset

Preferences (Omat asetukset) ja Application Settings (Sovelluksen asetukset) -ikkunan opaste

① **Playback Settings (Toiston asetukset).** Voit säätää *Odyssey Cinemalla* tallennettavien videoiden asetuksia. Asetuksilla vaikutetaan Siirry eteenpäin – ja Siirry taaksepäin – painikkeiden toimintaan Viewerissa ja Archiverissa.

- **Skip Forward Intervals (Eteenpäin siirtymisväli).** Voit valita, minkä verran video siirtyy kerralla eteenpäin, kun Siirry eteenpäin -painiketta painetaan. Napsauta kentän oikealla puolella olevaa nuolta, niin pääset valikkoon, jossa voit valita ajan. Oletus on 30 sekuntia; voit valita ajanjakson 1 sekunnin ja 1 tunnin väliltä.
- **Skip Backward Interval bTaaksepäin siirtymisväli).** Voit valita, minkä verran video siirtyy kerralla taaksepäin, kun Siirry taaksepäin -painiketta painetaan. Napsauta kentän oikealla puolella olevaa nuolta, niin pääset valikkoon, jossa voit valita ajan. Oletus on 10 sekuntia; voit valita ajanjakson 1 sekunnin ja 1 tunnin väliltä.



Kuva 41 – Siirry eteenpäin -painike



Kuva 42 – Siirry taaksepäin -painike


② **Change Password (Vaihda salasana).** Kun napsautat tätä painiketta, salasanaikkuna tulee näkyviin:

- **Old Password (Vanha salasana):** Kirjoita salasana, jota käytit kirjautuessasi meneillään olevaan istuntoon.
- **New Password (Uusi salasana):** Kirjoita uusi salasana. Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä, joista ainakin yhden on oltava iso kirjain, yhden pieni kirjain ja yhden numeerinen merkki.
- **Retype Password (Kirjoita salasana uudelleen):** Varmenna uusi salasana kirjoittamalla se uudelleen.
- **Save / Cancel (Tallenna/Peruuta):** **Save (Tallenna)** -painiketta painamalla tallennat muutokset ja valintaikkuna sulkeutuu. **Cancel (Peruuta)** -painiketta painamalla suljet ikkunan muutoksia tallentamatta.

③ **Save (Tallenna):** Tallentaa kaikki sovelluksen asetuksiin tehdyt muutokset ja sulkee valintaikkunan.

Passportin ikkuna

Passportissa on mielenkiintoisia erityisalan tietoja *Odyssey Cineman* käyttäjille.

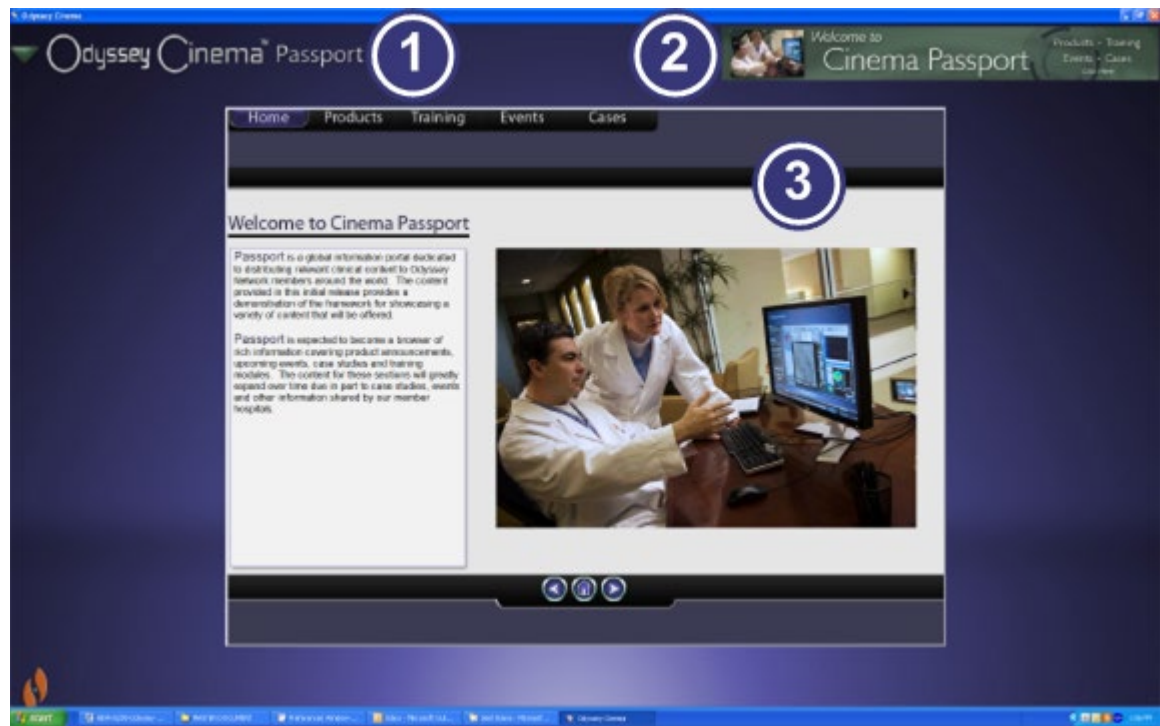

Kuva 43 – Passportin ikkuna

Passportin ikkunan opaste

- ① **Ikkunan nimiö.** Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
 - ② **Banneri.** Uutisia *Odyssey Cineman* käyttäjille. Näkyy kaikissa ikkunoissa paitsi Viewerin ja Archiverin kokoruutunäytössä.
 - ③ **Selain.** Yksityiskohtaisia tietoja *Odyssey Cineman* käyttäjille.
- ★ **Huomaa:** Passport tarjoaa tietoja *Odyssey Networkista*, sen kautta ei pääse Internetiin.

Log Off (Uloskirjautuminen)

Ohjelmasta voi kirjautua ulos päävalikon tai jokaisella sivulla olevan navigointivalikon kautta.



Kuva 44 – Navigointivalikko, jonka lopussa on Log Off (Uloskirjautuminen) -painike (oikealla) sekä päävalikko ja Log Off (Uloskirjautuminen) -painike

Liite A: Asennus


Jos asennat *Odyssey Cinema* itse (sen sijaan, että Stereotaxisin edustaja tai työpaikkasi IT-osasto huolehtisi ohjelman asennuksesta), noudata seuraavia vaihteita.



Tärkeää: Ota yhteyttä Stereotaxisin edustajaan, ennen kuin asennat *Odyssey Cinema* pöytäkoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. Edustaja antaa valtuutuksen ohjelman käyttöön *Cinemassa* ja varmistaa, että


- tietokone ja verkon yhteys ovat *Odyssey Cineman* vaatimusten mukaiset,
- asennus ei ylitä asemien määrälle asetettua ylärajaa.

1. Kirjaudu tietokoneeseen pääkäyttäjän valtuuksin.
2. Pane *Odyssey Cinema*-ohjelman CD koneen CD-asemaan.
3. Avaa Client Installer -asennuskansio.
4. Käynnistä *Odyssey Cinema* Client Setup.exe -asennusohjelma. Asennuksen aloitusikkuna avautuu.
5. Napsauta **Next (Seuraava)**, niin asennus jatkuu.

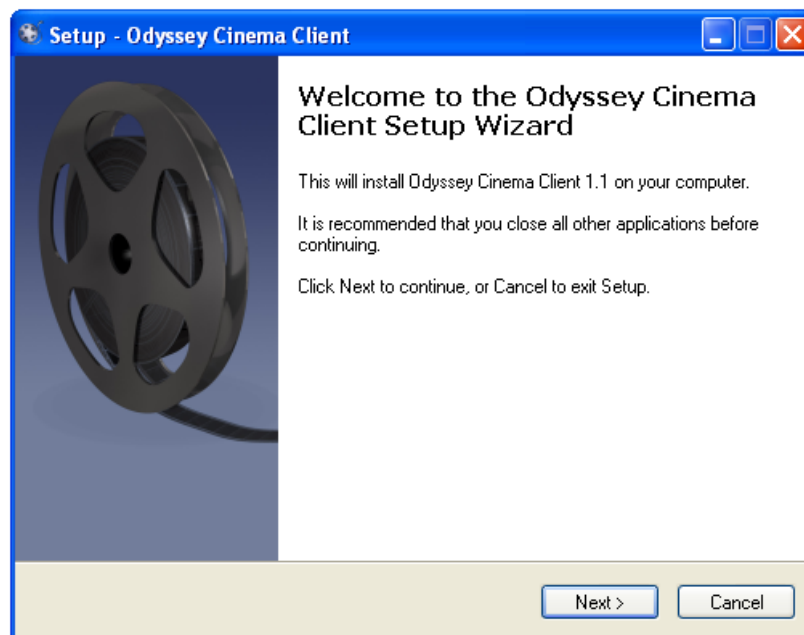


Kuva 45 – Asentaminen – ensimmäinen näkymä

6. Kirjoita Management Server IP Address -kenttään *Odyssey Cinema* Management -palvelimen IP-osoite ja Client Name -kenttään tietokoneelle annettu nimi. Ne saat Stereotaxisin edustajalta tai verkon ylläpitäjältä.
7. Napsauta **Next (Seuraava)**, niin asennus jatkuu.

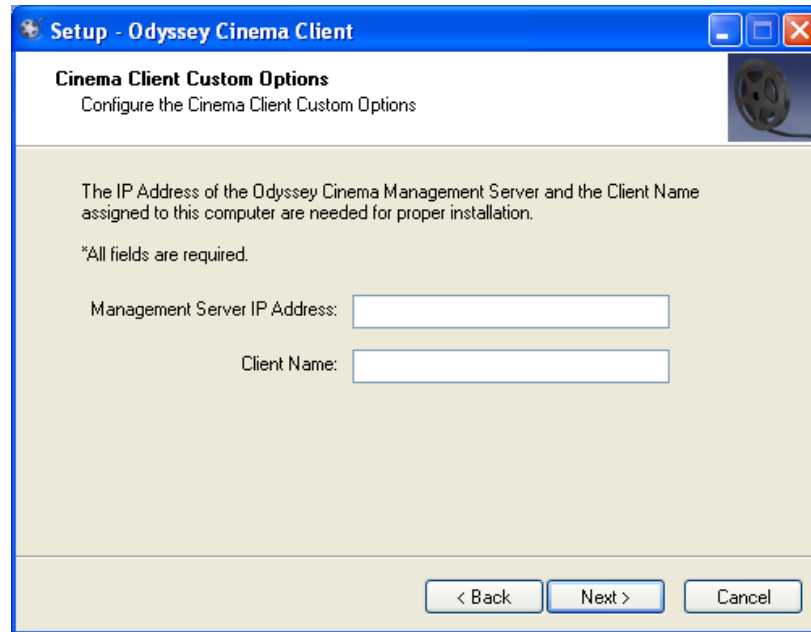


Kuva 46 – Asentaminen – mukautetut asetukset

8. Jos tietokoneeseesi ei ole asennettu Java Runtime Environmentia (JRE), näkyviin tulee ikkuna, jossa kerrotaan, että JRE asennetaan koneeseen. Jos JRE on jo asennettu, näkyviin tulee asennusikkuna.
9. Kun napsautat **Next (Seuraava)**, JRE:n asennus jatkuu.

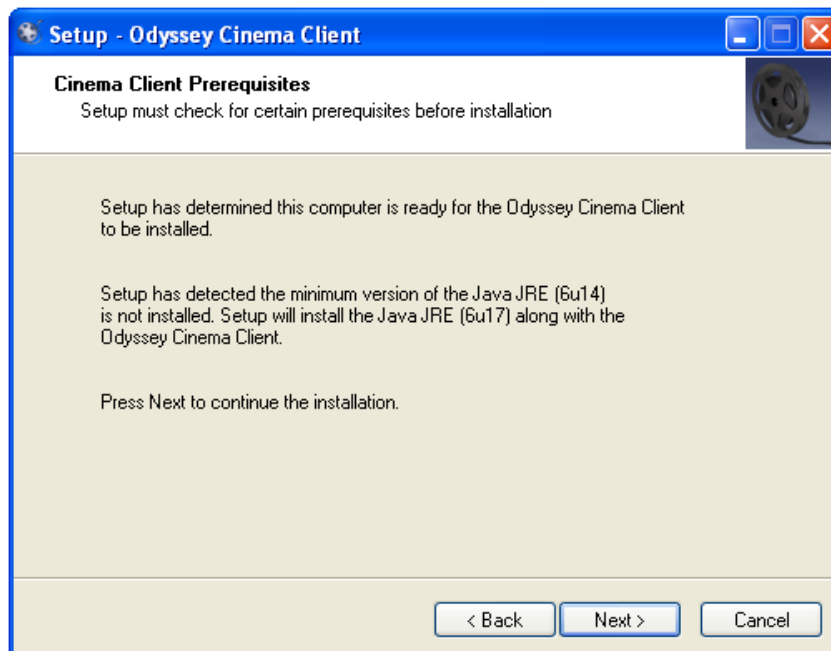

Kuva 47 – Asentaminen – edellytykset: Java Runtime Environment

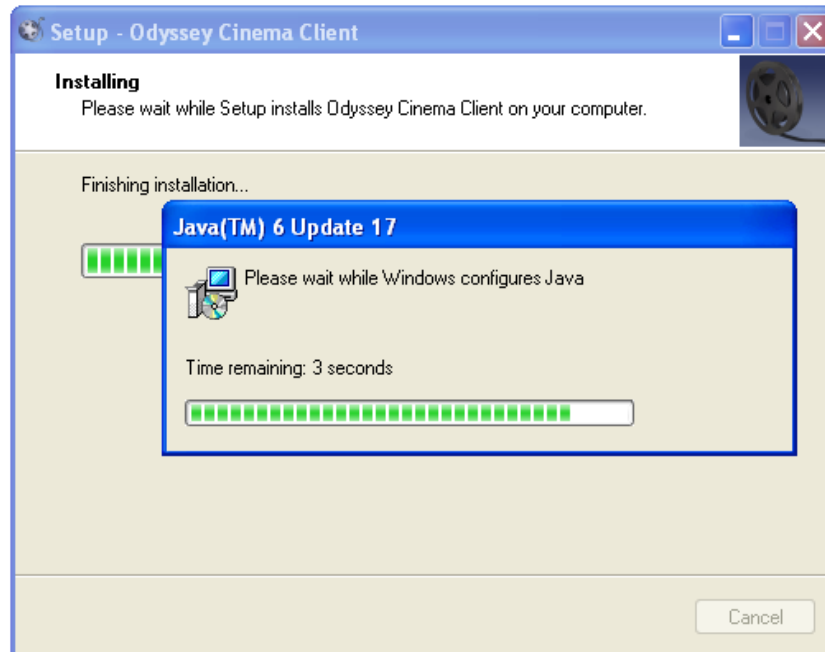

Kuva 48 – Asentaminen – asentaa


10. Asennuksen valmistuttua näytölle tulee viesti "Completed the *Odyssey Cinema Client* Setup Wizard" (*Odyssey Cinema Client*in ohjattu asennusohjelma on valmis). Napsauta **Finish (Lopeta)** niin asennusohjelma sulkeutuu ja *Odyssey Cinema Client* käynnistyy (Launch the *Odyssey Cinema Client* now (Käynnistä *Odyssey Cinema Client* nyt) -valintaruutu on valittu valmiiksi).



Kuva 49 – Asentaminen – asennus on valmis


11. *Odyssey Cinema Client* on nyt asennettu. Käynnistä ohjelma.

12. Kun ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, näyttöön saattaa avautua varoitusikkuna: "The application's digital signature cannot be verified." (Ohjelman digitaalista allekirjoitusta ei voida varmentaa.) Napsauta "Always trust content..." (Luota aina tämän julkaisijan sisältöön)-tekstin vasemmalla puolella olevaa valintaruutua, niin tätä varoitusta ei enää näytetä.

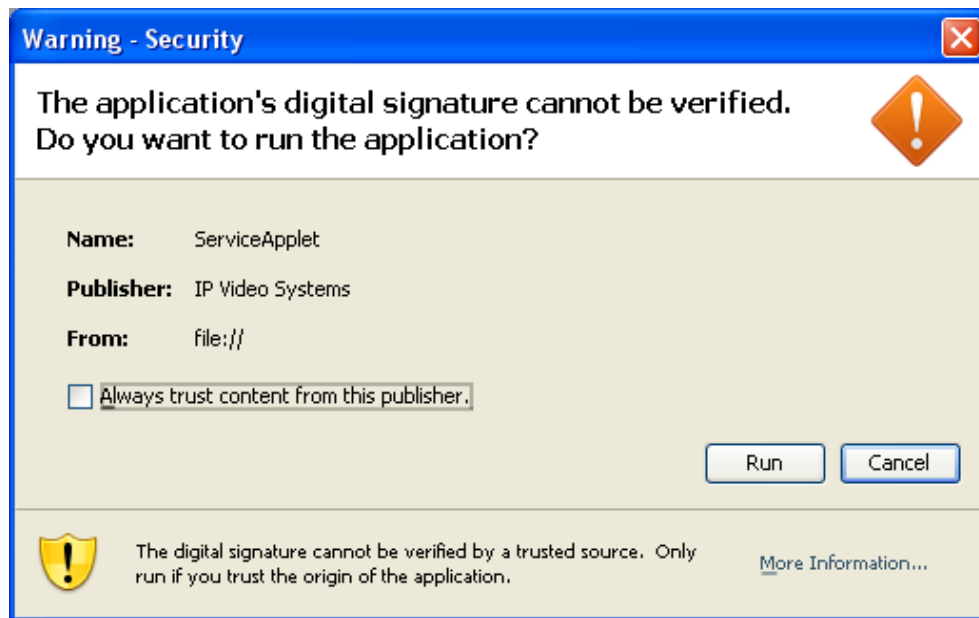


Kuva 50 – Asennusikkuna – ensimmäinen näkymä

13. Kun Client käynnistyy, kirjaudu ohjelmaan kirjoittamalla User Name -kenttään käyttäjätunnuksesi Password-kenttään salasanasi ja Client Name -kenttään koneelle annettu nimi, niin varmistat, että asennus on onnistunut ja verkon yhteys toimii.
- ★ **Huomaa:** Ohjelmaan on kirjauduttava aina, kun se käynnistetään. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä on kirjoitettava käyttäjätunnus, salasana ja tietokoneellesi annettu Client Name. Seuraavilla kerroilla tarvitsee kirjoittaa vain käyttäjätunnus ja salasana. Seuraavissa kuvissa ovat ensimmäinen kirjautumisikkuna ja tavallinen kirjautumisikkuna.

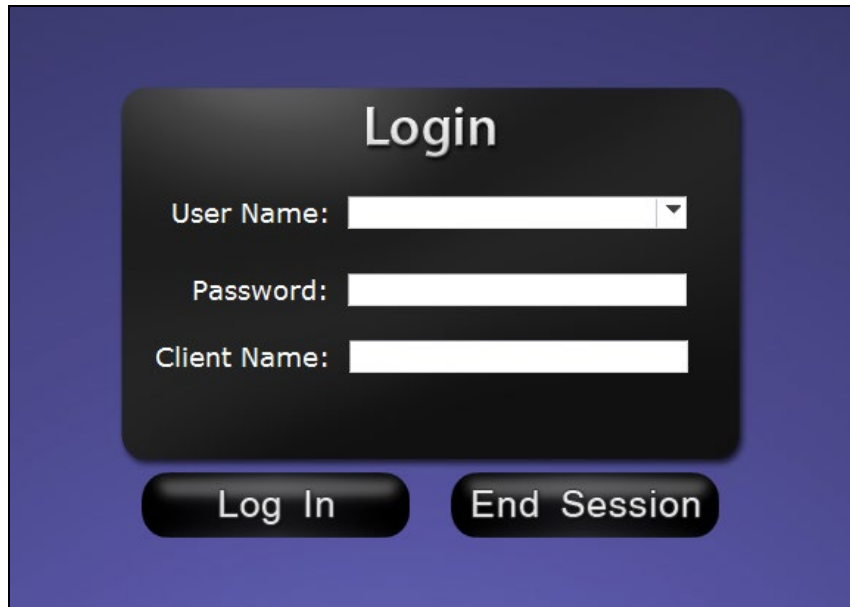

Kuva 51 – Ensimmäinen kirjautumisikkuna

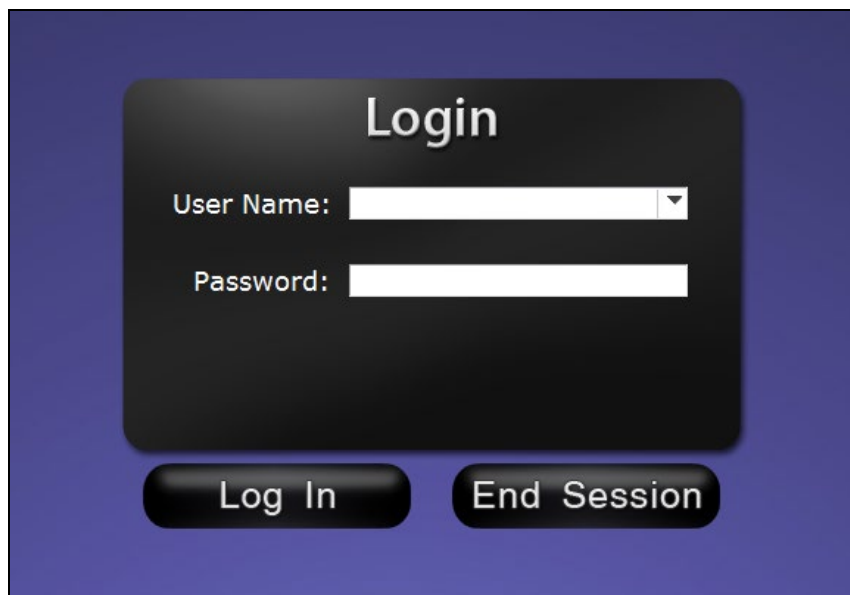


Kuva 52 – Tavallinen kirjautumisikkuna

Asennuksen yhteydessä työpöydälle lisätään *Odyssey Cineman* pikakuvake. Pikakuvakkeen kautta *Cinema* käynnistyy oletuksena olevassa ikkunoidussa tilassa.



Kuva 53 – Työpöydällä näkyvä pikakuvake

Asennuksen jälkeen myös Windowsin aloitusvalikossa on kaksi pikakuvaketta. Niistä ensimmäisen kautta *Odyssey Cinema* avautuu ikkunoituna. Toisen kuvakkeen kautta ohjelma avautuu kokoruutunäyttöön.

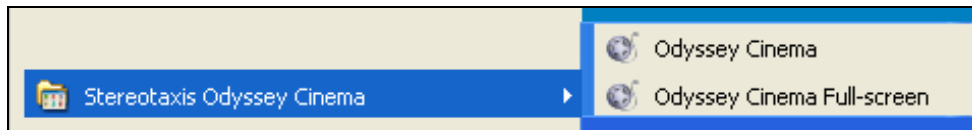

Kuva 54 – Aloitusvalikon pikakuvakkeet



Kuva 55 – Kirjautuminen ikkunoituun näyttöön



Kuva 56 – Kirjautuminen kokoruutunäyttöön

Hakemisto

Aloittaminen.....	13	sanasto	12
Aloitusvalikko.....	40	Niobe-magneettinavigointijärjestelmä	
Archiver		sanasto	12
aikajana	29	<i>Odyssey Cinema</i>	8
ikkuna	23	Odyssey Cinema Client	8
ikkunan opaste.....	23	sanasto	12
ilmaisimet	27	Odyssey Network	
ilmaisimien opaste	27	sanasto	12
painikkeet	28	Odyssey Network Center	
työkalurivi	27	sanasto	12
valintapaneelien opaste	24	Ohjauspaneelin painikkeet	25
valintapaneelit	24	Ohjelman digitaalinen allekirjoitus	38
Asennus	35	Omien asetusten opaste	31
Call Center.....	12	Päävalikko	15
Change Password (Vaihda salasana).....	32	Passportin ikkuna	33
Client Name	38, 39	Passportin ikkunan opaste	33
Edellytykset-näyttö	36	pikakuvake	39
EDUSTAJA EY		Playback Settings (Toiston asetukset).	31
SSÄ	ii	Preferences (omat asetukset) -ikkuna.....	31
Erilaiset näytöt	21	Salasana	38, 39
Eteenpäin siirtyminen.....	31	Sanasto	9, 12
Ikkunoitu näyttö	40	Sisältö	iv
Java Runtime Environment	36	Sovelluksen asetusten opaste	31
Johdanto	8	Taaksepäin siirtyminen	31
JRE	36	Tämä käyttöopas	9
Käyttäjätunnus	39	Tekniset tiedot.....	8
Käyttötarkoitus	7	Työpöydällä näkyvä pikakuvake	39
Kirjanmerkit	29	Varoitukset/varotoimet	7
Kirjanmerkki		Viewer	
katsominen.....	30	aikajana	21
lisääminen	30	ikkuna	16
muokkaaminen	30	ikkunan opaste	16
poistaminen	30	navigointivalikko	17
Kirjautumisenäkymä	14	näyttötilat	17
Kokoruutunäyttö.....	40	painikkeet	19
Kuvaluettelo	v	työkalurivi	19
Liite A: Asennus.....	35	valintapaneelien opaste.....	18
Log Off (Uloskirjautuminen)	34	valintapaneelit	18
Navigant-navigointityöasema		Yleiskatsaus	7