



# Cinema

## Kullanıcı Kılavuzu



710 N. Tucker Blvd  
Suite 110  
St. Louis, MO 63101 USA  
1-866-646-2346  
1-314-678-6100  
[www.stereotaxis.com](http://www.stereotaxis.com)

Made In USA

© Stereotaxis 2010, 2023



## Stereotaxis ile İletişim

---

Stereotaxis, Inc.  
710 N. Tucker Blvd  
Suite 110  
St. Louis, MO 63101  
USA

314-678-6100  
31.20.654.1957  
[www.stereotaxis.com](http://www.stereotaxis.com)

## Avrupa Yetkili Temsilcisi

---

MDSS  
(Medical Device Safety Service GmbH)  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Almanya



## İthalatçı

---

MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen  
33 - Suite 123,  
2595 AM The Hague  
Netherlands



## Patentler

---

ABD ve beklemedeki diğer patentler.

## Ticari Markalar ve Tescilli Ticari Markalar

---

- *Niobe* ve *Cardiodrive*, Stereotaxis, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- *Odyssey Cinema*, *Navigant*, Stereotaxis, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

## İlgili belgeler

---

HDW-0193, *Odyssey* Kullanıcı Kılavuzu; HDW-0207, *Navigant* Kullanıcı Kılavuzu

## Bu kılavuzda referans verilen bireylerin adları

---

Bu belgede referans verilen hasta, hekim ve diğer kullanıcıların adları, Homeros'un "Odyssey" (Odise) adlı destanından alınmış kurgusal adlardır.

## Kapak resmi

---

Kapak resmi ve filigranlar © 2010, 2022 Stereotaxis, Inc.

## İçindekiler

<b>Genel Bakış</b> .....	<b>6</b>
Kullanım Amacı .....	6
Uyarılar/Önlemler .....	6
<b>Giriş</b> .....	<b>7</b>
<i>Odyssey Cinema</i> .....	7
<i>Odyssey Cinema</i> İstemci.....	7
Teknik Özellikler.....	7
Bu kullanıcı kılavuzu .....	8
Semboller ve grafikler.....	9
Sözlük .....	12
<b>Başlarken</b> .....	<b>13</b>
Login (Oturum açma) ekranı.....	14
Main menu (Ana menü).....	15
Viewer (Görüntüleyici) penceresi.....	16
Navigasyon menüsü.....	17
Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri .....	18
Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğu.....	19
Archiver (Arşivleyici) penceresi.....	23
Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri.....	24
Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu.....	27
Preferences (Tercihler) penceresi.....	31
Passport (Pasaport) penceresi.....	33
Oturumu Kapatma.....	34
<b>Ek A: Kurulum</b> .....	<b>35</b>
<b>Dizin</b> .....	<b>41</b>

## Şekiller Tablosu

Şekil 1 – <i>Odyssey Cinema</i> kısayolu .....	13
Şekil 2 – Painting application (Uygulama görüntüsü oluşturuluyor) .....	13
Şekil 3 – Login (Oturum açma) ekranı .....	14
Şekil 4 – Login (Oturum açma) iletişim kutusu .....	14
Şekil 5 – İmlecin Viewer (Görüntüleyici) düğmesinin üzerinde olduğu Main menu (Ana menü).....	15
Şekil 6 – Viewer (Görüntüleyici) penceresi .....	16
Şekil 7 – Navigasyon menüsü .....	17
Şekil 8 – Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi.....	17
Şekil 9 – Navigasyon düğmesi .....	17
Şekil 10 – Turuncu noktalı kutular her bir ekran türündeki görüntüleme alanlarını belirtir. Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi (kırmızı oklarla belirtilir), görünümleri değiştirir.....	17

Şekil 11 – Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri.....	18
Şekil 12 – Devre dışı bırakılmış düğme örnekleri.....	19
Şekil 13 – Etkinleştirilmiş (kullanılabilir) düğme örnekleri .....	19
Şekil 14 – Varsayılan standart görünüm.....	21
Şekil 15 – Bire bir (1:1) görünümü .....	21
Şekil 16 – Tam ekran görünümü.....	21
Şekil 17 – Bire bir ve tam ekran görünümü.....	21
Şekil 18 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – canlı video .....	21
Şekil 19 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – geçici video kaydını gözden geçirme .....	21
Şekil 20 – Viewer'da (Görüntüleyici) en uzun süreyi kapsayan zaman çizgileri örnekleri.....	22
Şekil 21 – Archiver (Arşivleyici) penceresi .....	23
Şekil 22 – Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri.....	24
Şekil 23 – Prosedür sıralama sekmeleri .....	24
Şekil 24 – Prosedür bilgilerini görüntülemek için, imleci bir prosedür listesinin üzerinde tutun. ....	25
Şekil 25 – Procedures (Prosedürler) kontrol paneli .....	25
Şekil 26 – Prosedür bilgileri paneli ve Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle) düğmesi .....	26
Şekil 27 – Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) paneli ve düğmesi .....	26
Şekil 28 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlanıyor: üç düğme görüntülenir .....	27
Şekil 29 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlantıyı değiştirme: düğmelerin çoğu görüntülenir.....	27
Şekil 30 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğunun yukarısındaki göstergeler .....	27
Şekil 31 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sol uç.....	29
Şekil 32 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sağ uç .....	29
Şekil 33 – Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesi .....	30
Şekil 34 – Bookmark description (Yer işareti açıklaması).....	30
Şekil 35 – New bookmark (Yeni yer işareti) .....	30
Şekil 36 – Yer işaretinin üzerinde imleç .....	30
Şekil 37 – Seçilen (tıklatılan) yer işareti .....	30
Şekil 38 – Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesi ve bookmark description (yer işareti açıklaması).....	30
Şekil 39 – Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesi .....	30
Şekil 40 – Application Settings'i (Uygulama Ayarları) içeren Preferences (Tercihler) Penceresi .....	31
Şekil 41 – İleri Gitme Düğmesi .....	31
Şekil 42 – Geri Gitme Düğmesi.....	31
Şekil 43 – Passport (Pasaport) penceresi .....	33
Şekil 44 – Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Navigasyon Menüsü (sağda); Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Main Menu (Ana Menü) .....	34
Şekil 45 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran .....	35
Şekil 46 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Custom Options (Özel Seçenekler) .....	36

Şekil 47 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Prerequisites (Önkoşullar): Java Runtime Environment .....	36
Şekil 48 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Installing (Kuruluyor) .....	37
Şekil 49 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Completed (Tamamlandı) .....	37
Şekil 50 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran .....	38
Şekil 51 – İlk login (oturum açma) iletişim kutusu.....	39
Şekil 52 – Sonraki standart login (oturum açma) iletişim kutusu.....	39
Şekil 53 – Masaüstü kısayolu .....	39
Şekil 54 – Start (Başlat) menüsü kısayolları .....	40
Şekil 55 – Pencereci modda Login (Oturum açma) ekranı .....	40
Şekil 56 – Tam ekran modunda Login (Oturum açma) ekranı .....	40

# Genel Bakış

## Kullanım Amacı

Odyssey Cinema™ İş İstasyonu ekranında canlı ve arşivlenmiş olguların uzaktan görüntülenmesini sağlayan bir ürün seçeneğidir.

## Uyarılar/Önlemler

**UYARI:** *Odyssey Cinema* yalnızca cihazın kullanımı konusunda kapsamlı eğitim almış, nitelikli tıbbi uzmanlar tarafından kullanılmalıdır.

**UYARI:** *Odyssey Cinema* kullanılarak görüntülenen video içeriği yalnızca hastayı izleme amaçlıdır.

Manyetik navigasyon ile ilişkili uyarı ve önlemlerin tam listesi için, Navigant™ Kullanıcı Kılavuzu'na ve Manyetik Navigasyon Sistemi Niobe® Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

# Giriş

## Odyssey Cinema

*Odyssey Cinema*, *Odyssey* ürünü için isteğe bağlı bir eklenti olarak sunulan bir üründür. Şu işlevleri sağlar:

- Canlı *Odyssey* videosunu arşivleme – *Cinema* kullanıcının canlı bir *Odyssey* prosedürünü kaydetmesine ve daha sonra görüntülemek için bir arşiv sunucusunda depolamasına olanak sağlar.
- Canlı *Odyssey* videosunu görüntüleme – *Cinema* kullanıcının bir *Odyssey* prosedürünü gerçek zamanlı olarak uzaktan görüntülemesine olanak sağlar.
- Arşivlenmiş videoyu görüntüleme – *Cinema* kullanıcının önceden kaydedilmiş (arşivlenmiş) *Odyssey* videosunu görüntülemesine olanak sağlar.

Canlı videoyu aşağıdaki şekillerde görüntüleyebilirsiniz:

- Yerel olarak aynı hastanede veya uzak bir yerden.
- Bu kullanıcı kılavuzunda açıklandığı gibi standart bir ofis PC'si ve *Odyssey Cinema* İstemcisi yazılımını kullanarak.

## Odyssey Cinema İstemci

*Odyssey Cinema* İstemci klinisyenlere, *Odyssey* prosedürlerini kaydedip geri oynatma, diğer klinisyenlerin canlı *Odyssey* prosedürlerini gözden geçirme ve hastaneleri içinde canlı *Odyssey* prosedürlerini uzaktan görüntüleme olanağı sağlar.

*Cinema* İstemci ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Laboratuarda canlı bir prosedürü görüntüleme.
- İş ilişkisi kurulmuş diğer klinisyenlerden ve kuruluşlardan olgular görüntüleme.
- Önceki prosedürleri gözden geçirme.
- Meslektaşların odalardan birini desteklerken birden çok prosedür odasındaki olguları gözden geçirmesine olanak sağlayarak onların eğitimine yardımcı olma.
- Personeli prosedür teknikleri konusunda eğitmek için bir kuruluşta arşivlenmiş olguların ana kümesini oluşturma.

## Teknik Özellikler

*Odyssey Cinema* İstemci için Internet Explorer 7 veya sonraki bir sürüm gerekir. Diğer tarayıcılar desteklenmez.

## Bu kullanıcı kılavuzu










*Odyssey Cinema* İstemci Kullanıcı Kılavuzu *Odyssey Cinema* İstemci yazılımının (*Cinema* görüntüleyicisi) nasıl kullanılacağını açıklar. *Odyssey İş İstasyonu* Kullanıcı Kılavuzu girişimsel laboratuarda *Cinema* kayıt kontrolünün nasıl kullanılacağını açıklar.



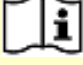

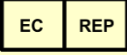

*Odyssey Cinema* İstemci Kullanıcı Kılavuzu *Odyssey İş İstasyonu*, *Navigant İş İstasyonu* veya diğer cihazların girişimsel bir laboratuarda nasıl kullanılacağını *açıklamaz*.



## Semboller ve grafikler

Symbol	Name	Description
--------	------	-------------

Symbol	Name	Description
	<b>Kullanım talimatlarına bakın</b>	Kullanıcının kullanım talimatlarına bakması gerektiğini belirtir.
	<b>Enerji</b>	Enerji durumunu gösterir.
	<b>Alternatif akım</b>	Anma değeri plakasında ekipmanın sadece alternatif akım için uygun olduğunu belirtmek için; ilgili terminalleri tanımlamak için.
	<b>Doğru akım</b>	Anma değeri plakasında ekipmanın sadece doğru akım için uygun olduğunu belirtmek için; ilgili terminalleri tanımlamak için.
	<b>Üretici</b>	90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB direktiflerinde tanımlanan şekilde tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	<b>Avrupa Birliğindeki/Avrupa Topluluğundaki yetkili temsilci</b>	Avrupa Birliğindeki/Avrupa Topluluğundaki yetkili temsilciyi belirtir.
<b>REF</b>	<b>Katalog numarası</b>	Tıbbi cihazın tanımlanabilmesini sağlayan, üreticinin katalog numarasını belirtir.
	<b>İthalatçı</b>	Tıbbi cihazı yerel olarak ithal eden tüzel kişiyi belirtir.
	<b>Tıbbi cihaz</b>	Öğenin tıbbi bir cihaz olduğunu belirtir.
	<b>Dikkat</b>	Kullanıcının, çeşitli nedenlerle tıbbi cihazın kendisinde sunulamayan uyarılar ve önlemler gibi önemli ve uyarıcı bilgiler için kullanım talimatlarına bakması gerektiğini belirtir.

Symbol	Name	Description
	<b>CE İşareti</b>	Ürün, Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/EEC ile uyumludur ve yürürlükteki sağlık, güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamaktadır. İşarete bir sayı eşlik ediyorsa, uygunluk doğrulanmıştır.
	<b>Üretim tarihi</b>	Tıbbi cihazın üretildiği tarihi belirtir.
	<b>Sadece Reçete</b>	Dikkat: Federal (ABD) yasaya göre bu cihaz sadece bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satılabilir.
	<b>Geri dönüşüm: Elektronik Ekipman</b>	Ürünün elektronik ekipmanların geri dönüşümü için Avrupa Birliği'nin Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) 2002/96/EC/EU Direktifine tabi olduğunu belirtir.
	<b>Kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın</b>	Kullanım kılavuzunun/kitapçığın okunması gerektiğini belirtir.
	<b>Seri numarası</b>	Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesini sağlayan, üreticinin seri numarasını belirtir.

## Sözlük

Bu belgede aşağıdaki terimler bulunabilir:

Terim	Açıklama
<b><i>Navigant</i> Navigasyon İş İstasyonu</b>	Stereotaxis <i>Navigant</i> Navigasyon İş İstasyonu klinik iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım uygulamaları platformudur. Kateterizasyon ve elektrofizyoloji laboratuvarlarının gelişmiş entegrasyonunu ve manyetik navigasyon sırasında tıbbi cihazların gelişmiş otomasyonunu sağlar.
<b><i>Niobe</i> Manyetik Navigasyon Sistemi</b>	Stereotaxis <i>Niobe</i> Manyetik Navigasyon Sistemi tedaviyi etkilemek için hekimlerin kateterleri, kılavuz telleri ve diğer manyetik girişimsel cihazları kan damarları ve kalp odacıkları yoluyla tedavi yerlerine daha etkili şekilde yönlendirmesine olanak sağlar.
<b><i>Odyssey Cinema</i> İstemci</b>	<i>Odyssey Cinema</i> 'nın standart bir PC'de çalışan ve <i>Odyssey Cinema</i> kullanıcıları için tek bir entegre kullanıcı arabirimi sağlayan tarayıcı yazılımı.
<b><i>Odyssey</i> Ağ</b>	Uzaktan görüntüleme ve müşteri desteği için <i>Odyssey</i> sistemlerini bağlayan özel bir global ağ.
<b><i>Odyssey</i> Ağ Merkezi</b>	Ayrıca “Çağrı Merkezi” olarak da adlandırılır. Müşteri desteği, eğitim ve ağ yönetimi amacıyla <i>Odyssey</i> kurumlarını uzaktan görüntüleme ve kontrol etme yeteneğine sahip bir Stereotaxis tesisi.

# Başlarken

Bir Stereotaxis temsilcisi veya Bilgi Teknolojisi departmanınızın üyesi *Odyssey Cinema* İstemci'yi kurmuş ve masaüstünüzde bir kısayolunu oluşturmuş olmalıdır. Aksi takdirde bkz. [Ek A: Kurulum](#).

*Cinema*'yı başlatmak için, kurulan kısayolu çift tıklatın. *Cinema* Internet Explorer'da açılacaktır.



**Şekil 1 – Odyssey Cinema kısayolu**

★ **Not:** *Odyssey Cinema* İstemci **yalnızca Internet Explorer 7 veya sonraki bir sürümle uyumludur** (diğer web tarayıcılarıyla uyumlu değildir).

Uygulama yüklendikçe, Painting application ... (Uygulama görüntüsü oluşturuluyor...) iletisini içeren küçük bir kutu görüntülenir.



**Şekil 2 – Painting application (Uygulama görüntüsü oluşturuluyor)**

Oturum açma ekranı görüntülenir.


★ **Not:** En iyi görüntüyü elde etmek için tarayıcımızla ekranı kaplayın.

## Login (Oturum açma) ekranı



Şekil 3 – Login (Oturum açma) ekranı

Login (Oturum açma) iletişim kutusuna, uygulamayı kuran temsilcinin size sağladığı User Name (Kullanıcı Adı) ve Password (Parola) seçeneklerini yazın. **Log in** (Oturum açma) seçeneğini tıklattın veya **Enter** tuşuna basın.

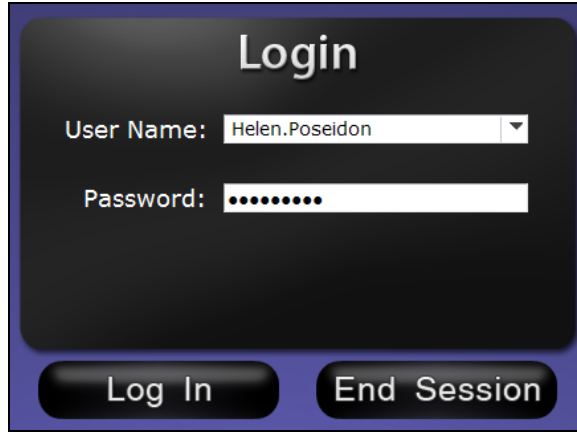

Şekil 4 – Login (Oturum açma) iletişim kutusu

- ★ **Not:** Login (Oturum açma) ekranınızda bir Client Name (İstemci Adı) alanı görürseniz kurulumunuz tamamlanmamıştır. Client Name (İstemci Adı) edinmek için kuruluşunuzun yardım kaynağıyla iletişim kurun (bkz [Ek A: Kurulum](#)). Kurulum tamamlandıktan sonraki oturum açma işlemlerinde Client Name (İstemci Adı) alanını görmemeniz gerekir.

## Main menu (Ana menü)

Oturum açmanızın ardından, dört seçenek ve Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren main menu (ana menü) görüntülenir.




**Şekil 5 – İmlecin Viewer (Görüntüleyici) düğmesinin üzerinde olduğu Main menu (Ana menü)**

Dört pencere seçeneği şunlardır:

- **Viewer (Görüntüleyici)** – Seçilen bir iş istasyonundan canlı video görüntüler.
- **Passport (Pasaport)** – *Odyssey* Ağı kullanıcılarına ilişkin özel bilgileri görüntüler.
- **Archiver (Arşivleyici)** – Seçilen iş istasyonlarındaki kayıtlı videolara erişilmesini sağlar.
- **Preferences (Tercihler)** – Kullanıcının Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) ayarlarını yapmasına olanak sağlar.
- **Log Off (Oturumu Kapat)** – Kullanıcının oturumunu kapatır ve Login (Oturum açma) ekranını görüntüler.

# Viewer (Görüntüleyici) penceresi

[Main menu](#) (Ana menü) içinden veya [Navigasyon menüsünden](#) **Viewer** (Görüntüleyici) seçeneğini belirlediğinizde, Viewer (Görüntüleyici) penceresi birçok temel özellikte birlikte görüntülenir.

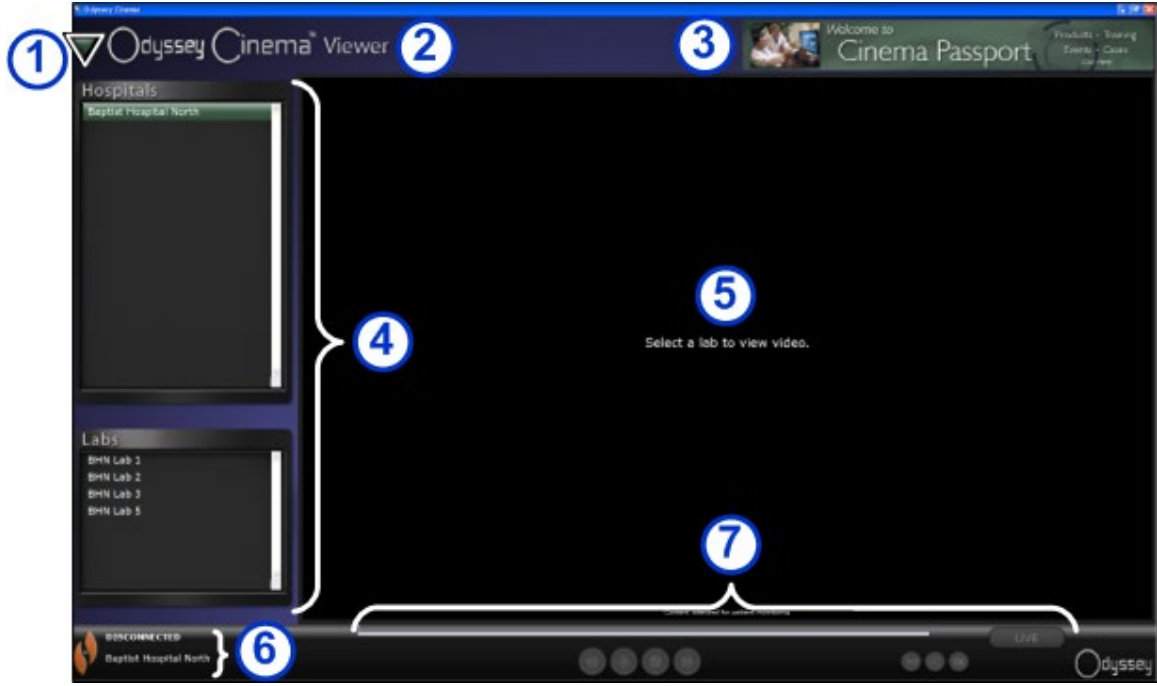

Şekil 6 – Viewer (Görüntüleyici) penceresi

## Viewer (Görüntüleyici) penceresi kılavuzu

- ① **Navigasyon düğmesi.** Yeşil üçgen düğme dört ana pencereyi, Main Menu (Ana Menü) ve Log Off (Oturumu Kapat) seçeneğini içeren, açılan bir [Navigasyon menüsünü](#) görüntüler. Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ② **Pencere etiketi.** Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ③ **Cinema Passport (Cinema pasaportu) manşet grafiği.** *Odyssey Cinema* kullanıcıları için haberler sağlar. Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ④ **Seçim panelleri:** Hospitals (Hastaneler) ve Labs (Laboratuvarlar). Bir hastane seçebilirsiniz; o hastane içinde bir laboratuvar seçebilirsiniz.
- ⑤ Görüntüleme alanı. Seçtiğiniz laboratuvar *Odyssey* iş istasyonunu burada görüntüler.
- ⑥ **Bağlantı durumu ve hastane ve laboratuvar adları.** Bu panel seçilen hastanenin adını ve Connected (Bağlandı) ve Disconnected (Bağlantı Kesildi) gibi bağlantı durumunu görüntüler.
- ⑦ **Viewer (Görüntüleyici) Araç Çubuğu ve Zaman Çizgisi.** Bu panel araç çubuğu düğmelerini ve zaman çizgisini görüntüler:
  - Geri git
  - Oynat / Duraklat (geçiş düğmesi)
  - Durdur
  - İleri git
  - Bire bir modu
  - Ekran geçişi yap
  - Ekran anlık görüntüsü
  - Canlı (durum düğmesi)




## Navigasyon menüsü

Navigasyon düğmesini tıklattığınızda, altı seçenek içeren Navigasyon menüsü görüntülenir. Bir seçeneğe erişmek için onu tıklatın.

- Viewer (Görüntüleyici) (pencere)
- Archiver (Arşivleyici) (pencere)
- Passport (Pasaport) (pencere)
- Preferences (Tercihler) (pencere)
- Main menu (Ana menü)
- Log off (Oturumu kapat)

★ **Not:** Bir videoyu tam ekran modunda görüntülüyorsanız Navigasyon düğmesine erişebilmeniz için öncelikle Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğunda Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesini tıklatarak pencereci moda geri dönmeniz gerekir. Şekil 10 ve ilerleyen bölümdaki kılavuz bu modları açıklamaktadır.

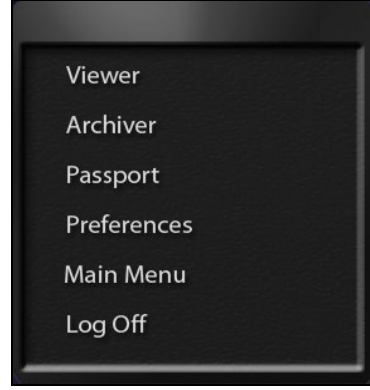


Şekil 7 - Navigasyon menüsü



Şekil 8 - Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi



Şekil 9 - Navigasyon düğmesi

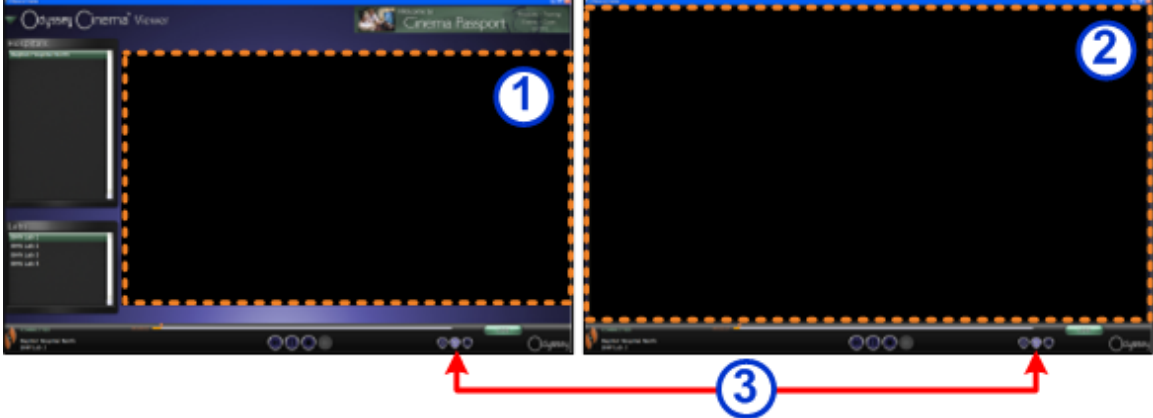


Şekil 10 - Turuncu noktalı kutular her bir ekran türündeki görüntüleme alanlarını belirtir. Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi (kırmızı oklarla belirtilir), görünümleri değiştirir.

### Viewer (Görüntüleyici) modları

- ① **Pencereci mod:** Manşet ve seçim panelleri görüntülenmeye devam ettiğinden, görüntüleme alanı, pencereci modda daha küçüktür. Bu varsayılan görünümdür.
- ② **Tam ekran modu:** Görüntüleme alanı pencere içinde maksimum boyutuna genişler.

- ③ **Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesi:** Araç çubuğunun ikinci düğme kümesinde ortada yer alan düğme. Bir moddayken, diğer moda geçiş yapmak için Toggle screen (Ekran geçişi yap) düğmesini tıklatın.

## Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri

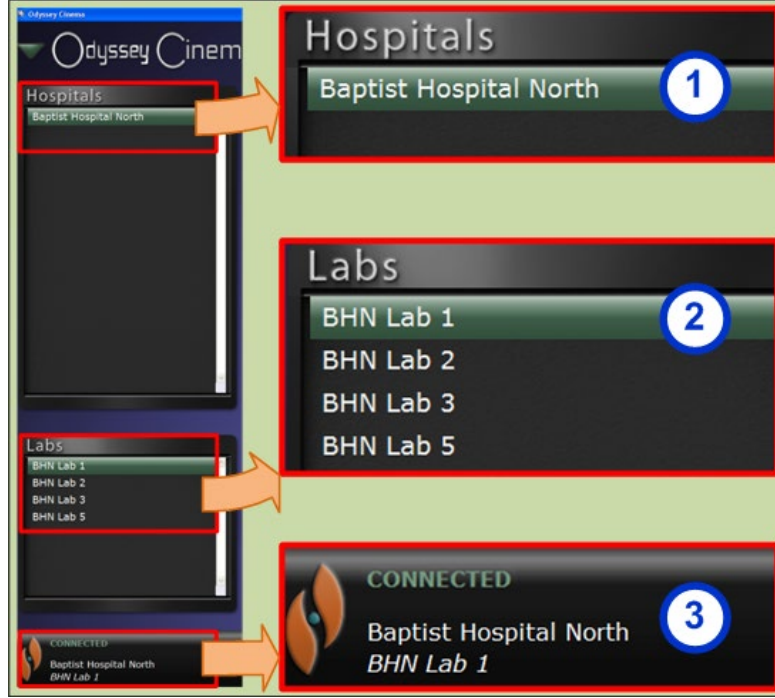

Şekil 11 – Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri

### Viewer (Görüntüleyici) seçim panelleri kılavuzu

- ① **Hastane listesi.** Bir hastane seçin (birden çok varsa. Listedeki ilk hastane, varsayılandır.)
- ② **Laboratuar listesi.** Seçilen hastanenin listesinden bir laboratuar seçin.
- ③ **Bağlantı durumu ve hastane ve laboratuar adları.**


**Bağlantı durumu:** Bir laboratuar seçmeden önceki durum Disconnected (Bağlantı Kesildi)'dir. Bir laboratuar seçtikten sonra durum aşağıdaki iletilerden bazıları veya tümü arasında geçiş yapabilir.

- Disconnected (Bağlantı Kesildi) – Laboratuara bağlı değilsiniz.
- Authorizing (Yetki Veriliyor) – Bu durum yalnızca bir laboratuara bağlanma izni olan kullanıcılar için görüntülenir. *Odyssey* laboratuvarındaki kullanıcı, yetki isteğinde bulunduğunuzu görür.
- Connecting (Bağlanılıyor) – Laboratuara bağlanıyorsunuz.
- Connected (Bağlandı) – Laboratuara bağlandınız.
- Denied (Reddedildi) – Bu durum yalnızca bir laboratuara bağlanma izni olan kullanıcılar için görüntülenir. *Odyssey* laboratuvarındaki kullanıcı, bağlanma iznini reddetti.
- Disconnecting (Bağlantı Kesiliyor) – Laboratuardan bağlantınız kesiliyor. *Odyssey Cinema* İstemci'den veya *Odyssey* laboratuvarından bağlantınız kesilebilir. (Bağlantıyı kesmek için Stop (Durdur) düğmesini tıklatın.)

**Hastane ve laboratuvar adları:** Bağlandığınızda, bağlanan hastane ve laboratuvarın adı durum iletisinin aşağısında görüntülenir.


## Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğu

Düğmeler gerektiğinde Viewer (Görüntüleyici) araç çubuğunda kullanılabilir bir durumda görüntülenir. Örneğin, bir hastane laboratuvarı seçmeden önce devre dışı bırakılmış bir dizi düğme görürsünüz:

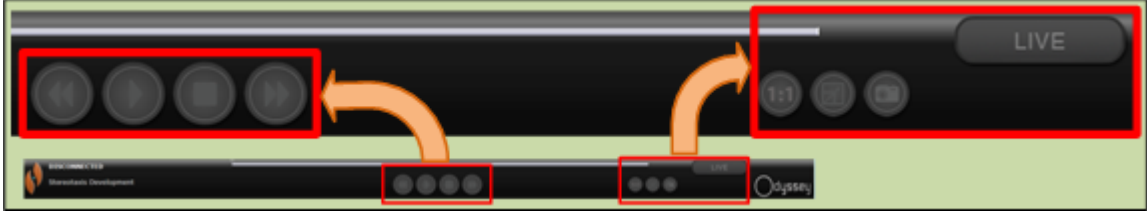



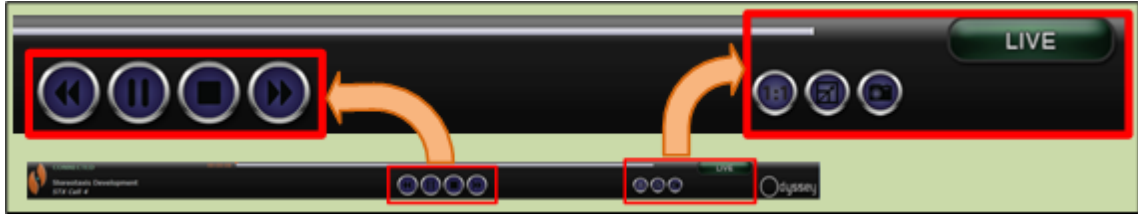


Şekil 12 – Devre dışı bırakılmış düğme örnekleri






Bağlandığınızda hemen bazı düğmeler görüntülenir (geri git veya duraklat düğmesini tıklattığınızda, ileri git düğmesi görüntülenir):



Şekil 13 – Etkinleştirilmiş (kullanılabilir) düğme örnekleri

## Viewer (Görüntüleyici) düğmeleri

Düğme	Açıklama	
	<b>Geri git</b>	Video akışını <a href="#">Preferences (Tercihler) Penceresinde</a> ayarlanan aşamalarla geriye taşır.
 	<b>Oynat / duraklat geçiş düğmesi</b>	Bu düğme video geri oynatımının Duraklat ve Oynat durumu arasında geçiş yapmasını sağlar.
	<b>Durdur ve bağlantı kes</b>	Video akışını durdurur. Şu bilgi istemi görüntülenir: “Video will no longer be available. Continue?” (Video artık kullanılabilir durumda değil. Devam edilsin mi?) Yanıtlar, <b>OK</b> (Tamam) veya <b>Cancel</b> (İptal) şeklindedir. <b>OK</b> (Tamam) seçeneğini tıkladıysanız birikmiş canlı videoyu artık oynatamazsınız. Durum <b>Disconnected</b> (Bağlantı Kesildi) olarak değiştirilir.
	<b>İleri git</b>	Video akışını, <a href="#">Preferences (Tercihler) penceresinde</a> ayarlanan aşamalarla ileriye taşır.


Düğme	Açıklama	
	<b>Live (Canlı)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Açık yeşil</b> düğme prosedürü canlı görüntülediğinizi belirtir.</li> <li>• Düğme <b>koyu yeşil</b> olduğunda, bağlanmış olursunuz ancak video oynatımı canlı değildir; canlı görüntülemeyi sürdürmek için koyu yeşil düğmeyi tıklatabilirsiniz.</li> <li>• Düğme <b>siyah</b> olduğunda, bağlantınız kesilmiştir.</li> </ul>
	<b>Bire bir görünümü</b>	Videoyu <i>Odyssey</i> laboratuvarının gördüğü aynı çözünürlükte - 1:1 piksel çözünürlükte görüntüler. (Bkz Şekil 15.)
	<b>Tam ekran görünümü</b>	Videoyu tam ekrana genişletir, böylece üst çerçeve artık görüntülenmez ( <a href="#">Navigasyon düğmesi</a> dahil). Üst çerçeveyi ve Navigasyon düğmesini görüntülemek için yeniden tıklatın. (Bkz Şekil 16.)
	<b>Bire bir ve tam ekran görünümü</b>	Bire bir ve tam ekran görünümünü birleştirir. Bu birleşim size en büyük görüntüleme alanını sunar. (Bkz Şekil 17.)
	<b>Ekran anlık görüntüsü</b>	Geçerli video ekranının ekran görüntüsünü yakalar. Bir Windows "Save As" (Farklı Kaydet) iletişim kutusunu görüntüler, böylece ekran görüntüsünü saklamak istediğiniz dizini seçebilirsiniz.

## Ekran görüntüleri


Görüntüleyici penceresi varsayılan standart görünümde açılır. Üç farklı görünümün (Bire bir görünümü, Tam ekran görünümü ve Bire bir ve tam ekran görünümü) açıklamaları için, Viewer (Görüntüleyici) düğmelerindeki karşılık gelen düğme açıklamalarına bakın.



**Şekil 14 – Varsayılan standart görünüm**

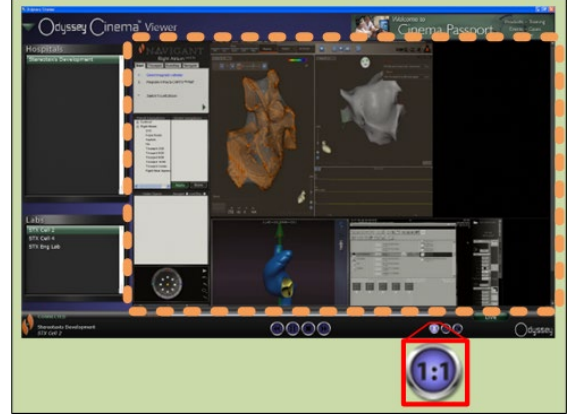

**Şekil 15 – Bire bir (1:1) görünümü**

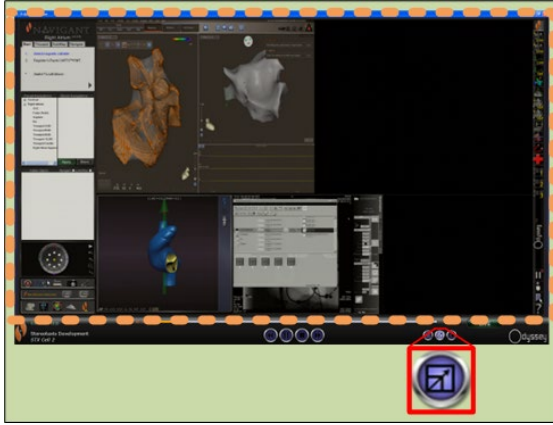

**Şekil 16 – Tam ekran görünümü**



**Şekil 17 – Bire bir ve tam ekran görünümü**

## Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi

Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi canlı video akışının zaman ilerlemesini görüntüler. Geçen süre saat, dakika ve saniye cinsinden (SS.DD.SS) görüntülenir. Turuncu gösterge canlı videonun geçerli saatini gösterir; turuncu çubuk toplam kayıt süresini gösterir. Viewer (Görüntüleyici) canlı prosedürün geçici bir kaydını yapar; böylece kaydetmeye devam ederken kaydedilen segmentleri gözden geçirebilirsiniz. Bu, evinizdeki televizyonun Dijital Video Kaydedici (DVR) veya Kişisel Video Kaydedici (PVR) özelliğine çok benzer.



**Şekil 18 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – canlı video**



**Şekil 19 – Viewer (Görüntüleyici) zaman çizgisi – geçici video kaydını gözden geçirme**

Geçici kaydı gözden geçirmek için, turuncu göstereyi istediğiniz geçen sürenin soluna sürükleyin veya Geri git düğmesini tıklatın. Göstereyi serbest bıraktığınızda veya Geri git düğmesini tıklattığınızda, kayıt hemen seçilen zamandan oynatılmaya başlar. [Live](#) (Canlı) düğmesi koyu yeşile dönüşerek geçici bir kaydı görüntülediğinizi belirtir. Canlı prosedürü yeniden görüntülemek için, Live (Canlı) düğmesini tıklatın. Canlı prosedürü yeniden görüntülediğinizde, Live (Canlı) düğmesi açık yeşile dönüşür.

Preferences (Tercihler) penceresi\Application Settings (Uygulama Ayarları) içinde ileri ve geri gitme için aşamaları ayarlayın. 60 saniyeden düşük aşamalar için turuncu gösterge hareketini göremeyebilirsiniz; ancak zaman sayacında değişikliği görebilirsiniz (SS.DD.SS).

Zaman çizelgesinin maksimum görüntüsü, geçici kaydın son dört saatidir. Son dört saati kaydettiyseniz zaman çizelgesi ek kayda yer açmak için en önceki kayıttan aşamaları silmeye başlar.




**Şekil 20 – Viewer'da (Görüntüleyici) en uzun süreyi kapsayan zaman çizgileri örnekleri**

Şekil 20 bu kavramı gösterir:

- Birinci zaman çizgisinde Viewer (Görüntüleyici) 4 saatlik video kaydetmiştir. Kullanıcı bu dört saatlik kaydı gözden geçirebilir.
- İkincisinde Viewer (Görüntüleyici) 4 saat 45 dakikalık video kaydetmiştir. Viewer (Görüntüleyici) ilk 45 dakikayı silmiştir. Kullanıcı yalnızca son 4 saatlik kaydı gözden geçirebilir.
- Üçüncüsünde Viewer (Görüntüleyici) 6 saat 23 dakika ve 18 saniyelik video kaydetmiştir. Viewer (Görüntüleyici) ilk 2 saat, 23 dakika 18 saniyelik kısmı silmiştir. Kullanıcı yalnızca son 4 saatlik kaydı gözden geçirebilir.

# Archiver (Arşivleyici) penceresi

[Main menu](#) (Ana menü) içinden veya [Navigasyon menüsünden](#) Archiver (Arşivleyici) seçeneğini belirlediğinizde, Archiver (Arşivleyici) birçok temel özellikte birlikte görüntülenir:

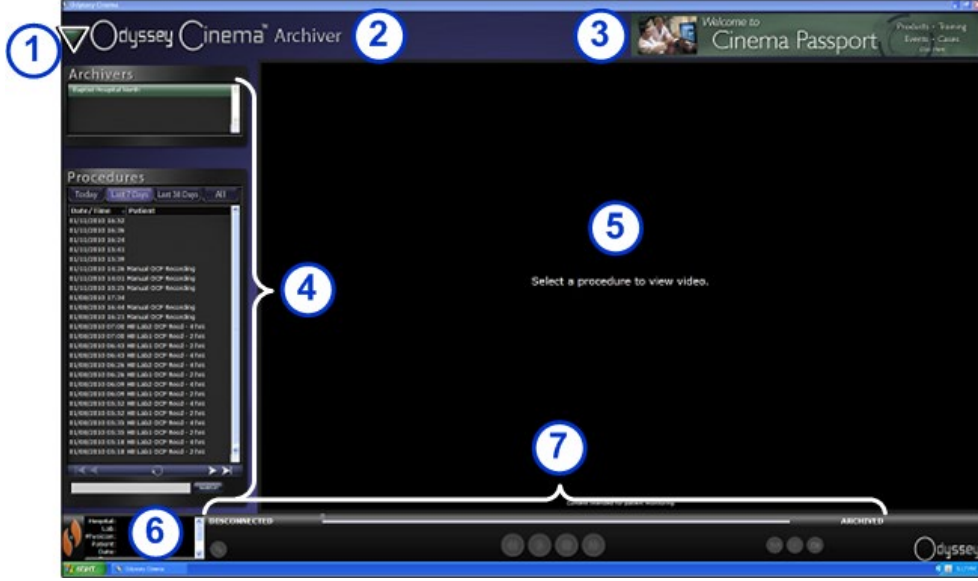


Şekil 21 – Archiver (Arşivleyici) penceresi

## Archiver (Arşivleyici) penceresi kılavuzu

- ① **Navigasyon düğmesi.** Yeşil üçgen düğme dört ana pencereyi, Main Menu (Ana Menü) ve Log Off (Oturumu Kapat) seçeneğini içeren, açılan bir [Navigasyon menüsünü](#) görüntüler. Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ② **Pencere etiketi.** Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ③ **Cinema Passport (Cinema Pasaportu) Manşeti.** Odyssey Cinema kullanıcıları için “manşet haberleri” sağlar. Cinema Passport (Cinema Pasaportu) penceresini görüntülemek için tıklatın. Bu manşet Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modu dışında her pencerede görüntülenir.
- ④ **Seçim panelleri:** Archivers (Arşivleyiciler) ve Procedures (Prosedürler). Bir arşivleyici seçebilirsiniz; o arşivleyici tarafından kaydedilen bir prosedürü seçebilirsiniz.
- ⑤ **Görüntüleme alanı.** Seçtiğiniz kaydedilmiş prosedür burada görüntülenir.
- ⑥ **Prosedür bilgileri.** Bu panel hastane, laboratuvar, hekim ve hasta gibi prosedür bilgilerini görüntüler.
- ⑦ **Bağlantı durumu, Archiver (Arşivleyici) Araç Çubuğu ve Zaman Çizgisi.** Bu panel bağlantı durumunu, araç çubuğu düğmelerini ve zaman çizgisini görüntüler:
  - Connection status (Bağlantı durumu)
  - Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle)
  - Add bookmark (Yer işareti ekle)
  - Edit bookmark (Yer işaretini düzenle)
  - Delete bookmark (Yer işaretini sil)
  - Geri git
  - Oynat / Duraklat (geçiş düğmesi)
  - Durdur
  - İleri git
  - Bire bir modu
  - Ekran geçişi yap
  - Ekran anlık görüntüsü
  - Arşivlenme durumu iletisi




## Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri

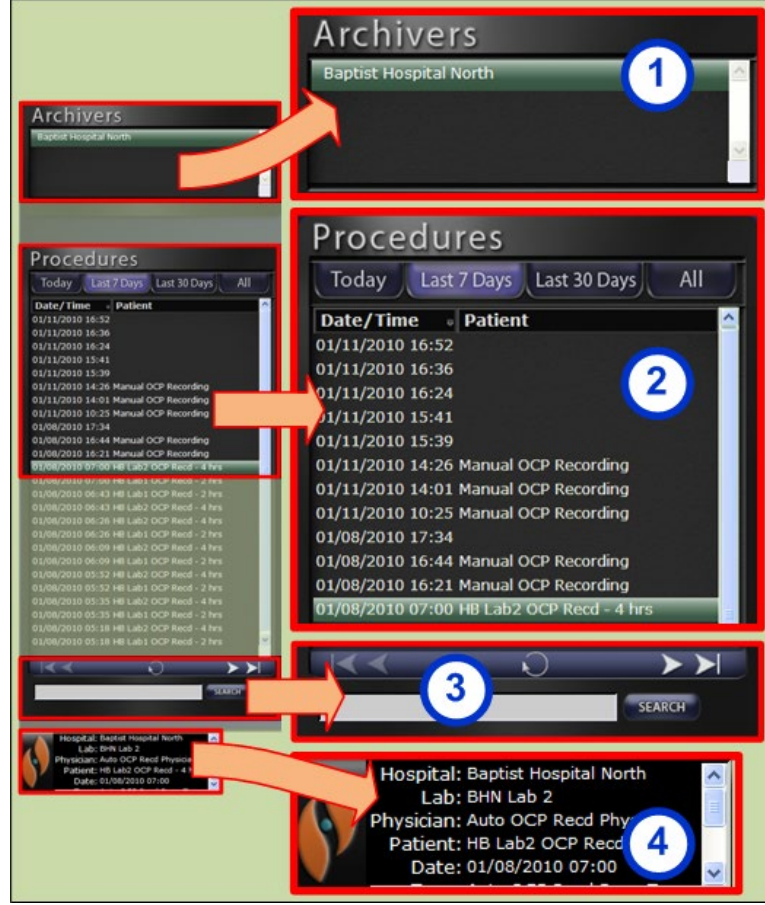

Şekil 22 – Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri

### Archiver (Arşivleyici) seçim panelleri kılavuzu


- ① **Hastane listesi.** Bir hastane seçin (birden çok varsa. Listedeki ilk hastane, varsayılandır.)
- ② **Procedures (Prosedürler).** Prosedürler geçerli tarihe (“Today”) (Bugün), Last 7 Days (Son 7 Gün), Last 30 Days (Son 30 Gün) ve All (Tümü) ölçütlerine göre sıralanır. Last 7 Days (Son 7 Gün) varsayılandır. Başka bir kümeyi görüntülemek için uygun sekmeyi tıklatın. Liste ne kadar uzun olursa seçilen prosedür listesinin yüklenmesi o kadar uzun sürer.

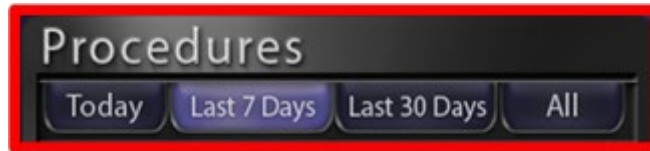

Şekil 23 – Prosedür sıralama sekmeleri




İmleci bir prosedürün üzerinde tuttuğunuzda, tüm prosedür bilgileri bir açılır kutuda görüntülenir.

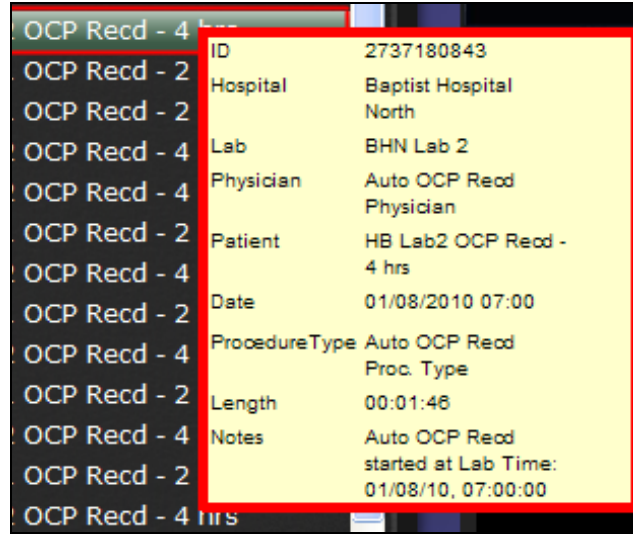

**Şekil 24 – Prosedür bilgilerini görüntülemek için, imleci bir prosedür listesinin üzerinde tutun.**

Bir prosedür seçtiğinizde, kayıt sağdaki görüntüleme alanında görüntülenir.


- ③ **Procedures (Prosedürler) kontrol paneli.** Bu panelde dört navigasyon düğmesi, bir yenileme düğmesi ve bir search (arama) alanı bulunur.

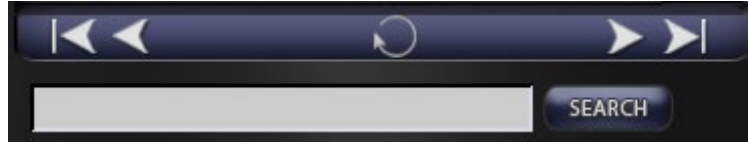

**Şekil 25 – Procedures (Prosedürler) kontrol paneli**


### Procedures (Prosedürler) paneli düğmeleri

Düğme	Adı	Açıklama
	<b>İlk sayfa</b>	Seçilen prosedür listesinin başına geri dönmek için ilk sayfa düğmesini tıklatın.
	<b>Önceki sayfa</b>	Önceki veri sayfasına gitmek için önceki sayfa düğmesini tıklatın. İlk sayfa ve önceki sayfa navigasyon düğmeleri, prosedür listesinin ilk sayfasında görüntülenmez.
	<b>Sonraki sayfa</b>	Sonraki veri sayfasına gitmek için sonraki sayfa düğmesini tıklatın.
	<b>Son sayfa</b>	Seçilen prosedür listesinin sonuna gitmek için son sayfa düğmesini tıklatın. Sonraki sayfa, son sayfa ve navigasyon düğmeleri prosedür listesinin ilk sayfasında görüntülenmez.
	<b>Yenile</b>	Prosedür listesini oturum açıldıktan sonra oluşturulan prosedürlerle güncellemek için Yenile düğmesini tıklatın.

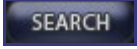Düğme	Adı	Açıklama
	<b>Search (Arama)</b>	Bir prosedürü aramak için arama alanına prosedürün tanımlayıcı bilgilerini girin. <b>Search (Arama)</b> seçeneğini tıklatın. Search (Arama) alanı büyük küçük harfe duyarlıdır. Tarih veya uzunlukla ilgili arama yapamazsınız. Arama sonuçlarını temizlemek için, Procedures (Prosedürler) panelinin üstündeki herhangi bir sekme tıklatın.

④ **Prosedür bilgileri.** Prosedür bilgileri paneli kaydırılabilir. Panel şunları içerir:

- Hastane adı
- Laboratuvar tanıtıcısı
- Hekim adı
- Hasta adı
- Prosedür tarihi
- Prosedür türü
- Prosedürle ilgili notlar

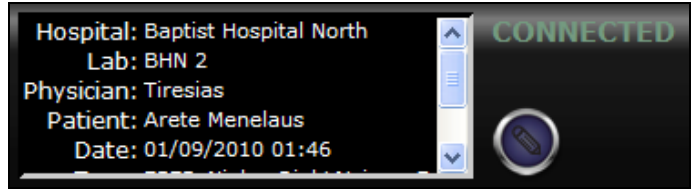


**Şekil 26 – Prosedür bilgileri paneli ve Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle) düğmesi**

Prosedür bilgilerini de düzenleyebilirsiniz.

1. Prosedürü düzenle düğmesini (Şekil 27) tıklatın. Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) paneli görüntülenir.
2. Gerekli şekilde bilgileri düzenleyin.
3. Paneli kapatıp değişiklikleri kaydetmek için **Save (Kaydet)** seçeneğini, değişiklikleri kaydetmeden paneli kapatmak için **Cancel (İptal)** seçeneğini tıklatın.

**Şekil 27 – Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) paneli ve düğmesi**

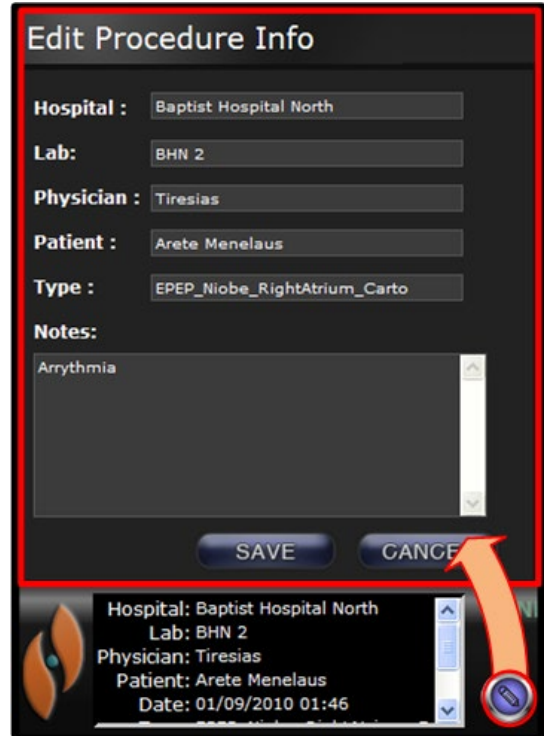

## Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu

Düğmeler gerektiğinde Archiver (Arşivleyici) araç çubuğunda kullanılabilir bir durumda görüntülenir. Örneğin, bir prosedür bağlanırken yalnızca üç düğme görüntülenir: Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle), Durdur ve Ekran geçişi yap.



Şekil 28 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlanıyor: üç düğme görüntülenir


Bağlanmak ve oynatmayı başlatmak için Oynat düğmesini tıklatın. Durum yeşil CONNECTED (BAĞLANDI) olarak değişir ve Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) ve Delete bookmark (Yer işaretini sil) dışındaki tüm düğmeler kullanılabilir olur. Bu düğmeler bir yer işareti seçtiğinizde kullanılabilir olur.



Şekil 29 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğu bağlantıyı değiştirme: düğmelerin çoğu görüntülenir

## Archiver (Arşivleyici) göstergeleri

Kaydedilmiş bir videoya bağlandığımızda (oynatırken), araç çubuğunun yukarısında beş gösterge görüntülenir.

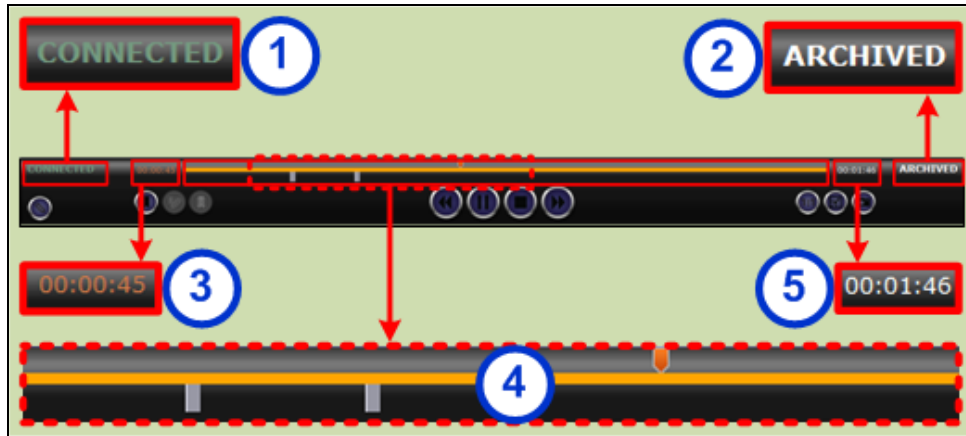




Şekil 30 – Archiver (Arşivleyici) araç çubuğunun yukarısındaki göstergeler

### Archiver (Arşivleyici) göstergeleri kılavuzu

- ① **Connection status (Bağlantı durumu).** Seçenekler şunlardır: Disconnected (Bağlantı Kesildi), Connecting (Bağlanılıyor), Connected (Bağlandı) veya Disconnecting (Bağlantı Kesiliyor).
- ② **Archived (Arşivlendi).** Kaydedilmiş bir prosedürü belirtir.
- ③ **Geçen süre.** Geri oynatımı başlatmanızdan itibaren geçen, saat, dakika ve saniye cinsinden süre.
- ④ **Zaman çizgisi çubuğu.** Turuncu video konumu göstergesinin hareket ettiği ve gri yer işaretlerinin oluşturulup erişilebildiği alan.
- ⑤ **Toplam süre.** Kaydın saat, dakika ve saniye cinsinden toplam süresi.

## Archiver (Arşivleyici) düğmeleri

Düğme	Adı	Açıklama
	<b>Edit procedure information (Prosedür bilgilerini düzenle)</b>	Ekranın sol alt köşesinde, prosedür bilgileri kutusunun <i>yukarısında</i> bir metin düzenleyici açar. Edit Procedure Information (Prosedür Bilgilerini Düzenle) iletişim kutusundaki tüm alanlar düzenlenebilir.
	<b>Add bookmark (Yer işareti ekle)</b>	Görüntülemekte olduğunuz videoya bir yer işareti ekler, böylece o video karesine geri başvurabilirsiniz. Yer işaretiyle ilgili notlar ekleyebileceğiniz bir Bookmark description (Yer işareti açıklaması) kutusu görüntülenir. Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesini tıklattığınızda yer işaretinin zamanı tanımlanır. Bu zaman daha sonra yer işareti metniyle kaydedilir.
	<b>Edit bookmark (Yer işaretini düzenle)</b>	Videonun zaman çizelgesinde var olan bir yer işaretini tıklattığınızda, Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) ve Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmelerini etkinleştirirsiniz. Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesini tıklattığınızda, seçilen yer işaretinin Bookmark Description (Yer İşareti Açıklaması) kutusu düzenleme için görüntülenir.
	<b>Delete bookmark (Yer işaretini sil)</b>	Videonun zaman çizelgesinde var olan bir yer işaretini tıklattığınızda, Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) ve Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmelerini etkinleştirirsiniz. Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesini tıklattığınızda seçilen yer işareti silinir.
	<b>Geri git</b>	Video kaydını <a href="#">Preferences (Tercihler) penceresinde</a> ayarlanan aşamalarla geriye taşır.
	<b>Oynat / duraklat geçiş düğmesi</b>	Bu geçiş düğmesi video kaydı oynatılırken Duraklat seçeneğini, video duraklatıldığında ise Oynat seçeneğini görüntüler. Açıklama: Video oynatılırken Duraklat'ı tıklatabilir ve duraklatıldığında da Oynat'ı tıklatabilirsiniz).
	<b>Durdur</b>	Video kaydını durdurur.
	<b>İleri git</b>	Video akışını, <a href="#">Preferences (Tercihler) penceresinde</a> ayarlanan aşamalarla ileriye taşır.
	<b>Archived (Arşivlendi)</b>	Önceden kaydedilmiş, arşivlenmiş bir prosedürü görüntülediğinizi belirtir.

Düğme	Adı	Açıklama
	<b>Bire bir modu</b>	Videoyu <i>Odyssey</i> laboratuvarının gördüğü aynı çözünürlükte - orijinal 1:1 piksel çözünürlüğünde görüntüler.
	<b>Ekran geçişi yap</b>	Videoyu tam ekrana genişletir, böylece üst çerçeve artık görüntülenmez ( <a href="#">Navigasyon düğmesi</a> dahil). Üst çerçeveyi ve Navigasyon düğmesini görüntülemek için yeniden tıklatın.
	<b>Ekran anlık görüntüsü</b>	Geçerli video ekranının ekran görüntüsünü yakalar. Bir Windows "Save As" (Farklı Kaydet) iletişim kutusunu görüntüler, böylece ekran görüntülerini saklamak istediğiniz dizini seçebilirsiniz.

## Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi

Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi video kaydının zaman ilerlemesini görüntüler. Geçen süre saat, dakika ve saniye cinsinden (SS.DD.SS) görüntülenir. Turuncu gösterge kaydın geçen süresini; turuncu çubuk toplam kayıt süresini gösterir.



**Şekil 31 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sol uç**



**Şekil 32 – Archiver (Arşivleyici) zaman çizgisi – sağ uç**

Kaydı gözden geçirmek için, turuncu göstereyi istediğiniz geçen sürenin soluna sürükleyin veya Geri git düğmesini tıklatın. Göstereyi serbest bıraktığınızda veya Geri git düğmesini tıklattığınızda, kayıt hemen seçilen zamandan oynatılmaya başlar.

[Preferences \(Tercihler\) penceresinde](#) ileri ve geri gitme için aşamaları ayarlayın. 60 saniyeden düşük aşamalar için turuncu gösterge hareketini göremeyebilirsiniz; ancak zaman sayacında değişikliği görebilirsiniz (SS.DD.SS).

★ **Not:** Kayıttan oynatım sona ulaştığında, Archiver (Arşivleyici) oynatmayı otomatik olarak durdurur ve bağlantıyı keser. Yeniden bağlanmak ve oynatmayı sürdürmek için Oynat düğmesini tıklatın.

## Yer İşaretleri

Yer işaretleri kayıta önceden görüntülenen konumların kısayollarıdır. *Odyssey* İş İstasyonu kullanıcısı bir prosedür kaydedilirken yer işaretleri ekleyebilir ve *Odyssey Cinema* İstemci kullanıcısı arşivlenmiş bir kaydı görüntülerken bunları ekleyebilir. Ancak *Odyssey Cinema* İstemci kullanıcıları canlı bir prosedür izlerken yer işaretleri ekleyemez.

## Yer işareti ekleme


*Cinema* İstemci'de bir yer işareti eklemek için, video oynatılırken veya duraklatıldığında Bookmark (Yer İşareti) düğmesini tıklatın. Bir yer işareti açıklaması yazıp **Save** (Kaydet) seçeneğini tıklattığınızda değil, Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesini tıklattığınızda yer işaretinin zamanı tanımlanır. (Ancak siz **Save** (Kaydet) seçeneğini *tıklatıncaya kadar* yeni yer işareti görüntülenmez).



**Şekil 33 – Add bookmark (Yer işareti ekle) düğmesi**



**Şekil 34 – Bookmark description (Yer işareti açıklaması)**

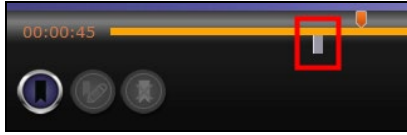

**Şekil 35 – New bookmark (Yeni yer işareti)**

## Yer işaretini gözden geçirme

Bir yer işaretini gözden geçirmek için, imleci yer işaretinin üzerinde tutun, bir açılır pencerede açıklama görüntülenir. Bir yer işaretini tıklatın, böylece yer işareti yeşile dönüşür, oynatma göstergesi o yer işaretine gider ve kayıt o noktadan itibaren oynatılmaya başlar. Oynatma zaman çizelgesindeki yer işareti konumundan birkaç saniye önce başlayabilir.




**Şekil 36 – Yer işaretinin üzerinde imleç**



**Şekil 37 – Seçilen (tıklatılan) yer işareti**

## Yer işaretini düzenleme

Bir yer işaretini düzenlemek için, yer işaretini ve sonra Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesini tıklatın. Bookmark description (Yer işareti açıklaması) alanı görüntülenir. Gerekli şekilde metni düzenleyin ve **Save** (Kaydet) seçeneğini tıklatın.

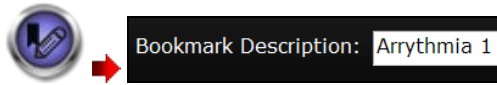

**Şekil 38 – Edit bookmark (Yer işaretini düzenle) düğmesi ve bookmark description (yer işareti açıklaması)**

## Yer işaretini silme


Bir yer işaretini silmek için, yer işaretini ve sonra Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesini tıklatın. Yer işareti silinir.



**Şekil 39 – Delete bookmark (Yer işaretini sil) düğmesi**

## Preferences (Tercihler) penceresi

Preferences (Tercihler) penceresinde, Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) penceresindeki özellikler için tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlar siz onları değiştirmeye kadar gelecekteki tüm Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) oturumları için kalıcı olur.

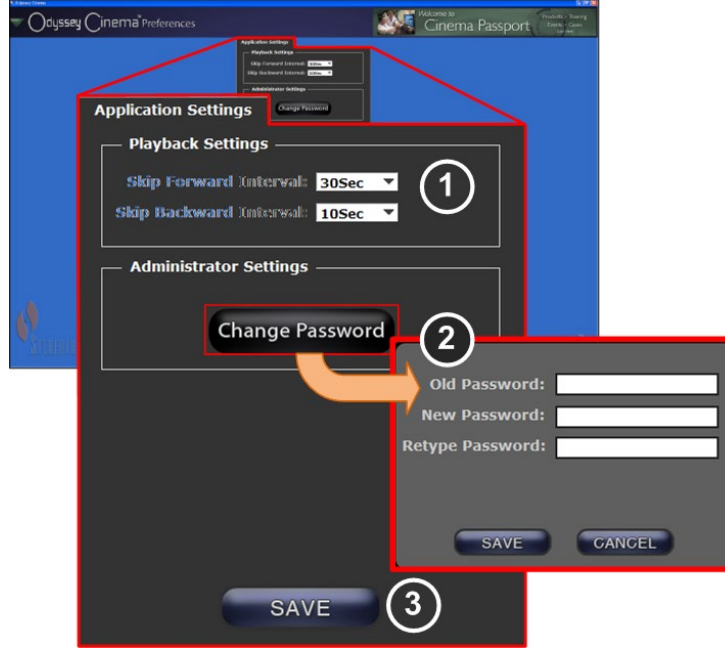

Şekil 40 – Application Settings'i (Uygulama Ayarları) içeren Preferences (Tercihler) Penceresi

### Preferences (Tercihler) penceresi / Application Settings (Uygulama Ayarları) kılavuzu

① **Playback Settings (Oynatma Ayarları).** *Odyssey Cinema*'da kaydedilen videolar için ayarları seçebilirsiniz. Bu ayarlar Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) pencerelerindeki İleri Git ve Geri Git düğmelerini etkiler.

- **Step Forward Intervals (İleri Gitme Aralıkları).** Menüye erişmek için açılan oku tıklatarak İleri Git düğmesinin aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 30 saniyedir; seçim aralığı 1 saniye - 1 saattir.
- **Step Backward Intervals (Geri Gitme Aralıkları).** Menüye erişmek için açılan oku tıklatarak Geri Git düğmesinin aralıklarını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan 10 saniyedir; seçim aralığı 1 saniye - 1 saattir.



Şekil 41 – İleri Gitme Düğmesi




Şekil 42 – Geri Gitme Düğmesi

- ② **Change Password (Parolayı Deęiřtir).** Change password (Parolayı deęiřtir) iletiřim kutusunu grntlemek iin bu dęmeyi tıkladın:
- **Old Password (Eski Parola):** Geerli oturumu bařlatmak iin kullanılan parolayı yazın.
  - **New Password (Yeni Parola):** Yeni bir parola yazın. Parola en az 1 byk harf, 1 kk harf ve 1 sayısal karakter ieren minimum 8 karakterden oluřmalıdır.
  - **Retype Password (Parolayı Yeniden Yaz):** Yeni parolayı doęrulamak iin yeniden yazın.
  - **Save (Kaydet) / Cancel (İptal):** Save (Kaydet) seeneęi deęiřiklikleri kaydeder ve iletiřim kutusunu kapatır. Cancel (İptal) seeneęi iletiřim kutusunu kapatır ve deęiřiklikleri kaydetmez.
- ③ **Save (Kaydet):** Application Settings (Uygulama Ayarları) zerinde yapılan tm deęiřiklikleri kaydeder ve iletiřim kutusunu kapatır.



# Passport (Pasaport) penceresi

Passport (Pasaport) penceresi *Odyssey Cinema*'yı kullanan profesyonellerin ilgisini çeken bilgileri sağlar.

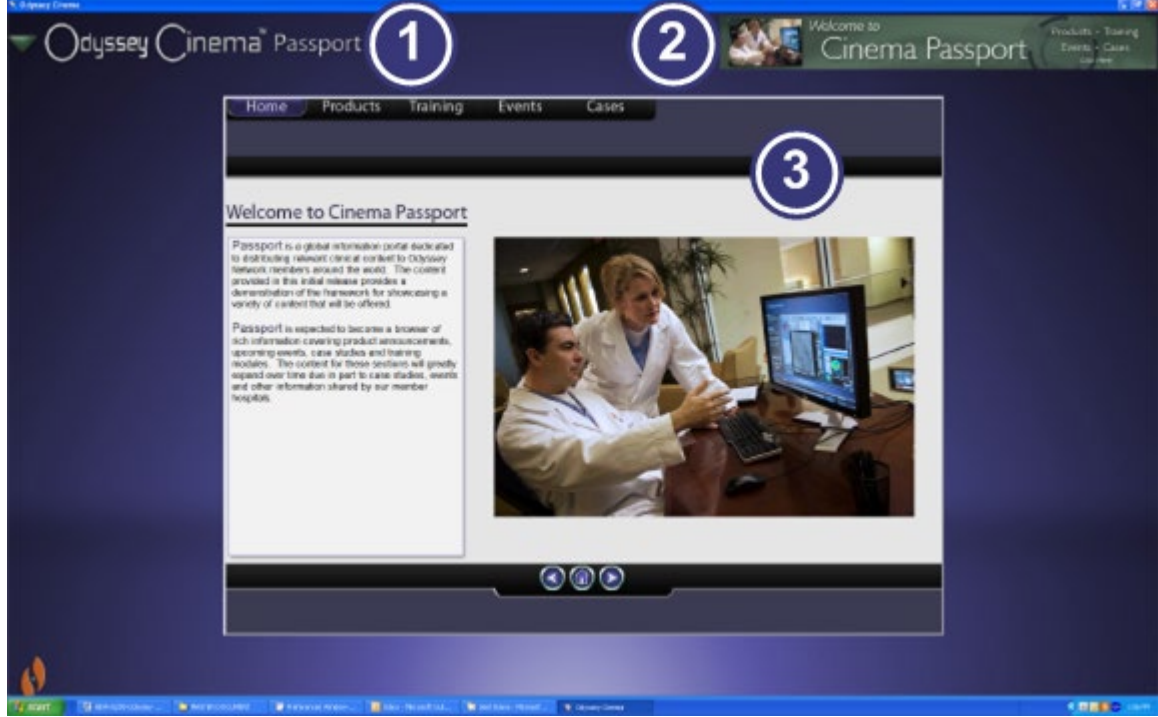

Şekil 43 – Passport (Pasaport) penceresi

## Passport (Pasaport) penceresi kılavuzu

- ① **Pencere etiketi.** Her bir pencerede görüntülenir, ancak Viewer (Görüntüleyici) ve Archiver (Arşivleyici) için tam ekran modunda görüntülenmez.
  - ② **Manşet grafiği.** *Odyssey Cinema* kullanıcıları için yeni haber manşetleri. Her bir pencerede görüntülenir, ancak Viewer (Görüntüleyici) veya Archiver (Arşivleyici) penceresinde tam ekran modunda görüntülenmez.
  - ③ **Tarayıcı.** *Odyssey Cinema* kullanıcıları için ayrıntılı bilgiler.
- ★ **Not:** Passport (Pasaport) *Odyssey Ağ*'ından bilgiler sağlar, World Wide Web'e erişim sağlamaz.

## Oturumu Kapatma

Main Menu (Ana Menü) içinden veya her bir sayfadaki Navigasyon menüsünden oturumu kapatabilirsiniz.



**Şekil 44 – Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Navigasyon Menüsü (sağda);  
Log Off (Oturumu Kapat) düğmesini içeren Main Menu (Ana Menü)**

# Ek A: Kurulum


*Odyssey Cinema* İstemci'yi sizin (bir Stereotaxis temsilcisi veya Bilgi Teknolojisi departmanınızın üyesi yerine) kurmanız gerekiyorsa aşağıdaki adımları izleyin.



**Önemli:** *Odyssey Cinema* İstemci'yi bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayara kurmadan önce Stereotaxis temsilcisiyle iletişim kurmalısınız. Temsilci bilgisayarın veya dizüstü bilgisayarın Cinema ile kullanılması için yetki verecek ve şunları doğrulayacaktır:


- Bilgisayar/dizüstü bilgisayar ve ağ konumunun *Odyssey Cinema* gereksinimlerini karşıladığını
- Kurulumun izin verilen maksimum konum sayısını aşmadığını

1. PC'de Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açın.
2. *Odyssey Cinema* Yazılım CD'sini disk sürücüsüne takın.
3. Client Installer (İstemci Kurma Programı) klasörünü açın.
4. *Odyssey Cinema* İstemci Setup.exe kurma programını başlatın. Kurma programı başlatma ekranı görüntülenir.
5. Devam etmek için **Next** (İleri) seçeneğini tıklatın.

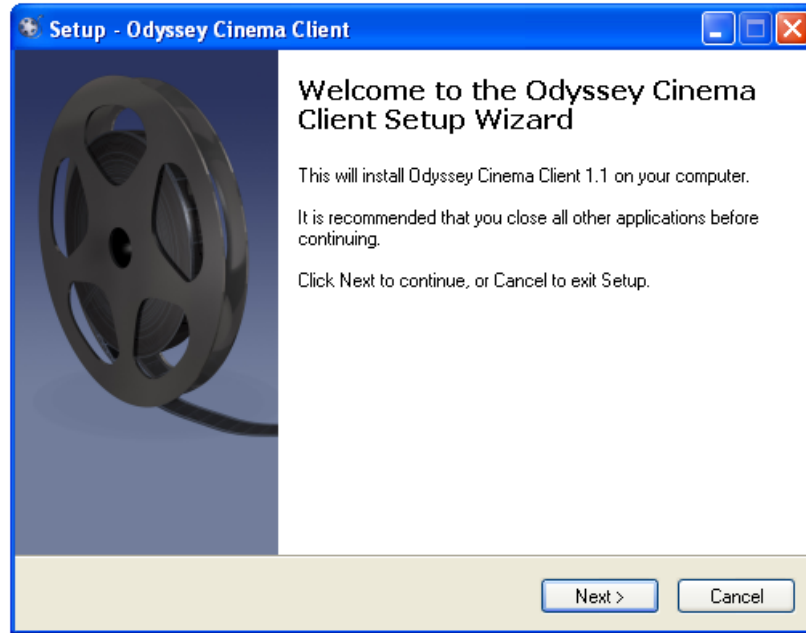


**Şekil 45 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran**

6. *Odyssey Cinema* Yönetimi Sunucusu'nun IP Adresini ve bilgisayara atanan İstemci Adını girin. Bunlar Stereotaxis veya ağ yöneticiniz tarafından sağlanır.
7. Devam etmek için **Next** (İleri) seçeneğini tıklatın.

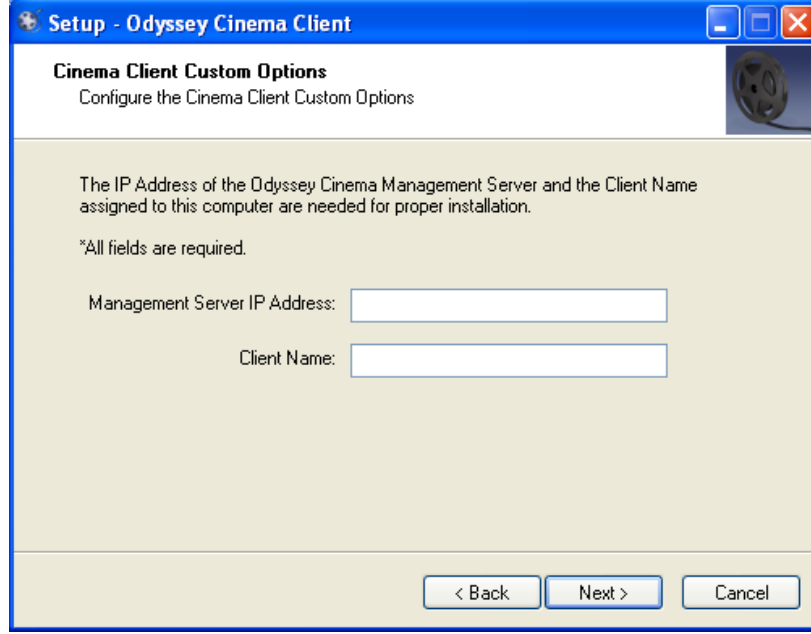


**Şekil 46 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Custom Options (Özel Seçenekler)**

8. Bilgisayarınızda minimum gerekli Java Runtime Environment (JRE) sürümü kurulu değilse Prerequisites (Önkoşullar) ekranı görüntülenerek JRE'nin kurulacağını belirtir. JRE önceden kurulmuşsa Installing (Kuruluyor) ekranı görüntülenir.
9. JRE kurulumuna devam etmek için **Next** (İleri) seçeneğini tıklayın.

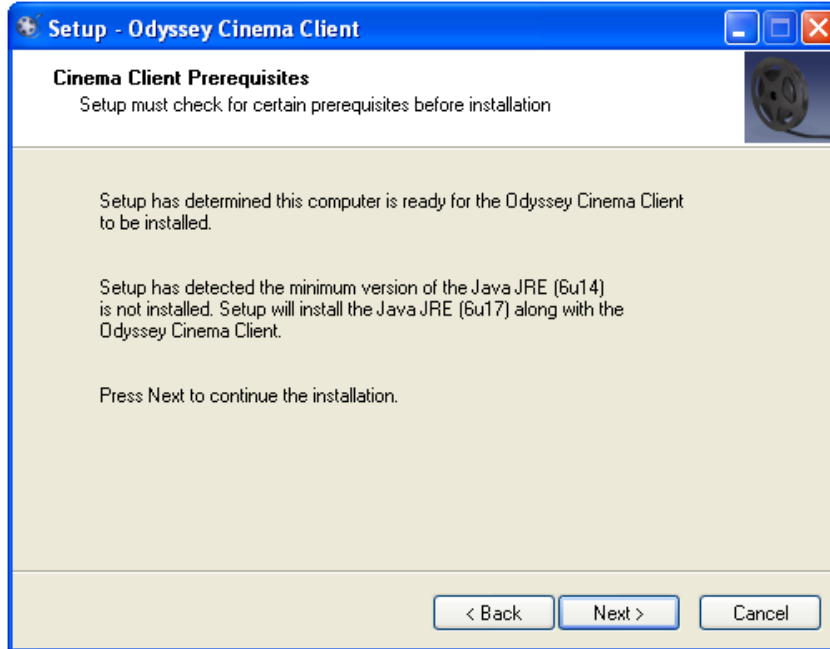


**Şekil 47 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Prerequisites (Önkoşullar): Java Runtime Environment**

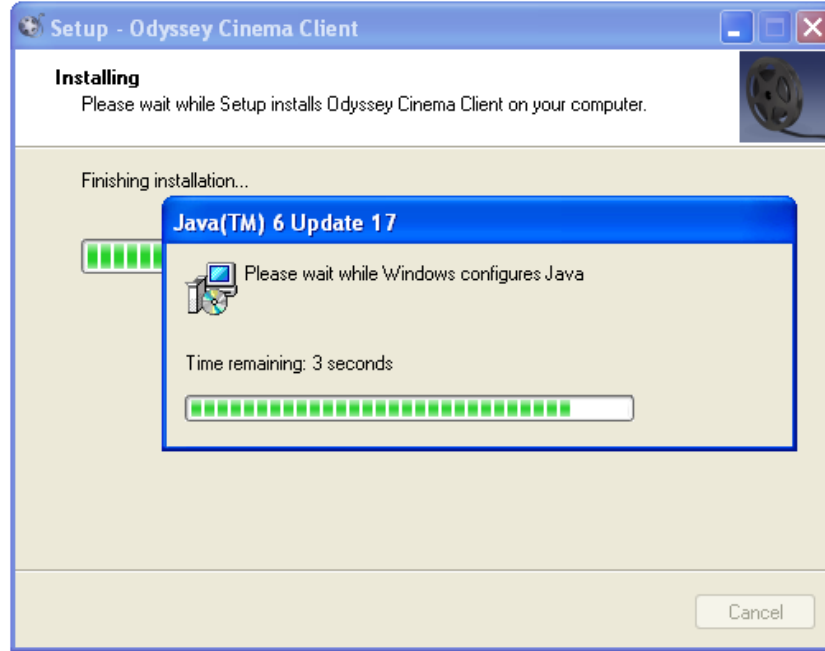

Şekil 48 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Installing (Kuruluyor)

10. Kurulumun sonunda Completed (Tamamlandı) ekranı görüntülenir. Kurma programını kapatmak için **Finish** (Son) seçeneğini tıklayın; *Odyssey Cinema* İstemci'yi başlatma seçeneğiniz vardır.

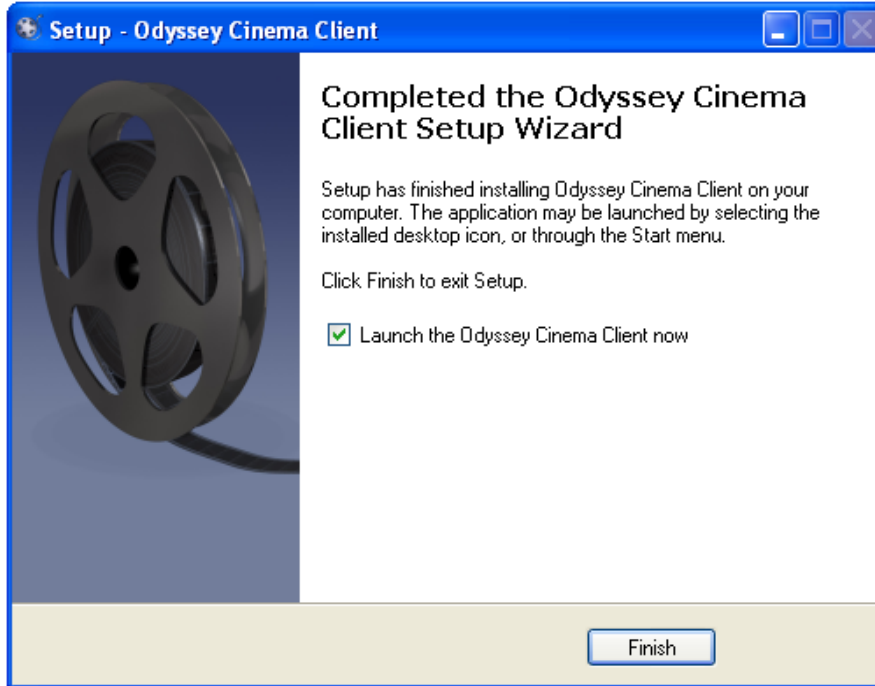

Şekil 49 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – Completed (Tamamlandı)

11. *Odyssey Cinema* İstemci uygulaması şimdi kurulmuştur. Uygulamayı başlatın.

12. Uygulama bir bilgisayarda ilk kez başlatıldığında, “The application’s digital signature cannot be verified” (Uygulamanın dijital imzası doğrulanamıyor) uyarısını görebilirsiniz. Bu uyarının yeniden görüntülenmesini önlemek için “Always trust ...” (Her zaman güven...) onay kutusunu işaretleyin.



Şekil 50 – Setup (Kurulum) iletişim kutusu – birinci ekran

13. İstemci başlatıldığında, kurulumu ve ağ bağlantısını doğrulamak için size sağlanan User Name (Kullanıcı Adı), Password (Parola) ve Client Name (İstemci Adı) ile oturum açın.
- ★ **Not:** Uygulama her başlatıldığında oturum açılması gerekir. Uygulama ilk kez çalıştırıldığında, oturum açma için bilgisayara atanmış bir User Name (Kullanıcı Adı), Password (Parola) ve Client Name (İstemci Adı) gerekir. Sonraki oturum açmalarda yalnızca User Name (Kullanıcı Adı) ve Password (Parola) gerekir. Aşağıdaki grafiklerde, ilk oturum açma için ve sonraki standart oturum açmalar için login (oturum açma) ekranları gösterilmektedir.



**Şekil 51 – İlk login (oturum açma) iletişim kutusu**




**Şekil 52 – Sonraki standart login (oturum açma) iletişim kutusu**

Kurulum masaüstüne bir *Odyssey Cinema* kısayolu ekler. Masaüstü simgesi *Cinema*'yı varsayılan “pencereli” moda çalıştırır.



**Şekil 53 – Masaüstü kısayolu**

Kurulum Windows Start (Başlat) Menüüne de iki kısayol ekler. Birincisi *Odyssey Cinema* varsayılan mod olan “pencereli” mod içindir. İkincisi *Odyssey Cinema* Tam ekranıdır.

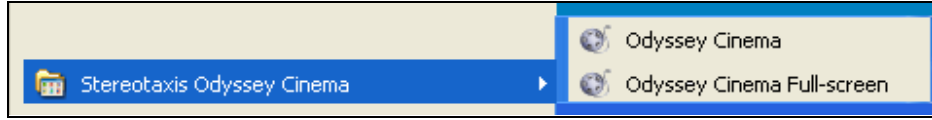

**Şekil 54 – Start (Başlat) menüsü kısayolları**



**Şekil 55 – Pencereli modda Login (Oturum açma) ekranı**



**Şekil 56 – Tam ekran modunda Login (Oturum açma) ekranı**



# Dizin

Application Settings (Uygulama Ayarları) kılavuzu .....	26	Oturumu Kapatma .....	29
Archiver (Arşivleyici)		Passport (Pasaport) penceresi .....	28
Araç Çubuğu .....	22	Passport (Pasaport) Penceresi kılavuzu ...	28
Düğmeler .....	23	Password (Parola).....	33, 34
Göstergeler.....	22	Pencereli mod .....	35
Göstergeler kılavuzu .....	22	Playback Settings (Oynatma Ayarları) ....	26
Pencere .....	18	Preferences (Tercihler) penceresi.....	26
Pencere kılavuzu.....	18	Preferences (Tercihler) penceresi kılavuzu .....	26
Seçim panelleri.....	19	Prerequisites (Önkoşullar) ekranı .....	31
Seçim panelleri kılavuzu .....	19	Procedures (Prosedürler) paneli düğmeleri.....	20
Zaman Çizgisi.....	24	Sözlük.....	7
Başlarken .....	8	Start (Başlat) Menüsü .....	35
Bu kullanıcı kılavuzu.....	7	Step Backward Intervals (Geri Gitme Aralıkları) .....	26
Çağrı Merkezi .....	7	Step Forward Intervals (İleri Gitme Aralıkları) .....	26
Change Password (Parolayı Değiştir) .....	27	Stereotaxis ile İletişim.....	ii
Client Name (İstemci Adı) .....	33, 34	Table of Figures.....	iii
Ek A: Kurulum.....	30	Tam ekran modu .....	35
Ekran görünümleri .....	16	Teknik Özellikler.....	6
Genel Bakış.....	5	User Name (Kullanıcı Adı) .....	33, 34
Giriş.....	6	Uyarılar/Önlemler .....	5
İçindekiler.....	iii	Uygulamanın dijital imzası .....	33
Java Runtime Environment.....	31	Viewer (Görüntüleyici)	
JRE .....	31	Araç Çubuğu .....	14
kısayol.....	34	Düğmeler .....	14
Kullanım Amacı.....	5	Modlar .....	12
Kurulum .....	30	Navigasyon menüsü.....	12
Login (Oturum açma) ekranı .....	9	Pencere kılavuzu .....	11
Main menu (Ana menü) .....	10	Seçim panelleri .....	13
Masaüstü kısayolu.....	34	Seçim panelleri kılavuzu .....	13
<i>Navigant</i> Navigasyon İş İstasyonu		Zaman Çizgisi .....	16
Sözlük.....	7	Viewer (Görüntüleyici) Penceresi .....	11
<i>Niobe</i> Manyetik Navigasyon Sistemi		Yer İşareti	
Sözlük.....	7	Düzenleme .....	25
<i>Odyssey</i> Ağ Merkezi		Ekleme.....	25
Sözlük.....	7	Gözden Geçirme.....	25
<i>Odyssey</i> Ağı		Silme .....	25
Sözlük.....	7	Yer İşaretleri.....	24
<i>Odyssey Cinema</i> .....	6		
<i>Odyssey Cinema</i> İstemci.....	6		
<i>Odyssey Cinema</i> İstemcisi			
Sözlük.....	7		