



Felhasználói Kézikönyv



710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101 USA
1-866-646-2346
1-314-678-6100
www.stereotaxis.com
Gyártva: Amerikai Egyesült Államok

© Stereotaxis 2024, 2026



Kapcsolat

Stereotaxis, Inc.
710 N. Tucker Blvd
Suite 110
St. Louis, MO 63101
Amerikai Egyesült Államok
www.stereotaxis.com
1-314-678-6100 (*Stereotaxis — USA*)
0031.75.77.133.13 (*Stereotaxis – EU*)
1-314-678-6200 (*TeleRobotic ügyfélszolgálati csoport– USA*)



Gyártva: Amerikai Egyesült Államok

Meghatalmazott Képviselő az Európai Közösség területén

MDSS
(Medical Device Safety Service GmbH)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Németország



Meghatalmazott képviselő az Egyesült Királyságban

MDSS-UK RP LIMITED
6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester M14 5TP
Egyesült Királyság
Tel.: 0044 (0)7898 375115



Importőr

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen
33 - Suite 123,
2595 AM The Hague
Hollandia



A Stereotaxis védjegyei

- Az *Odyssey* a Stereotaxis, Inc. Egyesült Államokban, Európai Közösségben és Egyesült Királyságban bejegyzett védjegye.
- Az *Odyssey Vision* a Stereotaxis, Inc. védjegye.

A minden más márkanév, terméknév, valamint védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

A Stereotaxis kiegészítő rendszerei XE eszközinformáció

Rendszer	Cikkszám
<i>Odyssey Vision</i>	001-007010-2



FIGYELMEZTETÉS: A berendezés módosítása nem megengedett. A *SynX* nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A felhasználó ne kísérelje meg a *SynX* egyetlen részét se szétszerelni.



FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ezt a berendezést kizárólag védőföldeléssel rendelkező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.

Ártalmatlanítás

A terméket újra kell hasznosítani, és nem szabad általános hulladékként ártalmatlanítani (a WEEE IV. melléklete, illetve az EN 50419 szabvány szerint).

Hulladékkezelés és újrahasznosítás

A vállalkozó felelős a *SynX* berendezésben található fém- és elektronikai hulladékok ártalmatlanításáért és újrahasznosításáért.

Javasolt vállalkozó: Walch Recycling & Eldementalle



Megjegyzés a felhasználó, illetve a beteg számára

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkező bármilyen súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, továbbá a felhasználó, valamint a beteg illetősége szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Borítókép

Borítókép © 2024 Stereotaxis, Inc.

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés.....	1
Bevezetés	1
Tudnivalók a felhasználói útmutatóról	1
Rendeltetés	1
Rendeltetés szerinti felhasználók.....	1
Klinikai előnyök az orvos és a személyzet számára.....	1
Ábrák és szimbólumok.....	2
Szószedet	4
Biztonság	4
Figyelmeztetések és óvintézkedések	4
2. Alapvető információk.....	5
A SynX telepítése	5
Fénykép küldése regisztrált felhasználó részére	6
Jóváhagyási kérelmet kapott kapcsolatok szerkesztése	8
Mi történik, ha a fiókom jóváhagyása sikertelen?	8
3. Laboratóriumok létrehozása, csatlakozás és megtekintés.....	9
Laboratórium létrehozása.....	9
Hostolás QR kóddal	9
Hostolás numerikus hozzáférési kóddal.....	9
Hostolás helyi bejelentkezéssel	9
Hostolás beállítása	10
Beállítások módosítása a laboratóriumvezető eszközén	10
Hogyan jelenik meg a többi eszközöm hostolás közben?.....	11
Laboratórium megtekintése.....	11
Kezdőképernyőről	11
Keresésből.....	11
Hívás.....	11
Kimenő hívás – Kezdőképernyőről	11
Kimenő hívás – Keresésből	12
Kapcsolat hozzáadása aktív híváshoz	12
Csatlakozás hostolt munkamenethez – Névjegyzékből	12
Csatlakozás hostolt munkamenethez – Helyszínlistából	13

Csatlakozás hostolt munkamenethez – Labornézetből	14
Kérések	15
Kapcsolat- vagy helyhozzáférési kérelem küldése	15
Kapcsolat- vagy jóváhagyási kérelemre adott válasz	15
4. Profilok és beállítások szerkesztése	16
Profil szerkesztése	16
Személyes adatok szerkesztése.....	16
Profilkép szerkesztése.....	16
Beállítások	17
Értesítési beállítások.....	17
Audio és Video beállítások	17
Adatvédelmi és biztonsági beállítások.....	17
5. Fiókkezelés és kijelentkezés.....	18
Kijelentkezés és a <i>SynX</i> leállítása	18
Fiók törlése és a <i>SynX</i> törlése.....	18
6. Műszaki problémák elhárítása	Error! Bookmark not defined.
Hiba bejelentése.....	19
Tárgymutató	20

Ábrajegyzék

1. ábra Azonosítási lehetőségek jóváhagyása.....	6
2. ábra Azonosítási lehetőségek jóváhagyása.....	7
3. ábra Korlátozott hozzáférés nézet.....	7
4. ábra Teljes hozzáférés nézet.....	8
5. ábra "... " Gomb a hívás közbeni vezérlőkből	10
6. ábra Host kérése gomb	10
7. ábra Automatikus elutasítás gomb	10
8. ábra Automatikus elfogadás gomb	10
9. ábra Összes némítása és Mind eltávolítása gombok	11
10. ábra Kapcsolati információk képernyő	13
11. ábra Laboratórium Info képernyő.....	14
12. ábra Profilkép szerkesztési lehetőségek	16

1. Áttekintés

Bevezetés

Az SynX™ egy opcionális kiegészítő termék, és a következő funkciókat biztosítja:

- Eljárásról készült videó megtekintése valós időben–
 - A kórházból vagy egy távoli helyszínről
 - Mobileszköz vagy PC használata a *SynX* rendszerrel vagy applikációval.
- Videócsvevítés a hosttal és más felhasználókkal
 - Együttműködés más orvosokkal élő beavatkozások alatt.
 - A rezidensek számára lehetővé teszi, hogy képzési célból távolról nézhessenek élő beavatkozásokat.

Tudnivalók a felhasználói útmutatóról

Az útmutató célja, hogy a *SynX* rendszer felhasználója számára útmutatást adjon annak működtetéséhez. A *SynX* felhasználói útmutató a *SynX* rendszer működését mutatja be. A *SynX* alkalmazás működtetését írja le az intervenciós laboratóriumban történő használatra vonatkozóan. Nem írja le, hogyan kell üzemeltetni más eszközöket, amelyekkel esetleg együttműködik.

Az eszköz rendeltetése

A *SynX* lehetővé teszi a kapcsolatot az intervenciós laboratórium és az orvosok között, lehetővé téve a távoli támogatást és az együttműködést a megosztott laboratóriumi videóstreamek és a személyközi hívások segítségével. Nincsenek ismert ellenjavallatok.

Felhasználói célcsoportok

A *SynX* rendszert kizárólag olyan képzett egészségügyi szakemberek használhatják, akik alapos képzésben részesültek annak használata kapcsán.

Klinikai előnyök az orvos és a személyzet számára

A *SynX* lehetővé teszi a valós idejű beavatkozási képernyők több felhasználóval történő megosztását közvetítésekhez, szakmai együttműködéshez és klinikai vagy műszaki támogatáshoz.

Ábrák és szimbólumok

A Vigyázat és a Figyelmeztetés minden olyan eljárás szövege előtt megtalálható, amelyek kockázatot jelenthetnek a kezelő(k)re, a betegre és a berendezésre nézve. Az általános figyelmeztetéseket a *Biztonság* című fejezet Figyelmeztetések és óvintézkedések összefoglalója tartalmazza. Fordítson különös figyelmet az olyan utasításokra, amelyekhez figyelmeztetések, megjegyzések és szimbólumok tartoznak. A következő ábrák és szimbólumok szerepelnek a jelen felhasználói útmutatóban:

FIGYELMEZTETÉS		FIGYELMEZTETÉ A jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzeteket jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést eredményezhet.
FIGYELEM		FIGYELEM A jelölés olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amelynek figyelmen kívül hagyása a beteg vagy a kezelő sérülését vagy a berendezés károsodását okozhatja.
Megjegyzés		Megjegyzés A olyan információkra hívja fel a figyelmet, amelyek hatással lehetnek az eljárás eredményére.

A dokumentumban és/vagy a rendszer komponensein az alábbi grafikus szimbólumok használatosak:

Szimbólum	Név	Leírás
REF	Katalógusszám	Cikkszám
	Figyelem	Azt jelzi, hogy a felhasználónak át kell tekintenie a felhasználói útmutatót olyan fontos, figyelmeztető információkért, például figyelmeztetésekért és óvintézkedésekért, amelyek az orvostechikai eszközön nem tüntethetők fel.
	Olvassa el az utasításokat	További információkért és útmutatásért tekintse meg a Felhasználói útmutatót.
	Gyártás dátuma	Az orvostechikai eszköz gyártási dátuma.

Szimbólum	Név	Leírás
	Európai képviselő	A meghatalmazott képviselő neve és címe az Európai Közösségben.
	Importőr	Az orvostechikai eszközt importáló entitás neve és címe.
	Gyártó	A termék gyártójának neve és címe.
	Orvostechikai eszköz	Jelzi, hogy a berendezés orvostechikai eszköznek minősül.
	Újrahasznosítás: elektronikus berendezés	Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosításáról szóló 2002/96/EK/EU irányelv hatálya alá tartozó termék.
	Tekintse meg a felhasználói útmutatót/kézikönyvet	Olvassa el a felhasználói útmutatót/kézikönyvet
	Sorozatszám	A gyártó egy adott orvostechikai eszköz azonosítására szolgáló sorozatszáma.
	Egyesült királyságbeli felelős személy	Az Egyesült Királyságban (UK) letelepedett személy, aki olyan gyártó nevében jár el annak egyesült királyságbeli szabályozás szerinti kötelezettségeivel kapcsolatban, akinek a központja nem az Egyesült Királyságban található.

Szószedet

Kifejezés	Leírás
<i>SynX</i>	Globális videostreaming platform, amely PC-s böngészőkből és mobil eszközökről is elérhető.
<i>Host laboratórium</i>	Csoportos videokonferencia hívásért felelős felhasználó, amely tartalmazza az élő laborvideó-közvetítést.
<i>Hostolt munkamenet</i>	Csoportos videokonferencia hívás, amely tartalmazza az élő laborvideó-közvetítést.
<i>Laboratóriumi résztvevő</i>	A csoportos videókonferencia-hívásban részt vevő felhasználó, amely tartalmazza az élő laborvideó-közvetítést.

Biztonság

Figyelmeztetések / óvintézkedések:



FIGYELMEZTETÉS: A *SynX*-t kizárólag olyan képzett egészségügyi szakemberek használhatják, akik alapos képzésben részesültek annak használata kapcsán.



FIGYELMEZTETÉS: A *SynX* segítségével megtekintett videótartalom kizárólag támogatási és együttműködési célokra szolgál.

2. Alapvető információk


A SynX telepítése

1. A felhasználó telepítheti a SynX szoftvert az eszközére.
2. A SynX alkalmazás a következő helyekről tölthető le vagy használható:
 - a. [Apple App Store](#)
 - i. A rendszerkövetelmény iOS 12.0 vagy újabb verziójú eszköz.
 - ii. Először ellenőrizze az App Store-ban, hogy elérhető-e a kívánt eszközre.
 - b. [Google Play Store](#)
 - i. A rendszernek Android 5.0 Lollipop (21-es API-szint) vagy újabb verzióra van szüksége.
 - ii. Először ellenőrizze az App Store-ban, hogy elérhető-e a kívánt eszközre.
 - c. [Közvetlen URL a SynX-hez asztali vagy hordozható számítógéphez](#)
 - i. A számítógéphez szükséges böngésző a Google Chrome 100-as vagy újabb verziója.
 - ii. Ellenőrizze a böngésző verzióját, és szükség esetén frissítse a választott számítógépen.
1. Navigáljon a **SynX Sign Up** -re a SynX weboldalán.
2. Ellenőrizze az e-mail-címét.
 - a. A hitelesítő kódot a megadott e-mail-címre küldjük. Ha nem találja a beérkezett üzenetek között, ellenőrizze a levélszemét mappát is.



Megjegyzés: Ez a kód nem S- karakterekkel kezdődik.

3. A létrehozásához töltse ki a kötelező mezőket.
4. Válassza a **Meghívókód használata** gombot (lásd az **1. ábrán**) a **Személyazonosság ellenőrzése** oldalon.

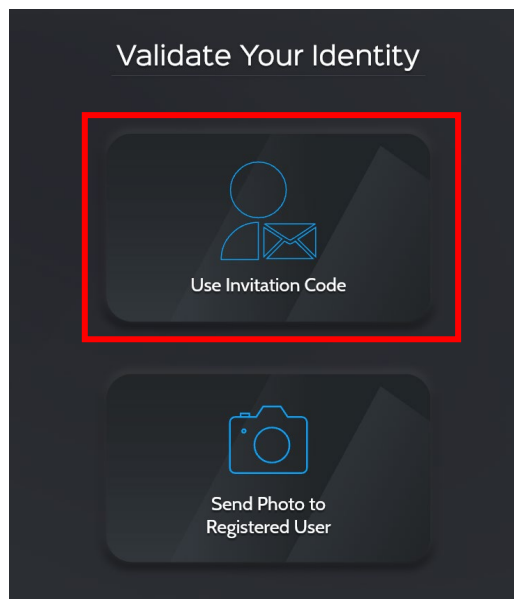

1. ábra Azonosítási lehetőségek jóváhagyása

- Adja meg a *SynX* adminisztrátora által Önnek küldött 8 jegyű meghívókédot.



Megjegyzés: Ez a kód S- karakterekkel kezdődik.

- Üdvözljük a *SynX*-nél.

Fénykép küldése regisztrált felhasználónak




Megjegyzés: Kérjük, hogy kamerával rendelkező eszközt használjon.

- Navigáljon a **SynX Sign Up** -re a *SynX* weboldalán.
- Ellenőrizze az e-mail-címét.
 - A hitelesítő kódot a megadott e-mail-címre küldjük. Ha nem találja a beérkezett üzenetek között, ellenőrizze a levélszemét mappát is.



Megjegyzés: Ez a kód nem S- karakterekkel kezdődik.

- A létrehozásához töltse ki a kötelező mezőket.
- Válassza a **Fénykép küldése regisztrált felhasználónak** gombot (az alábbi 2. ábrán látható) a **Személyazonosság ellenőrzése** oldalon.

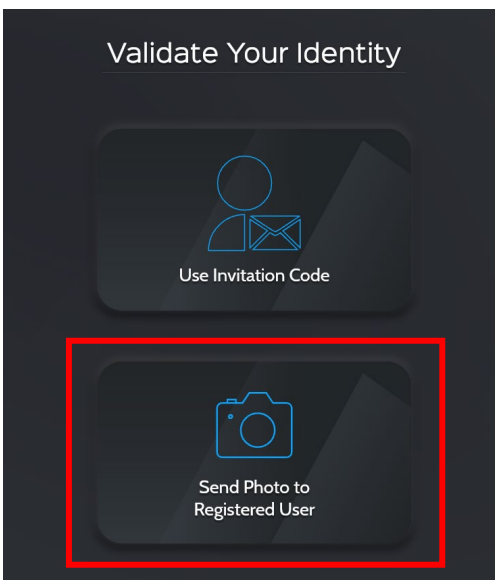


2. ábra Azonosítási lehetőségek jóváhagyása

5. Adja meg legfeljebb 3 olyan személy nevét, akiket már ismer az *SynX* rendszeren belül. E személyek egyike fogja megerősíteni az Ön személyazonosságát.
6. Készítsen egy fényképet magáról, amelyet elküldhet a kiválasztott kapcsolatainak.
7. Erősítse meg és küldje el a fényképet.
8. Nem hitelesített felhasználóként korlátozott hozzáféréssel fog rendelkezni a weboldalhoz (amelyet a **3. ábra** mutat be).




Megjegyzés : Csak korlátozott hozzáféréssel módosíthatja a telefonszámát és a jelszavát.

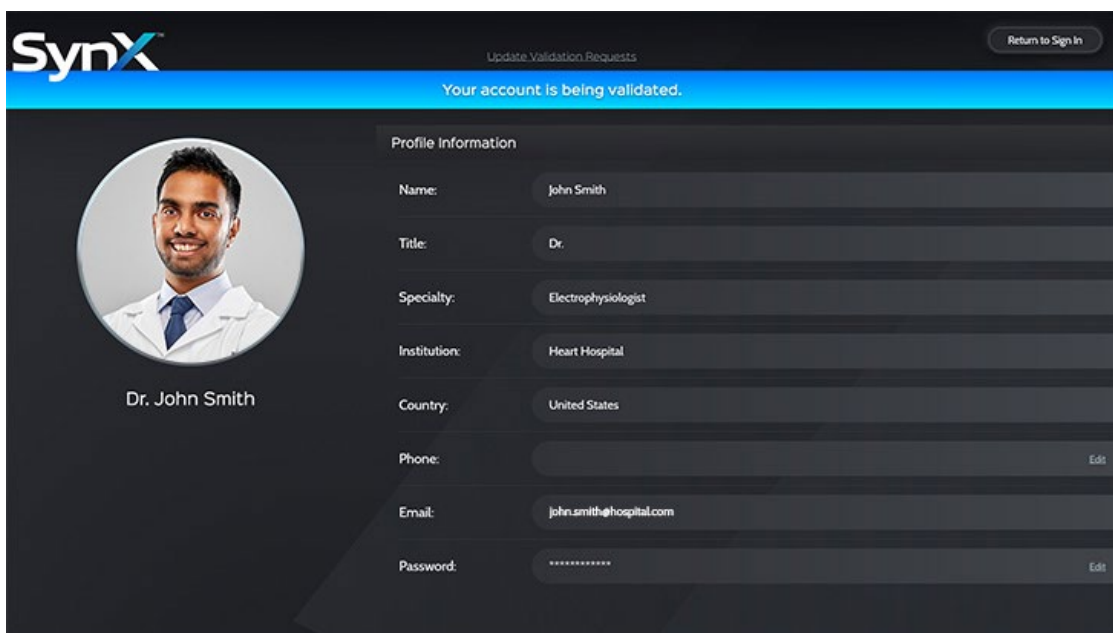

3. ábra Korlátozott hozzáférés megtekintés

9. Miután az Ön által kiválasztott kapcsolatok egyike jóváhagyta, kap az alkalmazáshoz, amint az **4. ábrán** látható.

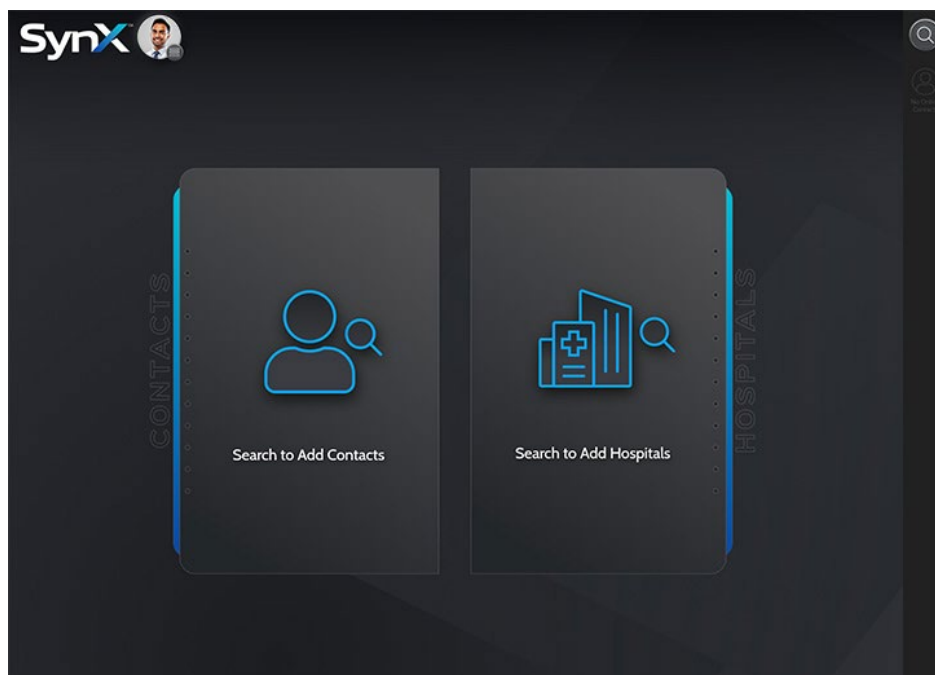

4. ábra Teljes hozzáférés nézet

Jóváhagyási felkérést kapott kapcsolatok szerkesztése

1. Kattintson a **Jóváhagyás frissítése kérelem** linkre az oldal felső részén.
2. A lehetséges jóváhagyók eltávolításához:
 - a. Kattintson a neve melletti X-re.
3. Jóváhagyó hozzáadása:
 - a. Adja meg legfeljebb 3 személy nevét, akiknek új jóváhagyási kérelmet szeretne küldeni.

Mi történik, ha a fiókjóváhagyásom sikertelen?

Ha sikertelen a fiókjóváhagyása lehetősége van a frissítésre és új ellenőrzési kérések küldésére más személyek részére a SynX rendszerben. Kattintson a **Új jóváhagyási kérés küldése** linkre az oldal felső részén.

3. Laboratóriumok létrehozása, csatlakozás és megtekintés

Laboratórium létrehozása



Megjegyzés: A laboratóriumban a laborvezetői tablethez hozzáférő bármely felhasználó saját fiókjából tud szerepet betölteni.

Hostolás QR kóddal

1. Lépjen be a *SynX*-be egy másodlagos, kamerával rendelkező mobil eszközön.
2. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
3. Kattintson a **Laboratórium létrehozása** gombra a menü felső részén.
4. Oldja fel a laborvezetői tablet zárolását.
5. A laborvezető tabletjén megjelenő QR-kódot olvassa be a másik eszköz kamerájával.
6. A beolvasást követően a másodlagos eszközön használt fiók alatt indul el a host által indított munkamenet.

Hostolás numerikus hozzáférési kóddal

1. Lépjen be a *SynX*-be egy másodlagos eszközön.
2. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
3. Kattintson a **Laboratórium létrehozása** gombra a menü felső részén.
4. Oldja fel a laborvezetői tablet zárolását.
5. Írja be a laborvezetőnél látható numerikus kódot a jelzett mezőbe.
6. Kattintson a **Bejelentkezés-re**.
7. A munkamenet azon a fiókon indul el, amellyel a másodlagos eszközön bejelentkezett.

Hostolás helyi bejelentkezéssel

Ha még korábban nem hostolta ezt a laboratóriumot:

1. Oldja fel a laborvezetői tablet zárolását.
2. Kattintson a **Belépés** linkre a képernyő jobb alsó sarkában, a képernyő jobb oldalán található színes négyzetben.
3. Adja meg felhasználónevét és jelszavát.

Ha már korábban hostolta ezt a laboratóriumot:

1. Oldja fel a laborvezetői tablet zárolását.
2. Kattintson a nevét és avatarját tartalmazó négyzetre.

- Írja be a jelszavát.

Hostolás beállítása

A SynX lehetővé teszi a hostok számára, hogy több, munkamenetre jellemző beállítással szabályozzák a munkamenet működését.


Beállítások módosítása a laboratóriumvezető eszközén

Kattintson a **"..." gombra** (a 5. ábrán látható) a hívás közbeni vezérlőkhöz.




5. ábra "..." Gomb a hívás közbeni vezérlőkből

- Bejövő hívások beállíthatók:
 - Host megkérdezése (6. ábrán látható ikon) – A host minden egyes belépni kívánó személy esetében értesítést kap.

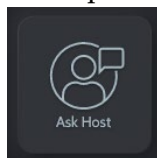


6. ábra Host megkérdezése gomb

- Automatikus elutasítás (7. ábrán látható ikon) – Minden további, a házigazda által indított munkamenetbe bejelentkezni próbáló személy hozzáférése megtagadásra kerül.

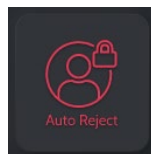

7. ábra Automatikus elutasítás gomb

- Automatikus elfogadás (8. ábrán látható ikon) – Minden további, a host által indított munkamenetbe bejelentkezni próbáló személy hozzáférést kap.

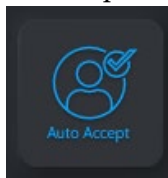

8. ábra Automatikus elfogadás gomb

2. Kattintson a **Összes némítása** gombra a munkamenet összes résztvevőjének némításához.
3. Kattintson a **Mind eltávolítása** gombra a munkamenet összes résztvevőjének eltávolításához. (**Összes némítása** és az **Mind eltávolítása** gombok a 9. ábrán láthatók.)



9. ábra Összes némítása és Mind eltávolítása gombok

Hogyan jelenik meg a többi eszközöm hostolás közben?

Amikor hostol, minden olyan eszköz, amelyen be van jelentkezve – a laborvezető eszközt kivéve – műholdas eszközként fog működni, és lehetővé teszi a beállítások módosítását, hívók hozzáadását és a munkamenet befejezését.

Laboratórium megtekintése

Kezdőképernyőről

1. Navigáljon a helyszínek listájához az alkalmazás főképernyőjén.
2. Ha a laboratóriumok nem láthatók, kattintson a helyszín mezőre a laborlista kibontásához.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt laboratóriumot.
4. A labor információs képernyőjén, kattintson a **Laboratórium megtekintése** lehetőségre.

Keresésből

1. Kattintson a keresés ikonra a képernyő jobb felső sarkában.
2. Keresse meg azt a helyszínt, amelynek laboratóriumát meg szeretné tekinteni.
3. Ha a laboratóriumok nem láthatók, kattintson a helyszín mezőre a laborlista kibontásához.
4. Válassza ki a megtekinteni kívánt laboratóriumot.
5. A labor információs képernyőjén, kattintson a **Laboratórium megtekintése** lehetőségre.

Hívás

Kimenő hívás – Kezdőképernyőről

1. Lépjen az alkalmazás főképernyőjén található névjegylistára.

2. Válassza ki a hívni kívánt kapcsolatot.
3. A kapcsolat információs képernyőjén kattintson a **Hívás indítása** gombra.
4. Mialatt kicseng, megjelenik egy videó-előnézet, és lehetősége lesz a hívás közbeni beállítások módosítására.

Kimenő hívás – Keresésből

1. Kattintson a keresés ikonra a képernyő jobb felső sarkában.
2. Keressen rá arra a személyre, akit fel szeretne hívni.
3. Ha a keresett személy már szerepel a névjegyzékben, kattintson a mezőben található kék videó ikonra.
4. A kapcsolat információs képernyőjén kattintson a **Hívás indítása** gombra.
5. Mialatt kicseng, megjelenik egy videó-előnézet, és lehetősége lesz a hívás közbeni beállítások módosítására,

Kapcsolat hozzáadása aktív híváshoz




Megjegyzés: Ezzel a hívási módszerrel több kimenő hívást is engedélyezheti egyszerre.

1. A hívás közbeni vezérlőkben kattintson a kék **Kapcsolat hozzáadása a híváshoz** gombra.
2. Kattintson a névjegy mezőjére a hívás indításához.
3. Mialatt kicseng egy kék animáció és egy hívásbefejező gomb jelenik meg a kapcsolat mezőjében.
4. Fogadás esetén a kapcsolat hozzáadásra kerül a híváshoz, és eltűnik a listából.
5. A listát bezárhatja a kék **Kapcsolat hozzáadása a híváshoz** gombra kattintva, vagy a kontaktlista jobb oldalán lévő üres területre koppintva.

Csatlakozás hostolt munkamenethez – Névjegyzékből

1. Lépjen az alkalmazás főképernyőjén található névjegylistára.
2. Válassza ki azt a kapcsolatot, amely a csatlakozni kívánt labort hostolja.
3. A kapcsolat információs képernyőjén kattintson a **Csatlakozás a híváshoz**; ez a lépés a **10. ábrán** látható.

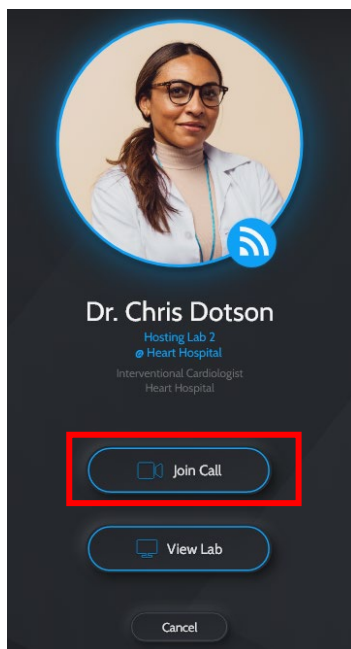


10. ábra Kapcsolati információk képernyő

4. Mialatt kicseng, megjelenik egy videó-előnézet, és lehetősége lesz a hívás közbeni beállítások módosítására.

Csatlakozás hostolt munkamenethez – Helyszínlistából

1. Navigáljon a helyszínek listájához az alkalmazás főképernyőjén.
2. Válassza ki a laboratóriumot, amelyhez csatlakozni kíván.
3. A laboratórium információs képernyőjén kattintson a **Csatlakozás hostolt híváshoz**; ez a lépés a **11. ábrán** látható.

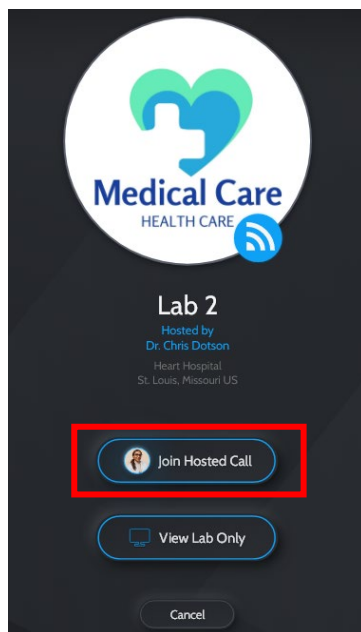

11. ábra Laboratórium Info képernyő

4. Mialatt kicseng, megjelenik egy videó-előnézet, és lehetősége lesz a hívás közbeni beállítások módosítására.

Csatlakozás hostolt munkamenethez – Labornézetből

1. Navigáljon a helyszínek listájához az alkalmazás főképernyőjén.
2. Ha a laboratóriumok nem láthatók, kattintson a helyszín mezőre a laborlista kibontásához.
3. Válassza ki a laboratóriumot, amelyhez csatlakozni kíván.
4. A labor információs képernyőjén, kattintson a **Csak laboratórium megtekintése** lehetőségre.



Megjegyzés: A “Csak laboratórium megtekintése” módban a labor streamje látható lesz. A hosttal vagy a hostolt munkamenet többi résztvevőjével való interakció nem lehetséges, amíg nem csatlakozik a híváshoz.

5. Kattintson a **Csatlakozás** gombra.
6. Mialatt kicseng, megjelenik egy videó-előnézet, és lehetősége lesz a hívás közbeni beállítások módosítására,

Kérések

Kapcsolat- vagy helyhozzáférési kérelem küldése

1. Kattintson a keresés ikonra a képernyő jobb felső sarkában.
2. Keressen rá arra a személyre vagy webhelyre, akinek kérést szeretne küldeni.
3. Kattintson a kék **Kapcsolat hozzáadása** ikonra a kérés elküldéséhez.
4. Amíg a kérés függőben van, egy zöld, elküldött kérést jelző ikon jelenik meg a mezőben.
5. A kérés visszavonásához kattintson a **Zöld küldve** ikonra.

Kapcsolati vagy jóváhagyási kérelemre adott válasz

1. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
2. Kattintson a **Kérések** gombra.
3. Kattintson a kapcsolat mezőjére a kérés kibontásához.
4. Erősítse meg vagy törölje a kérést.

4. Profilok és beállítások szerkesztése

Profil szerkesztése

1. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
2. Kattintson a **Profilra**.

Személyes adatok szerkesztése




Megjegyzés: A névváltoztatásokhoz *SynX* rendszergazdai jóváhagyás szükséges. Névváltoztatási kérelmet a profil szerkesztése oldalon küldhet.

1. Kattintson a **Szerkesztés** linkre a módosítani kívánt mezőtől jobbra.
2. Végezze el az adatain a kívánt módosításokat.
3. Kattintson a **Mentésre**.

Profilkép szerkesztése

1. Kattintson a profilképe felett található ceruzát ábrázoló gombra.
2. Válassza ki, hogyan szeretné frissíteni a képét. A két lehetőséget a **12. ábra** mutatja.
 - a. Fénykép készítése
 - i. Készítse el az új fényképét.
 - i. Ellenőrizze a fotóját.
 - ii. Kattintson a **Fénykép frissítése** lehetőségre.
 - b. Választás könyvtárból
 - i. Használja a fájlkezelőt vagy a galériát az új profilkép kiválasztásához.
 - ii. Ellenőrizze a fotóját.
 - iii. Kattintson a **Fénykép frissítése** lehetőségre.

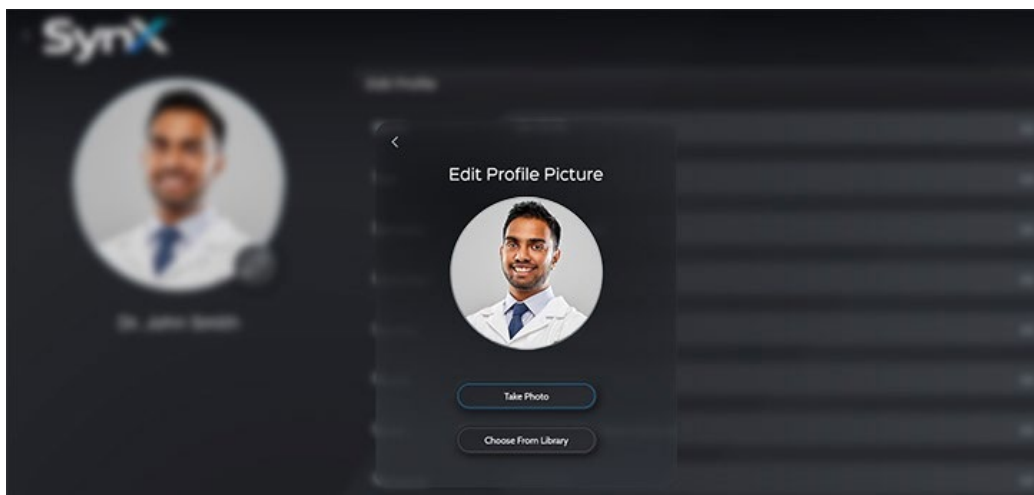

12. ábra Profilkép szerkesztési lehetőségek

Beállítások

1. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
2. Kattintson a **Beállításokra**.

Értesítési beállítások

1. Kattintson az **Értesítések**-re.
2. Itt kezelheti az értesítésekkel kapcsolatos beállításokat:
 - a. Nem fogadott hívások – Be- vagy kikapcsolja a natív iOS és Android értesítéseket a nem fogadott hívásokra vonatkozóan.
 - b. *SynX* kérések– Be- vagy kikapcsolja a natív iOS és Android értesítéseket *SynX* kérésekre vonatkozóan.
 - c. Jóváhagyási kérések - Be- vagy kikapcsolja a natív iOS és Android értesítéseket a jóváhagyási kérésekre vonatkozóan.

Audio és Video beállítások



Megjegyzés: Csak webböngészőből érhető el.

1. Kattintson az **Audio és Video** lehetőségre.
2. Itt kezelheti az alapértelmezett hang- és videóbeállításokat:
 - a. Kamera – A legördülő menüben válassza ki az alapértelmezett kamerát a hívásokhoz.
 - b. Mikrofon – A legördülő menüben válassza ki az alapértelmezett mikrofont a hívásokhoz.
 - c. Hangszóró– A legördülő menüben válassza ki az alapértelmezett hangszórót a hívásokhoz.

Adatvédelmi és biztonsági beállítások



Megjegyzés: Csak mobileszközről érhető el.

1. Kattintson az **Adatvédelem és biztonság** lehetőségre.
2. Itt kezelheti az adatvédelmi és biztonsági beállításokat:
 - a. Biometria – Be- vagy kikapcsolja, hogy a helyi biometrikus azonosítást használja-e a bejelentkezéshez.
 - i. Ha be van kapcsolva, a mobileszköz a natív biometrikus bejelentkezést vagy az eszköz jelszavát fogja használni az alkalmazás megnyitásakor.
 - ii. Ha ki van kapcsolva, az alkalmazás megnyitásakor a felhasználónevével és jelszavával kell bejelentkeznie.

5. Fiókkezelés és kijelentkezés

Kijelentkezés és a *SynX* leállítása

1. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
2. Kattintson a **Beállításokra**.
3. Kattintson a **Fiók** lehetőségre.
4. Kattintson a **Kilépésre**.
5. Zárja be a készülékén futó *SynX* appot a készülékén a *SynX* biztonságos leállításához.

Fiók törlése és a *SynX* törlése

1. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
2. Kattintson a **Beállításokra**.
3. Kattintson a **Fiók** lehetőségre.
4. Kattintson a **Fiók törlése** pirossal jelölt linkre az oldal alján.
5. Írja be a jelszavát a megerősítéshez.
6. Kattintson a **Folytatás** lehetőségre.
7. A *SynX* rendszer biztonságos leállításához és eltávolításához távolítsa el és törölje a szoftvert a készülékéről.

6. Műszaki problémák elhárítása

Bejelentés bejelentése

1. Lépjen a főmenübe a bal felső sarokban található avatarjára kattintva.
2. Kattintson a **Segítség** gombra.
3. Írja be a hiba leírását a szövegmezőbe.
4. Kattintson a **Hiba bejelentése** lehetőségre.
 - a. Biztonsági incidenseket a felhasználók a **Segítség** és **Hiba bejelentése** lehetőségeken jelezhetik.

Tárgymutató

Fiók	5, 6, 8, 17	Adatvédelem	16
Fiókkezelés	17	Jelentés	18
Hívás	10, 11	Kérés	14
Kapcsolat	7, 12	Korlátozott hozzáférés	7
Szerkesztés	8, 15	Biztonság	16, 18
Eszközinformáció	ii	SynX	1
Teljes hozzáférés	8	Problémaelhárítás	18
Host	9	Jóváhagy	6
Csatlakozás	12	Jóváhagyás	8
Beállítások	16	Megtekintés	11